



# neoform MED rapid



**Kant en klaar desinfectiemiddel  
voor medische hulpmiddelen**  
Gebruiksklare oplossing



## Toepassingsgebied:

- Voor snelle en doelgerichte desinfectie van oppervlakken van medische hulpmiddelen, zoals bijv. OK-tafels, in ziekenhuizen en in huisarts- en tandartspraktijken

## Werkingscapaciteit:

- De bactericide, levuricide, fungicide en tuberculocide werking conform de VAH<sup>1</sup>- en EN-methoden<sup>2</sup> en de beperkte virucide werking volgens RKI/DVV<sup>3</sup>-methoden is bevestigd door certificering
- Bovendien beperkt virucide PLUS (effectief tegen norovirussen en adenovirussen) en effectief tegen rotavirussen
- De te behandelen oppervlakken dienen bestand te zijn tegen desinfectiemiddelen op alcoholbasis
- Niet geschikt voor het desinfecteren van acrylglas (plexiglas)
- Opgenomen in de VAH<sup>1</sup>-lijst
- Opgenomen in de lijst van desinfectiemiddelen van de IHO<sup>4</sup>

## Bijzondere eigenschappen:

- Brede werkingscapaciteit, zelfs bij korte inwerktijd.
- Snelle en residu-vrije droging, afspoelen is niet nodig
- Vrij van aldehyden, kleurstoffen en parfum

## Toepassing en dosering:

Breng neoform MED rapid onverdund aan op de gereinigde, droge vlakken zodat het volledige oppervlak vochtig is en veeg de gedesinfecteerde vlakken vervolgens af. Alle oppervlakken dienen volledig te worden bevochtigd met neoform MED rapid.

Afhankelijk van de gewenste desinfectiewerking onderstaande inwerktijden aanhouden.

|   |  |
|---|--|
|   | geringe belasting, 20 °C<br>(voorgereinigde vlakken) |
| bactericide (VAH <sup>1</sup> , EN 13727, EN 16615) | onverdund, 1 min                                     |
| levuricide (VAH <sup>1</sup> , EN 13624, EN 16615)  | onverdund, 1 min                                     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| fungicide (EN, 13624)   | onverdund, 20 min |
| tuberculocide (EN 14348)  | onverdund, 30 sec |
| begrensd virucide (incl. HIV, HBV, HCV) (EN 14476, RKI/DVV <sup>3</sup> )             | onverdund, 15 sec |
| beperkt virucide PLUS (adenovirus, norovirus, incl. alle omhulde virussen) (EN 14476) | onverdund, 2 min  |
| Effectief tegen norovirussen (MNV <sup>5</sup> ) (EN 14476)                           | onverdund, 2 min  |
| Effectief tegen adenovirussen (EN 14476)  | onverdund, 1 min  |
| Effectief tegen rotavirussen (EN 14476)   | onverdund, 1 min  |
| VAH <sup>1</sup> -lijst   | onverdund, 5 min  |

Door het alcoholgehalte mag neoform MED rapid niet in te grote hoeveelheden worden aangebracht (niet meer dan 50 ml per m<sup>2</sup> op het te behandelen vlak en max. 100 ml per m<sup>2</sup> vloeroppervlak aanbrengen). Lees en volg de gevaren- en veiligheidsinstructies zorgvuldig!

## Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Voor een zuinige en gecontroleerde dosering wordt het gebruik van een handmatige doseerhulp aanbevolen. Neem contact met ons op.
- Over het algemeen wordt aanbevolen om bij de omgang met desinfectiemiddelen handschoenen te dragen.
- Het reinigen, desinfecteren en steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.
- Volg de reinigings- en desinfectie-adviezen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen en oppervlakken.
- Niet mengen met andere producten.



# neoform MED rapid

## Gecertificeerd:

De desinfecterende werking is bevestigd door certificering. Het adviesrapport stellen wij desgewenst graag ter beschikking.

- 1 Het Duitse 'Verband für Angewandte Hygiene'
- 2 Europese testmethoden
- 3 volgens de testrichtlijnen van het Robert Koch-Instituut (RKI) en de Duitse vereniging ter bestrijding van virale infecties (DVV)
- 4 Het Duitse 'Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz' (het 'industrieverbond voor hygiëne en oppervlaktebescherming')
- 5 murine norovirussen

## Technische gegevens:

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Viscositeit      | < 10 mPa s (onverdund, 20 °C)     |
| Dichtheid        | ca. 0,9 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Ontvlammingspunt | 27 °C conform DIN 22719           |

## Ingrediënten:

Werkzame bestanddelen in 100 g:  
35,0 g propaan-1-ol  
25,0 g ethanol


## CE-markering:

neoform MED rapid voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie op de hoogte te worden gesteld.

## Opslaginstructies:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen -15 en 25 °C worden aangehouden. Goed gesloten in de fles bewaren.

Bij juiste opslag 3 jaar te gebruiken. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

## Gevaren- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) in de rubriek 'Service/Downloads'.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 4070/3-5 Versie: 11/2020

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.