

neodisher® MediKlar Dental

Nachspülmittel zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten
Flüssigkonzentrat



Hauptanwendungsbereiche:	Nachspülung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten inklusive Übertragungsinstrumenten sowie zahnärztlichen Utensilien wie Trays, Mundspülbecher und Nierenschalen.
Eigenschaften:	neodisher MediKlar Dental verbessert die Benetzung von Oberflächen aus Edelstahl und Kunststoff und beschleunigt die Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung. Verkürzt die Trocknungszeit signifikant. Gleichzeitig werden verschleppte Alkalireste und alkalische Wässer neutralisiert.
Anwendung und Dosierung:	<p>neodisher MediKlar Dental wird in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Dentalinstrumente eingesetzt. Die Dosierung erfolgt automatisch über maschineneigene Dosiergeräte in den letzten Spülgang und beträgt 0,2 - 0,4 ml/l.</p> <p>Die Dosiergeräte müssen für die Dosierung von neodisher MediKlar Dental geeignet sein.</p> <p>Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung zu empfehlen. Gleichzeitig wird dadurch eloxiertes Aluminium geschützt.</p> <p>Nicht mit anderen Produkten mischen. Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.</p> <p>Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinproduktebetriebsverordnung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden.</p> <p>Beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Instrumentenherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.</p> <p>Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten.</p> <p>Nur für gewerbliche Anwendungen.</p>
Technische Daten:	<p>Dichte (20 °C): 1,1 g/cm³</p> <p>pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,2 - 0,4 ml/l: 4,0 - 3,7</p> <p>Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPa s</p>
Inhaltsstoffe:	<p>Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004:</p> <p>< 5 % Phosphonate</p> <p>15-30 % nichtionische Tenside</p> <p>außerdem Konservierungsmittel (Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone)</p>
CE- Kennzeichnung: CE	neodisher MediKlar Dental erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I über Medizinprodukte.
Lagerhinweise:	Frostfrei lagern. Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol
Gefahren- und Sicherheitshinweise:	<p>Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.</p> <p>Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.</p>

MB 4776/2-4 05-15



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60-0
Telefax: (040) 789 60-120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.