




neodisher® Septo Active



Desinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten

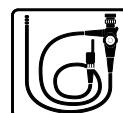

Granulat

Anwendungsbereich:

- Manuelle Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten inklusive flexibler Endoskope
- Auch für die manuelle desinfizierende Reinigung im Tauch- oder Ultraschallbad

Leistungsspektrum:

- Bakterizide, fungizide, mykobakterizide, viruzide und sporizide Wirkung gutachterlich bestätigt
- Die desinfizierende Wirksamkeit wurde nach europäischen Normen, VAH¹- und DVV/ RKI²-Methoden geprüft und nachgewiesen
- Gute Reinigungsleistung, nicht proteinfixierend
- Ummanteltes Granulat – staubarm und gut löslich
- Geeignet für Materialien wie Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Kunststoffe (inkl. Silikon)
- Nicht geeignet für Instrumentarium aus Messing und Kupfer sowie für mechanisch vorgeschädigte verchromte oder vernickelte Oberflächen
- VAH¹-gelistet
- ÖGHMP³-gelistet
- In der Viruzidie-Liste des IHO⁴ eingetragen

Besondere Eigenschaften:

- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Einsetzbar bei allen Wasserhärten
- pH neutrale Formulierung mit angenehmem Geruch, frei von Parfum
- Auf Basis von Peressigsäure – keine Unverträglichkeiten mit anderen Wirkstoffen
- Frei von Aldehyden, Aminen und quartären Ammoniumverbindungen

Anwendung und Dosierung:

neodisher Septo Active kann in Tauchbädern oder Ultraschallbädern verwendet werden. Je nach gewünschter Wirksamkeit eine Lösung nach der unten genannten Anwendungsempfehlung herstellen. Dazu neodisher Septo Active in maximal lauwarmem Wasser unter Rühren vollständig auflösen. Nach 15 Minuten ist die Anwendungslösung einsatzbereit. Die Medizinprodukte nach Herstellerangaben zerlegen bzw. öffnen und in der Anwendungslösung reinigen bzw. zur Desinfektion in die Anwendungslösung einlegen. Alle Oberflächen müssen vollständig mit der Desinfektionsmittellösung benetzt sein. Luftblasen müssen entfernt werden. Im Ultraschallbad sollte die Beschallungszeit gemäß den Angaben der Instrumentenhersteller nicht überschritten werden.

Anwendungsempfehlung (20 °C)	
Desinfizierende Reinigung bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. z.B. HBV, HIV, HCV)	10 g/l (1,0 %), 5 min
Desinfizierende Reinigung mit sporizider Wirksamkeit bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. z.B. HBV, HIV, HCV), sporizid (inkl. Clostridium difficile)	10 g/l (1,0 %), 15 min
Desinfektion bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid (inkl. z.B. Rotaviren, Noroviren, HAV), sporizid (inkl. Clostridium difficile)	20 g/l (2,0 %), 15 min

Die genaue Dosierung mit dem neodisher Dosierbecher entnehmen Sie bitte der Dosiertabelle.

Dosiertabelle		
Lösung	gewünschte Konzentration der Anwendungslösung	
	1,0 %	2,0 %
	benötigte Granulatmenge (Skala neodisher Dosierbecher)	
3 l	37,5 ml	75 ml
5 l	62,5 ml	125 ml
10 l	125 ml	250 ml
30 l	375 ml	750 ml



neodisher[®] Septo Active

Anwendungshinweis: Das gewünschte Wasservolumen in der Wanne vorlegen. Die entsprechende Granulatmenge gemäß der Tabelle mit Hilfe des neodisher Dosierbeckers (Volumen an der Skalierung ablesen) zugeben.

Mit den Teststäbchen neodisher test strips (Art.Nr. 981320) kann die Konzentration der Anwendungslösung überprüft werden. Die Lösung ist mindestens arbeitstäglich zu erneuern, oder wenn ein zu geringer Wirkstoffgehalt angezeigt wird.

Ein Antrocknen der neodisher Septo Active-Anwendungslösung vermeiden.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur kontrollierten Dosierung sind ggf. manuelle Dosier- und Anwendungshilfen wie z.B. der neodisher Dosierbecher zu verwenden.
- Generell empfiehlt sich, bei manuellen Arbeiten mit Desinfektionsmitteln, Handschuhe zu tragen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinprodukte-Betreiberverordnung und der KRINKO/BfArM-Empfehlung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden.
- Die neodisher Septo Active-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Instrumentenherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.

Gutachten:

Die desinfizierende Wirksamkeit wurde gutachterlich bestätigt. Gutachten stellen wir auf Wunsch gern zur Verfügung.

Technische Daten:

pH-Wert	ca. 7,6 - 7,9 (20 g/l, bestimmt in Stadtwasser, 20 °C)
Schüttgewicht	800 g/l

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % Phosphate, nichtionische Tenside
> 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Der Wirkstoff Peressigsäure entsteht bei der Herstellung der Anwendungslösung. Eine 1,0 %ige Anwendungslösung (10 g Granulat pro Liter Wasser) enthält 0,15 % Peressigsäure.

CE-Kennzeichnung: CE₀₂₉₇

neodisherSepto Active erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I über Medizinprodukte.

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 25 °C einzuhalten. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig.

Verwendbar bis: Siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol

Gefahren und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4098/3-4 Stand 05/2017

-
- 1 Verbund für Angewandte Hygiene
 - 2 Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten/Robert Koch-Institut
 - 3 Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin
 - 4 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.