




# neodisher<sup>®</sup> Septo DN 2

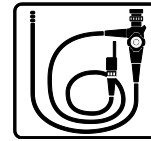

## Desinfektionsmittel zur maschinellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen

### Flüssigkonzentrat

### Anwendungsbereich:

- Für die Desinfektion flexibler Endoskope in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten

### Leistungsspektrum:

- Bakterizide, fungizide, mykobakterizide und viruzide Wirksamkeit nach EN-Normen gutachterlich bestätigt
- In der Viruzidie-Liste des IHO<sup>1</sup> eingetragen

### Besondere Eigenschaften:

- Breites Wirkungsspektrum
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Frei von Formaldehyd und quaternären Ammoniumverbindungen

### Anwendung und Dosierung:

Die Dosierung von neodisher Septo DN 2 erfolgt über das maschineneigene Dosiergerät zu Beginn des Desinfektionsschritts.

bakterizide, fungizide, mykobakterizide und viruzide Wirksamkeit	1,0 %, 55 °C, 5 min
--	---------------------

Im Reinigungsschritt wird das Reinigungsmittel neodisher MediClean forte empfohlen.

### Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Nach der Anwendung ist die neodisher Septo DN 2-Anwendungslösung vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.
- Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung zu empfehlen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Instrumentenherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
- Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.



# neodisher<sup>®</sup> Septo DN 2

## Gutachten / Listungen:

Die desinfizierende Wirksamkeit wurde gutachterlich bestätigt. Gutachten stellen wir auf Wunsch gern zur Verfügung.

## Technische Daten:

pH-Wert	ca. 7 (1,0 %, bestimmt in enthärtetem Wasser (von 15 °d auf 0 °d), 20 °C)
Viskosität	< 10 mPa s (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	1,05 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

## Inhaltsstoffe:


Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:  
< 5 % Phosphonate  
Desinfektionswirkstoffe in 100 g: 20,0 g Glutaral

## CE-Kennzeichnung: 0297

neodisher Septo DN 2 erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I über Medizinprodukte.

## Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten.

Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig.  
Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

## Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) in der Rubrik „Service“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4990/3-2  
Stand: 04/2013

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.