



# neiform MED FF



## Flächendesinfektionsreiniger



### Flüssigkonzentrat

#### Anwendungsbereich:

- Flächenreinigung und -desinfektion von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und anderen Oberflächen in Krankenhäusern, Praxen und Altenheimen
- Auch zur Anwendung im Eimer-Tücher-System Kimtech\* Wettask\* DS von Kimberly-Clark geeignet

#### Leistungsspektrum:

- Bakterizide, levurozide, tuberkulozide und viruzide Wirksamkeit sowie die Wirksamkeit gegen Clostridium difficile gutachterlich bestätigt
- Die Anwendung im Eimer-Tücher-System Kimtech\* Wettask\* DS von Kimberly-Clark erfüllt die Anforderungen der aktuellen VAH-Empfehlung<sup>1</sup>
- VAH-gelistet<sup>2</sup>
- In der Viruzidie-Liste des IHO<sup>3</sup> eingetragen
- Frei von Formaldehyd

#### Besondere Eigenschaften:

- Breites Wirkungsspektrum und gute Reinigungsleistung
- Auch bei Ausbrüchen von C. difficile zur Desinfektion im patientennahen Bereich geeignet
- Wirksam gegen Noroviren gemäß RKI-Empfehlung

#### Anwendung und Dosierung:

neiform MED FF wird zur kombinierten Flächenreinigung und -desinfektion bei Raumtemperatur im Wischverfahren angewendet. Je nach gewünschter Wirksamkeit neiform MED FF entsprechend der unten genannten Konzentration verdünnen. Die zu reinigenden und desinfizierenden Flächen mit der Lösung abwischen und die genannte Einwirkzeit einhalten.

neiform MED FF kann auch mit dem Eimer-Tücher-System Kimtech\* Wettask\* DS von Kimberly-Clark angewendet werden: Die Tuchrolle in das Tuchspender-System einsetzen. Einfach von der angesetzten Anwendungslösung (mind. 0,5%ig) 2,0 l in den Eimer bzw. 0,75 l in die Dose geben. Tuchspender-System fest verschließen. Nach 60 min sind die Tücher vollständig durchtränkt und einsatzbereit. Zur Anwendung das getränkte Tuch einfach durch die Entnahmeöffnung ziehen und Menge je nach Bedarf entnehmen. Nach Entnahme das Spendersystem wieder fest verschließen. Die durchtränkten Tücher können bei ordnungsgemäß verschlossenem Spendersystem bis zu 28 Tage verwendet werden.

Die VAH-Empfehlung<sup>1</sup> sieht nach Entleeren vor der Wiederbefüllung des Spendersystems eine gründliche desinfizierende Reinigung und Trocknung vor. Das Eimer-Tücher-System Kimtech\* Wettask\* DS von Kimberly-Clark kann sowohl manuell als auch im Reinigungs- und Desinfektionsgerät thermisch (hitzestabil bis 100 °C) oder chemothermisch aufbereitet werden.

|   | Geringe Belastung<br>(vorgereinigte Flächen) 20 °C                                  | Hohe Belastung<br>(nicht vorgereinigte Flächen) 20 °C  |
|---|---|--|
| bakterizid/levurozid <sup>4</sup>                       | 10 ml/l (1,0%),<br>5 min<br>5 ml/l (0,5%),<br>15 min<br>2,5 ml/l (0,25%),<br>60 min | 15 ml/l (1,5%),<br>5 min<br>10 ml/l (1,0%),<br>15 min<br>5 ml/l (0,5%),<br>30 min<br>2,5 ml/l (0,25%),<br>60 min |
| tuberkulozid <sup>4</sup>                               | 40 ml/l (4,0 %),<br>30 min<br>10 ml/l (1,0 %),<br>60 min                            | 40 ml/l (4,0 %),<br>30 min<br>10 ml/l (1,0 %),<br>60 min   |
| begrenzt viruzid <sup>5</sup><br>(inkl. HIV, HBV, HCV)  | 5 ml/l (0,5 %),<br>5 min  | –  |
| viruzid <sup>5</sup>                                    | 20 ml/l (2,0 %),<br>60 min  | –  |
| Wirksamkeit gegen<br>Clostridium difficile <sup>5</sup> | 30 ml/l (3,0 %),<br>30 min  | –  |



# neiform MED FF

## Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz manueller Dosierhilfen, wie z.B. Zumischargegeräte oder Dosieraufsätze. Bitte sprechen Sie uns an.
- Generell empfiehlt sich, bei manuellen Arbeiten mit Desinfektionsmitteln, Handschuhe zu tragen.
- Zur Vermeidung von Rückständen auf Oberflächen ist nach Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- *Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.*

## Gutachten:

In der aktuellen Liste des VAH<sup>2</sup> gelistet.

Die desinfizierende Wirksamkeit sowie die Standzeit und die Kompatibilität im Tuchspendersystem Kimtech\* Wettask\* DS von Kimberly-Clark wurden gemäß VAH-Empfehlung<sup>1</sup> geprüft und gutachterlich bestätigt. Gutachten stellen wir auf Wunsch gern zur Verfügung.

## Technische Daten:

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| pH-Wert    | ca. 4,5 (Konzentrat, 20 °C)   |
| Viskosität | < 10 mPa s                    |
| Dichte     | 1,0 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |

## Inhaltsstoffe:

### Desinfektionswirkstoffe in 100 g:

- 5,0 g Benzalkoniumchlorid
- 3,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid
- 8,0 g Glutaral (Glutaraldehyd)

## CE-Kennzeichnung: CE<sub>0297</sub>

neiform MED FF erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I über Medizinprodukte.

## Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 25 °C einzuhalten. Behälter dicht geschlossen halten.

Bei sachgemäßer Lagerung 4 Jahre verwendbar. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol

## Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern.

Diese sind unter [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) in der Rubrik „Service“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4057/3-1  
Stand: 12/2014

1 Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortränksystem für die Flächendesinfektion (Hyg Med 20132; 37-11)

2 Verbund für Angewandte Hygiene

3 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

4 nach der Prüflinie der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM)

5 nach den Prüflinien des Robert-Koch-Instituts (RKI), ehemals Bundesgesundheitsamt, und der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten (DVV)

6 in Anlehnung an EN 13704