

# weigomatic® Vorlagebehälter

Zur optimalen Gestaltung zentraler Dosieranlagen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel

## Beschreibung


Die Versorgung mehrerer Reinigungs- und Desinfektionsautomaten erfolgt üblicherweise über zentrale Dosieranlagen. Bei Verwendung gleicher Behandlungsmittel ist die Integration von **weigomatic® Vorlagebehältern** besonders vorteilhaft - die platz- und kostensparende Lösung! Durch Nutzung von bauseits in den Spülmaschinen vorhandenen Dosierpumpen reduziert sich die Anzahl der Dosierpumpen an der zentralen Versorgungseinheit deutlich, weil pro Behandlungsmittel nur eine Pumpe und eine Dosierleitung zur Förderung aus dem Liefergebilde in den **weigomatic® Vorlagebehälter** benötigt wird. Die Dosierung aus den **weigomatic® Vorlagebehältern** in die einzelnen Spülmaschinen erfolgt über die in den Spülmaschinen vorhandenen Dosierpumpen (siehe Zeichnung).

## Vorteile der Dosierung über weigomatic® Vorlagebehälter

- Einfache Bauweise – deutlich reduzierte Material- und Montagekosten der zentralen Dosieranlage
- Erhebliche Platzersparnis an der Dosieranlage, da nur eine Dosierpumpe pro Produkt
- in den Reinigungs- und Desinfektionsautomaten vorhandene Dosierüberwachungen können besser genutzt werden
- Klar definierte Schnittstelle zwischen der zentralen Dosiereinheit und Spülmaschine (Medizinproduktegesetz)

Die Regulierung des Füllstandes im **weigomatic® Vorlagebehälter** und die Verarbeitung von evtl. auftretenden Störungen übernimmt die Steuerung der Dosieranlage. Störungsausgänge bei Produktmangel o.ä. werden an die Maschinen weitergeleitet und ausgewertet (z.B. Unterbrechung der Reinigung).

## Schematische Darstellung der Versorgung von vier Spülmaschinen mit vier Behandlungsmitteln über weigomatic® Vorlagebehälter

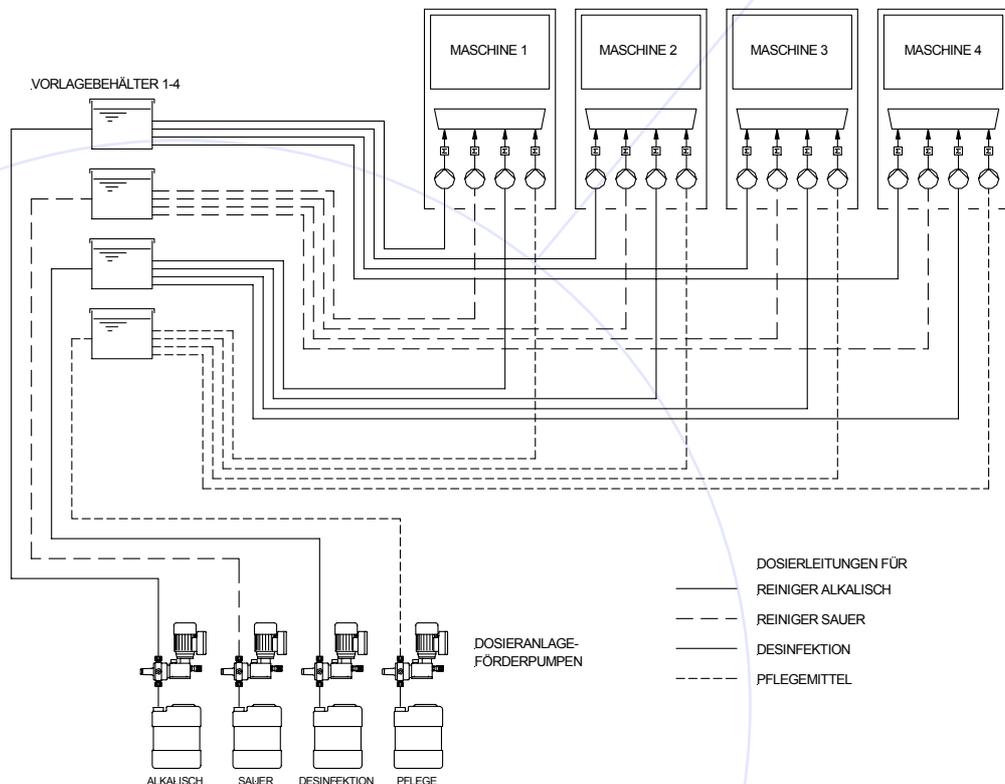

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.


Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
 Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg  
 Telefon: (040) 789 60 - 0  
 Telefax: (040) 789 60 - 120  
 E-Mail: [info@drweigert.de](mailto:info@drweigert.de)  
 Internet: [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)

# weigomatic® Vorlagebehälter

## Wichtige Voraussetzungen für die Verwendung der weigomatic® Vorlagebehälter

- die zu versorgenden Spülmaschinen und die weigomatic® Vorlagebehälter müssen auf gleicher Ebene und in geringer Entfernung zueinander stehen!
- die Spülmaschinen werden alle mit den gleichen Produkten versorgt
- die Spülmaschinen müssen mit den benötigten Dosierpumpen (Schlauchpumpen) ausgerüstet sein.

## Technische Daten

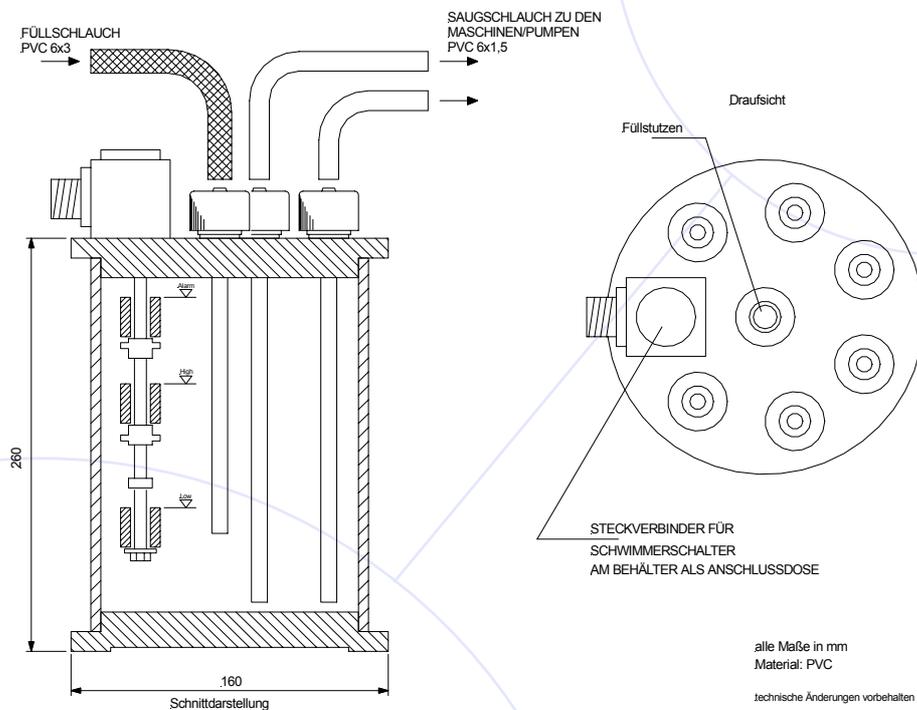

MB weigomatic Vorlagebehälter (2-1/09-04)

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
 Mühlentagen 85, D - 20539 Hamburg  
 Telefon: (040) 789 60 - 0  
 Telefax: (040) 789 60 - 120  
 E-Mail: info@drweigert.de  
 Internet: www.drweigert.de