



Sichere Aufbereitung von Dentalinstrumenten mit neodisher®

1. Vorbereitung:

- Arbeitsschutzmaßnahmen beachten, z. B. Handschuhe tragen
- Füll- und Ätzmaterialien sofort nach Anwendung entfernen, z. B. mit Zellstofftuch
- Kontaminierte sowie nicht verwendete, offen bereitgestellte Instrumente in geeignete Kassetten oder Trays ablegen

2. Maschinelle Aufbereitung:

- Instrumente in geeignete Einsatzkörbe und Aufnahmeinsätze des Reinigungs- und Desinfektionsautomaten einordnen

Reinigungsmittel: **neodisher® MediClean Dental** oder **neodisher® FA Dental** oder **neodisher® MA Dental** (Pulver)

Neutralisationsmittel: **neodisher® Z Dental** oder **neodisher® N Dental**

Nachspülmittel: **neodisher® MediKlar Dental** oder **neodisher® Mielclear**

Für maschinell aufbereitbare Übertragungsinstrumente: **neodisher® MediClean Dental** und **neodisher® Z Dental**

3. Entnahme der Instrumente: Nasse und feuchte Instrumente umgehend trocknen.

4. Kontrolle: Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen Spezialreinigung mit **neodisher® LM 2** im Ultraschallbad.

5. Pflege: **neodisher® IP Spray** für Gelenkinstrumente

6. Funktionsprüfung

Instrumente für invasive Maßnahmen

Instrumente für nichtinvasive Maßnahmen

7. Verpackung

7. ggf. Verpackung

8. Dampfsterilisation

8. ggf. Dampfsterilisation

9. Sterile, saubere Instrumente

9. Desinfizierte, saubere Instrumente

10. Hygienische Lagerung trocken, sauber, staubgeschützt

