



DR. WEIGERT

Hygiene mit System

Medizin

NEU! neodisher® CleanTags
Reinigungsprozessüberwachungsindikatoren
für maximale Sicherheit im maschinellen
Aufbereitungsprozess



neodisher®
**MediClean
forte**

Das Multitalent zur Aufbereitung von
thermostabilen und thermolabilen Instrumenten.

neodisher® MediClean forte – die Nummer 1 bei der Aufbereitung von Medizinprodukten.

neodisher® MediClean forte

Erstklassiger mildalkalischer Reiniger mit besonders hoher Materialverträglichkeit für eine optimierte Instrumentenaufbereitung

- Für die manuelle und maschinelle Reinigung von da Vinci EndoWrist-Instrumenten
- Für die maschinelle und manuelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten



220 kg Fass
4050 13



20 L Kanister
4050 26



10 L Kanister
4050 30



5 L Kanister
4050 35*



5 L Kanister
4050 33*

* Artikel 405033 ist für alle maschinellen Prozesse vorzusehen, der Artikel 405035 ist dagegen passend für die Kanisterkonsole der Dosiergeräte für Desinfektionsmittel wie neomatik® mediDOS

** die Dosiermenge ist vom Verschmutzungsgrad abhängig

*** abhängig von der jeweiligen Empfehlung des Reinigungs- und Desinfektionsgeräteherstellers

Vielseitiger Anwendungsbereich:

neodisher® MediClean forte vereint die Vorzüge alkalischer und enzymatischer Reiniger. Geeignet und empfohlen für praktisch alle Reinigungsprozesse:

- Maschinelle und manuelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten, inklusive MIC- und Mikroinstrumenten, flexiblen Endoskopen, Anästhesie-Utensilien, Containern und anderen medizintechnischen Utensilien
- Manuelle und maschinelle Reinigung von da Vinci EndoWrist-Instrumenten

Anwendungsempfehlung:

Maschinelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten

2-10 ml/l**,
z.B. 40 - 60 °C,
10 min

Maschinelle Reinigung von da Vinci EndoWrist-Instrumenten

8 ml/l,
40 - 55 °C, 10 - 30 min***

Manuelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauch- und Ultraschallbad

5-20 ml/l**,
max. 40 °C,
10 - 30 min

Manuelle Reinigung von da Vinci EndoWrist-Instrumenten im Tauch- und Ultraschallbad

10 ml/l,
max. 40 °C

neodisher® MediClean forte erzielt in verschiedenen In-vitro und In-vivo-Tests mit kontaminierten Edelstahloberflächen eine Abreicherung pathogener Prionproteine¹

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:


- erstklassige Reinigungsleistung durch einzigartige Formulierung auf Basis von Alkalien, Tensiden und Enzymen
- sehr gute Materialschonung
- erster mildalkalisch-enzymatischer Reiniger, seit über 10 Jahren marktführend
- schaumarme Formulierung, optimale Anwendung im RDG und im Ultraschallbad
- Kontrolle des Reinigungsprozesses im RDG mittels neodisher® CleanTags



- entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut, verhindert die Wiederablagerung bereits abgelöster Proteine
- geeignet für Instrumente und Utensilien aus Edelstahl, Instrumentenstahl, Optiken, übliche Kunststoffe sowie Materialien von Anästhesieutensilien
- nur ein Produkt für praktisch alle Reinigungsprozesse in der AEMP, langjährig erprobt und bewährt, für die Aufbereitung von da Vinci EndoWrist-Instrumenten empfohlen
- bei Verwendung zur manuellen Vorreinigung ist vor der nachfolgenden maschinellen Reinigung mit neodisher® MediClean forte kein Abspülen der Reinigerlösung erforderlich
- Reinigungsprozessüberwachungsindikatoren zur Routineüberwachung für einen fehlerfreien Aufbereitungsprozess

¹Evaluation of the ability of neodisher MediClean forte to inactivate and/or remove transmissible spongiform encephalopathy (TSE, Prions) agents from surfaces of medical and surgical devices, after direct inoculation of experimentally contaminated surfaces - Service d'Etude des Prions et des Infections Atypiques

neodisher® CleanTag – der Indikator für maximale Sicherheit.

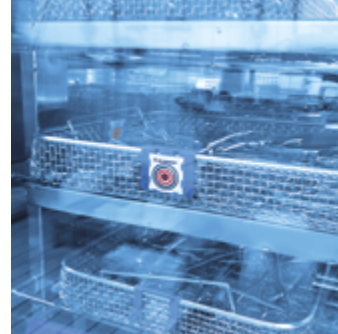

neodisher® CleanTag

Reinigungsprozessüberwachungsindikator für die Routineüberwachung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) im Verfahren mit neodisher® MediClean forte

- schwer abwaschbarer, dreifarbiger, selbstklebender Indikator
- die Farben haben unterschiedliche Zusammensetzungen und Hafteigenschaften
- **neodisher® CleanTag Holder**: Halter aus Kunststoff, zur reproduzierbaren Platzierung des Indikators im RDG für die Prozessüberwachung



neodisher CleanTags
(320 Indikatoren)
981325



neodisher CleanTag Holder
(10 Stück)
981330

Anwendung:

neodisher® CleanTags werden zur Routineüberwachung des Reinigungsprozesses im RDG eingesetzt. Die dreifarbig bedruckten Kärtchen werden in den **neodisher® CleanTag Holder** eingelegt und an einem Instrumentensieb angebracht. Die Indikator-Kärtchen können dabei als Indikatorpaar gefaltet werden, so dass beim Reinigungsprozess beide Seiten im Halter gleichzeitig getestet werden.

neodisher® CleanTags können auch direkt auf Metallflächen geklebt werden, z. B. an die Wand der RDG-Kammer zur Prüfung des Sprühbilds. In Reinigungsgeräten für Metallcontainer und Transportwagen können sie auch direkt aufgeklebt werden.

Zunächst muss die Validierung des festgelegten Reinigungsprozesses unter Verwendung der **neodisher® CleanTags** erfolgen. Dann können nachfolgend für die Routineüberwachung die **neodisher® CleanTags** zur Kontrolle des Prozesses eingesetzt werden– dabei wird das Ergebnis mit dem aus der Validierung als Referenz verglichen.

Der Indikator muss nicht vollständig abgewaschen sein! Ein übereinstimmendes Ergebnis der visuellen Kontrolle mit der Referenz ist ausschlaggebend. Verbleiben bei nachfolgenden Reinigungsprozessen sichtbar mehr Indikatorrückstände auf den **neodisher® CleanTags**, als auf den Referenz-Indikatoren der Validierung, ist dies der Hinweis für einen fehlerhaften Aufbereitungsprozess.

An jeder Stelle in der RDG-Kammer gibt es unterschiedliche Sprühverhältnisse und damit unter Umständen eine unterschiedlich gute Reinigungswirkung. Werden **neodisher® CleanTags** an verschiedenen Positionen platziert, lassen sich die unterschiedlichen Sprühverhältnisse sichtbar machen.

Es wird empfohlen, Indikatoren im RDG mindestens einmal täglich in jedem verwendeten Programm einzusetzen, um sicherzustellen, dass sich keine Änderungen der Verfahrensparameter ergeben haben.

Bei Instrumenten mit erhöhten Anforderungen (kritisch B) wird empfohlen, die Indikatoren bei jeder Charge einzusetzen, das Testergebnis bei der Chargenfreigabe zu berücksichtigen und zu dokumentieren.* Die **neodisher® CleanTags** können nach dem Einsatz zur Dokumentation aufgeklebt werden.

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- zur Routineüberwachung und Kontrolle des Aufbereitungsprozesses im RDG
- die drei Farben benötigen unterschiedlich starke Sprühstärken und Detergenzien, um abgewaschen zu werden
- einfach im RDG mittels neodisher® CleanTag Holder platzierbar
- selbstklebende Indikatoren, haften auch auf Metallflächen
- Indikatorsubstanzen sind nicht toxisch



- decken Änderungen der Verfahrensparameter und Fehler im Reinigungsprozess auf, können unterschiedlichen Sprühverhältnisse sichtbar machen
- verschiedene Parameter innerhalb des gesamten Prozesses werden überwacht, mehrere unterschiedliche Prüfkörper können entfallen
- Halter aus Kunststoff, zur reproduzierbaren Platzierung des Indikators im RDG für die Prozessüberwachung
- zur Dokumentation nach Gebrauch einfach aufkleben; können zur Prüfung des Sprühbilds an die RDG-Kammerwand oder in Reinigungsgeräten für Metallcontainer und Transportwagen auch direkt aufgebracht werden
- werden von den meisten Reinigungsmitteln aufgelöst oder dispergiert und mit der Waschlauge im Aufbereitungsprozess entfernt

*siehe RKI-KRINKO BfArM Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“, Seite 1269, Checkliste „Chargenbezogene Prüfungen“



DR. WEIGERT
Hygiene mit System



In Sachen Hygiene immer vor Ort – **in Europa und weltweit:**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG
CH • Zug
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.
BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert España
ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS
FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.
HU • Budapest
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
PL • Warszawa
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd
GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

