




DR. WEIGERT

SYSTEMATIC HYGIENE

Medicina

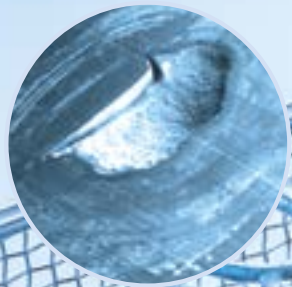

neodisher[®]
PreStop

Inibidor de corrosão para pré-tratamento de instrumentos cirúrgicos.

neodisher® PreStop – o inibidor de corrosão para pré-tratamento de instrumentos cirúrgicos.

neodisher® PreStop

Agente anticorrosivo para pulverização em instrumentos cirúrgicos imediatamente após a utilização na sala de operações

- Para a prevenção específica da corrosão por corrosão por cloretos
- Com pré-limpeza automática já na sala de operações
- Para instrumentos cirúrgicos, incluindo instrumentos MIC
- **neodisher® PreStop** não é uma substância perigosa de acordo com o Regulamento CLP (CE) n.º 1272/2008




12 x garrafa de 0,75 litros

Proteção anticorrosiva segura:

- **neodisher® PreStop** impede a corrosão por cavidades em instrumentos de aço inoxidável, que pode ser causada por resíduos aderentes de sangue ou solução salina fisiológica.

Recomendação de utilização:

- **neodisher® PreStop** aplicar o produto não diluído imediatamente após a cirurgia, molhando completamente os instrumentos cirúrgicos colocados no recipiente de eliminação com o pulverizador de espuma. Mantenha o contentor de resíduos fechado após o uso.
- Os instrumentos tratados com **neodisher® PreStop** podem ser armazenados por até 72 horas.
- Em seguida, enxague cuidadosamente e prepare como de costume.

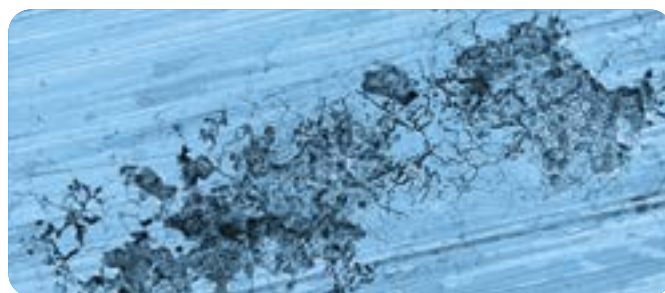

Os danos causados pela corrosão por corrosão por cloretos em aço para instrumentos são irreparáveis.

A nossa **competência** – a sua **vantagem**:

- Previne eficazmente a corrosão por corrosão induzida por cloretos
- Mantém os instrumentos húmidos após a pulverização
- Possui uma pré-limpeza automática já na sala de operações
- Inibe o crescimento de microrganismos nos instrumentos durante o tempo de contacto (bacteriostático)



- Protege o aço dos instrumentos contra danos irreparáveis e garante a preservação do valor dos instrumentos
- Impede que os resíduos cirúrgicos sequem; os instrumentos tratados podem ser armazenados por até 72 horas.
- Facilita a limpeza posterior
- Aumenta a proteção pessoal ao manusear os instrumentos