




DR. WEIGERT
Higiena systemowa

Medycyna

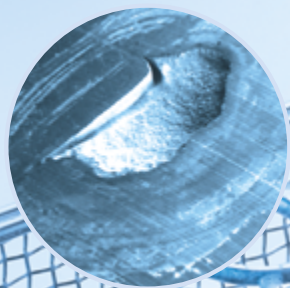

neodisher®
PreStop

Środek hamujący korozję do wstępnej obróbki narzędzi chirurgicznych.

neodisher® PreStop – inhibitor korozji

do wstępnej obróbki narzędzi chirurgicznych.

neodisher® PreStop

Środek hamujący korozję do spryskiwania narzędzi chirurgicznych w salach operacyjnych, bezpośrednio po użyciu

- Do zapobiegania korozji wżerowej spowodowanej przez pozostałości roztworu soli fizjologicznej
- Mycie wstępne już na sali operacyjnej
- Odpowiedni do narzędzi chirurgicznych, w tym małoinwazyjnych
- **neodisher® PreStop** nie jest produktem niebezpiecznym zgodnie z rozporządzeniem CLP (WE) nr 1272/2008.



12x 0,75 L butelka
4562 47




Bezpieczna ochrona przed korozją:

- **neodisher® PreStop** zapobiega korozji wżerowej na narzędziach ze stali nierdzewnej, spowodowanej przez pozostałości krwi lub soli fizjologicznej.

Zalecane użycie:

- **neodisher® PreStop** jest natryskiwany jako produkt nierozcieńczony bezpośrednio po operacji na narzędzia chirurgiczne umieszczone w pojemniku, zapewniając ich pełne zwilżenie. Po spryskaniu narzędzia przechowywać w zakmnietym pojemniku.
- Narzędzia spryskane **neodisher® PreStop** mogą być przechowywane do 72 godzin.
- Następnie należy optukać i przeprowadzić standardową obróbkę.

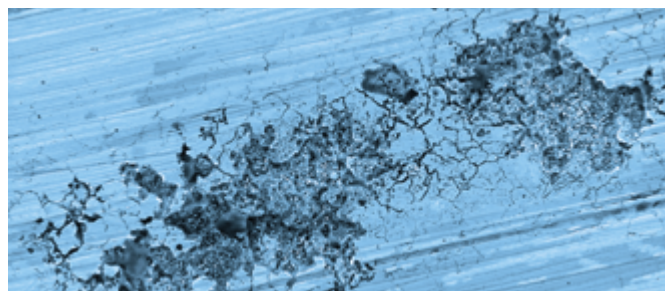

Uszkodzenia spowodowane przez korozję wżerową na narzędziach ze stali nierdzewnej są nieodwracalne.

Nasze **Kompetencje** – Państwa **Korzyść**:

- skutecznie zapobiega korozji wżerowej
- utrzymuje narzędzia w stanie wilgotnym
- umożliwia mycie wstępne już na sali operacyjnej
- hamuje rozwój mikroorganizmów na powierzchni narzędzi (działa bakteriostatycznie)



- chroni narzędzia ze stali nierdzewnej przed nieodwracalnymi uszkodzeniami, zachowując ich wartość
- zapobiega zasychaniu pozostałości operacyjnych; narzędzia mogą być przechowywane do 72 godzin
- znacznie ułatwia późniejszą dalszą obróbkę narzędzi
- poprawia bezpieczeństwo personelu związane z dekontaminacją narzędzi chirurgicznych