



DR. WEIGERT

Hygiëne met systeem

Productinnovatie 2021



**Verder
denken –
voortgang
beleven.**

Ontdek neodisher®
MediClean advanced.

Er is altijd
iemand nodig die het
voortouw neemt om
**nieuwe manieren
te ontdekken!**

Hygiëne met systeem.

Er is nauwelijks een andere werkomgeving die zo gevoelig is voor hygiëne als de medische. Samen met partners uit de industrie en de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) werden de behandelingsprocessen voor medische instrumenten voortdurend verder geperfectioneerd door Dr. Weigert.

Het is niet voor niets dat Dr. Weigert al tientallen jaren marktleider is als het gaat om innovatieve behandelings- en toepassingsprocessen die niet alleen eenvoudig, veilig, economisch en ecologisch zijn, maar ook materiaalvriendelijk en daardoor waardebehoudend.

Eisen in een vroeg stadium herkennen. Daardoor wordt Dr. Weigert gekenmerkt.

De verdere ontwikkeling en optimalisatie van onze producten vinden plaats in nauwe samenwerking met onze klanten, de gebruikers op de CSA en onze onderzoeksafdeling. Het vroegtijdig herkennen van de wensen en speciale eisen van de klant is een van de belangrijkste competenties van de accountmanager.

De nauwe interactie met degenen die betrokken zijn bij het behandelingsproces en hun ervaring vormden de basis voor onze nieuwste innovatie voor de geautomatiseerde behandeling van instrumenten, die de volgende eigenschappen combineert:

- Sterk concentraat met bijzonder sterk reinigingsvermogen bij lage product dosering
- Geeft de instrumenten glans
- Verwijdert doffe aanslag en zorgt daardoor langdurig voor een optimale grip van de instrumenten
- Duurzaamheid dankzij het behoud van hulpbronnen
- Uitstekend verenigbaar met materialen en daardoor materiaalvriendelijk

Ontdek op de volgende pagina's hoe ook u kunt profiteren van de innovatieve kracht van neodisher® MediClean advanced.



Meer
reinigingskracht,
meer glans, meer
uitstraling!



neodisher® MediClean advanced



(de)
Zur maschinellen und manuellen
Reinigung von thermostabilen und
thermolabilen Instrumenten
Flüssigkonzentrat - Nur für gewerbliche
Anwendung!

(en)
For automated and manual cleaning of
thermostable and thermolabile instru-
ments
Liquid concentrate - For professional use only!



(fr)
Pour le lavage mécanique et manuel des
instruments thermostables et thermo-
sensibles
Concentré liquide - Uniquement pour un
usage professionnel

(nl)
Voor machinale en handmatige reiniging
van thermostabiele en thermolabele
instrumenten
Geconcentreerde vloeistof - Voor professioneel
gebruik!



For import addresses
www.drweigert.com



4 029577 156206

5L e

Made in Germany

DR. WEIGERT

Voorsprong creëert veiligheid.

neodisher® MediClean advanced staat voor een nieuwe prestatie standaard in de machinale behandeling van medische instrumenten. Tijdens diverse testen in de praktijk werden uitstekende reinigingsresultaten gedocumenteerd.

Maximale
**hygiëne-
veiligheid.**

Geconcentreerd en efficiënt.

De bijzonder goede reinigingsprestaties van het hoog concentraat zijn door talrijke tests bevestigd.

Stralende
resultaten – zelfs
onder de **micros-
coop.**

Glans tot in het kleinste detail.

De glans van de instrumenten valt niet alleen op het eerste gezicht op. Ook een controle onder de microscoop maakt duidelijk hoe mild het hoog concentraat voor het materiaal is.

**U kunt
het verschil zelfs
voelen.**

NIEUW



Want minder is meer.

Doordat er minder van het product hoeft te worden verbruikt, kan met name de logistiek duurzamer worden gemaakt.

Ja, dat kan:
Verhoogde efficiëntie en **verbeterde duurzaamheid.**

Verhoogde efficiëntie.

Maximale hygiëne bij gelijkblijvende materiaalvriendelijkheid is ook een sterk economisch argument.

In duurzaamheid investeren
loont vanaf de eerste dag.

Geoptimaliseerde workflow.

Dankzij het zeer sterk geconcentreerde reinigingsmiddel kunnen wij het dagelijkse werk voor uw personeel een stuk makkelijker maken. Het personeel wordt ontlast als jerrycans minder vaak hoeven te worden vervangen.



Eenvoudiger te hanteren –
voor een betere persoonlijke bescherming.




Een gevoel waar u enthousiast van wordt.

De praktijktests hebben aangetoond dat doffe afzettingen beter worden verwijderd waardoor op de lange termijn het optimaal aanvoelen van de instrumenten kan worden hersteld en behouden.

Unieke prestaties en glanzende resultaten met neodisher® MediClean advanced.

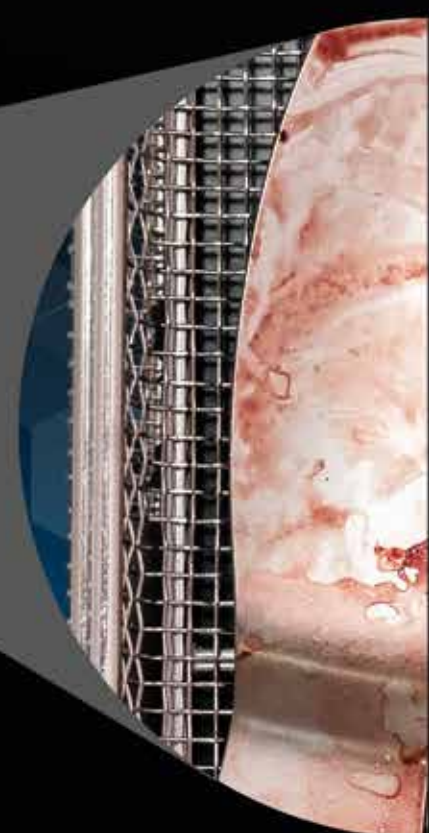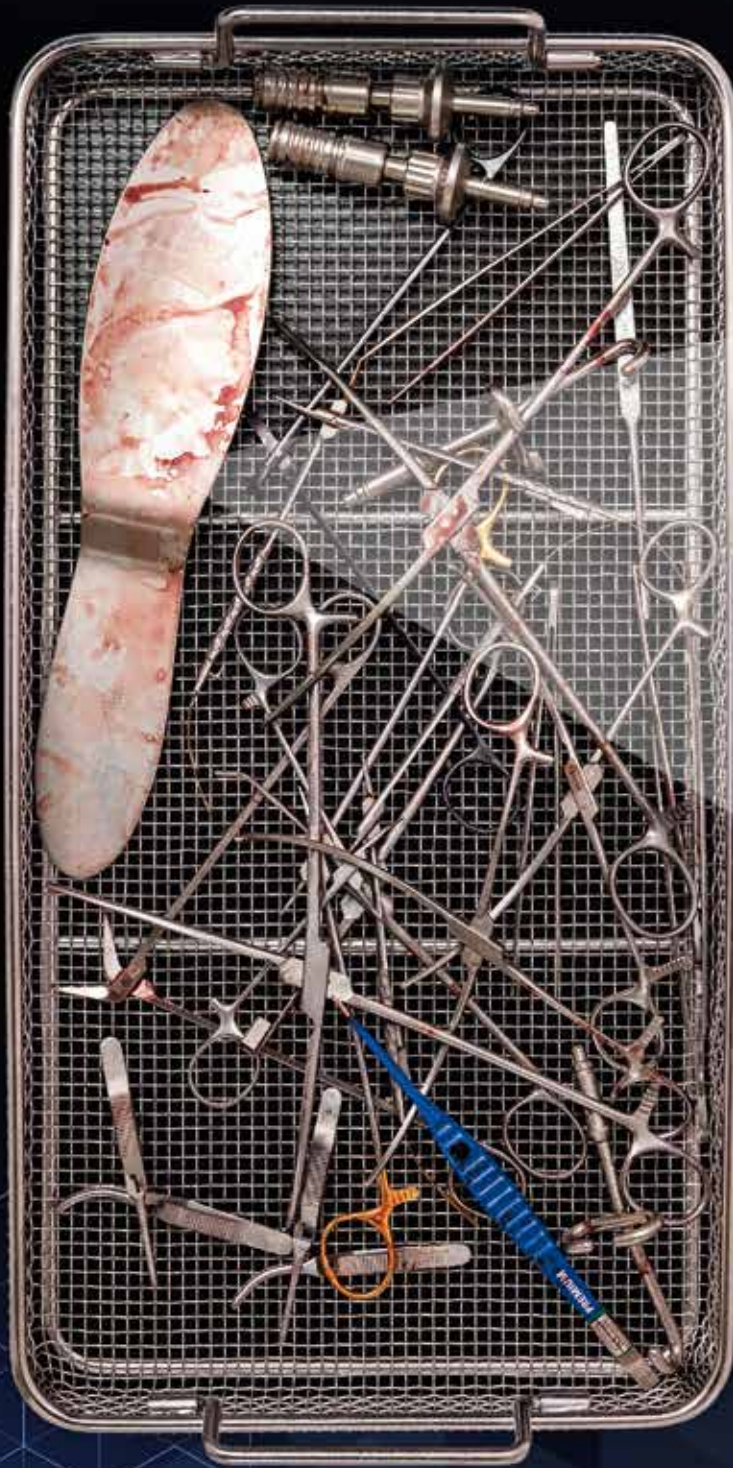

Instrumenten met opgedroogd eiwit- en bloedresten

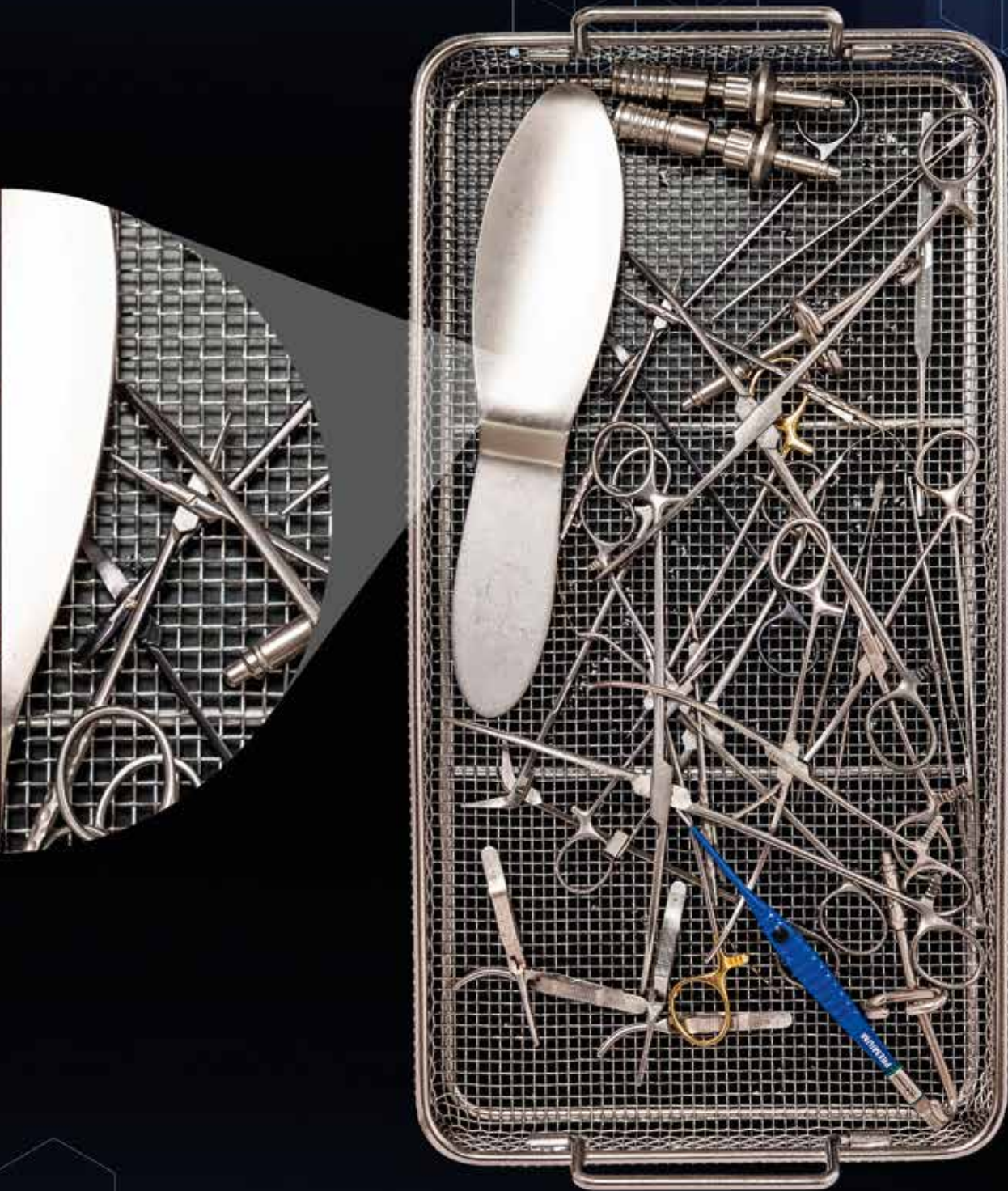

Instrumenten die met **neodisher® MediClean advanced** zijn behandeld

Het meest
waardevolle
perspectief voor onze
**productinnovaties is
de visie uit
de praktijk.**



Wij nemen klantgerichtheid letterlijk!

Pas als de kwaliteit van onze innovaties zich in de praktijk blijvend heeft bewezen, hebben onze productontwikkelaars hun doel bereikt.

Medische instrumenten en accessoires moeten efficiënt en rendabel worden behandeld. Dr. Weigert is specialist in hygiënische oplossingen voor de behandeling van medische producten en is daarom op de hoogte van de verschillende eisen en moeilijkheden die gepaard gaan met de verschillende soorten besmettingen in de afzonderlijke medische gebieden.

De intensieve uitwisseling met alle relevante verantwoordelijken voor de processen en onze jarenlange ervaring dragen bij aan de continue ontwikkeling en optimalisatie van onze producten en processen. Voor elke uitdaging vinden wij voor u de juiste oplossing. Van de behandeling vooraf en de reiniging tot het onderhoud van de instrumenten. Op deze manier kunnen we u eerste klas resultaten en waardebehoud van de materialen garanderen.

Als u nog vragen heeft over de introductie van **neodisher® MediClean advanced** in uw klinische omgeving en over uw individuele voorwaarden, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw **accountmanager**.





“Ik vond de test met **neodisher® MediClean advanced** zeer overtuigend. De instrumenten glanzen en zelfs opgedroogde resten konden met de laagst mogelijke concentratie worden verwijderd.”

Sven Weingarte, CSA, kliniek Magdeburg

Ontdek de
innovatie
 neodisher® MediClean
 advanced.



neodisher® MediClean advanced – de innovatie op het gebied van de behandeling van medische producten.

neodisher® MediClean advanced

Het innovatieve, zeer geconcentreerde reinigingsmiddel combineert uitstekende reinigingsprestaties en maximaliseert tegelijkertijd de resultaten voor een optimale efficiëntie.

- Voor de machinale reiniging van thermostabiele en thermolabele instrumenten, inclusief MIC- en microinstrumenten, tandheelkundige instrumenten, anesthesiehulpmiddelen, containers en andere medisch-technische hulpmiddelen
- Voor de handmatige reiniging van thermostabiele en thermolabele instrumenten in een dompel- of ultrasoundbad
- Geschikt voor de handmatige en machinale reiniging van da Vinci-EndoWrist- en andere instrumenten voor robotgeassisteerde chirurgie



Drum 220 kg
4130 13



Jerrycan 20 l
4130 26



Jerrycan 10 l
4130 30



Jerrycan 5 l
4130 35****



Jerrycan 5 l
4130 33****



6 x flessen 2 l
4130 41

Het succesprincipe:

- Minimale dosering
- Verwijderd doffe aanslag en zorgt daardoor langdurig voor een optimaal houvast van de instrumenten
- Geeft de instrumenten glans
- Vermindering van biofilms werd gecontroleerd en bevestigd op basis van ISO/TS 15883-5:2005

Aanbeveling voor gebruik:

Machinale reiniging van thermostabiele en thermolabele instrumenten

1 - 3 ml/l (0,1 - 0,3%)*,
40 - 60 °C, 5 - 15 min**

Machinale reiniging van containers van geanodiseerd aluminium

1 - 2 ml/l (0,1 - 0,2%)*,
40 - 50 °C, 3 - 5 min**

Machinale reiniging van instrumenten voor robotgeassisteerde chirurgie

2 - 3 ml/l (0,2 - 0,3%)*,
40 - 60 °C, 10 - 30 min***

Handmatige reiniging van thermostabiele en thermolabele instrumenten in een dompel- en ultrasoundbad

1 - 10 ml/l (0,1 - 1%)*,
5 - 30 min**

Handmatige reiniging van instrumenten voor robotgeassisteerde chirurgie in een dompel- en ultrasoundbad

5 - 10 ml/l (0,5 - 1%)*,
5 - 30 min**/**

Onze competentie – Uw voordeel:

- Sterk concentraat
- Effectieve verwijdering van opgedroogd en gedenatureerd bloed, eiwit, vet, slijm, secretie en beendermeel
- Zeer materiaalvriendelijk
- Mogelijkheid om het reinigingsmiddel al vroeg in koud water te doseren (direct na de watertoevoer)



- Maximale resultaten met minimale dosering
- Eersteklas reinigingsprestaties dankzij de unieke formule op basis van alkaliteitsdonoren, tensiden, complexvormers en enzymen
- Geschikt voor instrumenten, lenzen en gebruiksvorwerpen van roestvrij staal (bijv. 1.4301), instrumentenstaal (bijv. 1.4034), titanium, glas, keramiek, herverwerkbare kunststoffen, materialen voor anesthesie-gereedschap en geanodiseerd aluminium
- Schuimarme werkwijze waardoor programma-onderbrekingen worden voorkomen

* De dosering is afhankelijk van de mate van vervuiling

** De inwerk tijden zijn afhankelijk van de waterkwaliteit, de mate van vervuiling en het reinigingsmechanisme

*** Er moet rekening worden gehouden met de aanbevelingen die de fabrikant van het medisch hulpmiddel voor de behandeling van het hulpmiddel heeft gedaan conform de eisen van DIN EN ISO 17664 en de proceduretests

**** Artikel 413033 moet worden gebruikt voor alle machinale bewerkingen, artikel 413035 is daarentegen geschikt voor de Jerrycanconsole van de dispensers voor desinfectiemiddelen zoals neomatik® mediDOS



DR. WEIGERT
Hygiëne met systeem



Overal paraat waar het om hygiëne gaat – **in Europa en wereldwijd:**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG
CH • Zug
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.
BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert España
ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS
FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.
HU • Budapest
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
PL • Warszawa
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd
GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

