

neodisher endo® MED in Kombination mit neoform® wipes RTF - zur Wischreinigung beim bedside cleaning flexibler Endoskope



1. Vor Herstellung des gebrauchsfertigen Einweg-Tuchspendersystems die Hände desinfizieren (z.B. mit weigoman® parfümfrei) und Schutzhandschuhe anziehen.



2. Abnahme des Tuchspenderdeckels durch Öffnen des Originalitätsverschlusses. Anschließend 2,5 L einer 1%igen Anwendungslösung von **neodisher endo® MED** langsam einfüllen.



3. Von der Tuchrollenmitte das erste Vliestuch aus der Rolle ziehen, durch die Spenderdeckelöffnung führen, in die Verjüngung der Öffnung ziehen, abreißen und verwerfen.



- 4. Den Deckel auf den Eimer setzen und die Entnahmeöffnung fest verschließen. Auf dem Tuchspender-System die Ansatzinformationen (Produktname, Charge, Ansatzdatum, Konzentration, verwendbar bis) eintragen. Nach 30 min. sind die Vliestücher vollständig durchtränkt und gebrauchsfähig.
- 5. Zur korrekten Anwendung den Einführungsschlauch des zu reinigenden Endoskops in Richtung des Distalendes sorgfältig mit den getränkten **neoform® wipes** abwischen. Im Anschluss die Kanäle des Endoskops mit Reinigungslösung, z.B. mit einer Anwendungslösung von **neodisher endo® MED**, durchspülen und das Endoskop der weiteren Aufbereitung zuführen. Das gebrauchte Vliestuch entsorgen.
- 6. Das Tuchspender-System nach Entnahme der **neoform® wipes** verschlossen halten.



7. Einwegsystem: Nach Verbrauch oder Ablauf der Standzeit Tücher, eventuelle Produktreste und Spendersystem der Entsorgung zuführen. Die getränkten **neoform® wipes** sind bei sachgemäßem Verschließen des Spender-Systems 28 Tage verwendbar.

neoform® wipes RTF: Das effiziente Tuchspendersystem





neodisher endo® MED: Für die manuelle Vorreinigung flexibler Endoskope

