



## Sichere Aufbereitung von Dentalinstrumenten mit neodisher®

### 1. Vorbereitung:

- Arbeitsschutzmaßnahmen beachten, z. B. Handschuhe tragen
- Füll- und Ätzmaterialien sofort nach Anwendung entfernen, z. B. mit Zellstofftuch
- Kontaminierte sowie nicht verwendete, offen bereitgestellte Instrumente in geeignete Kassetten oder Desinfektionswannen ablegen

### 2. Maschinelle Aufbereitung:

- Instrumente in geeignete Einsatzkörbe und Aufnahmeeinsätze des Reinigungs- und Desinfektionsautomaten einordnen

Reinigungsmittel: **neodisher® MediClean Dental** oder **neodisher® FA Dental** oder **neodisher® MA Dental** (Pulver)

Neutralisationsmittel: **neodisher® Z Dental** oder **neodisher® N Dental**

Nachspülmittel: **neodisher® MediKlar Dental**

Für maschinell aufbereitbare Übertragungsinstrumente: **neodisher® MediClean Dental**, **neodisher® Z Dental** und **neodisher® MediKlar Dental**

### 3. Entnahme der Instrumente: Nasse und feuchte Instrumente umgehend trocknen.

### 4. Kontrolle: Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen Spezialreinigung mit **neodisher® LM 2** im Ultraschallbad.

### 5. Pflege: **neodisher® IP Spray** für Gelenkinstrumente

### 6. Funktionsprüfung

#### Instrumente für invasive Maßnahmen

#### Instrumente für nichtinvasive Maßnahmen

### 7. Verpackung

### 7. ggf. Verpackung

### 8. Dampfsterilisation

### 8. ggf. Dampfsterilisation

### 9. Sterile, saubere Instrumente

### 9. Desinfizierte, saubere Instrumente

### 10. Hygienische Lagerung trocken, sauber, staubgeschützt

