




**DR. WEIGERT**  
Higiéniai Rendszerek

Orvostechnika

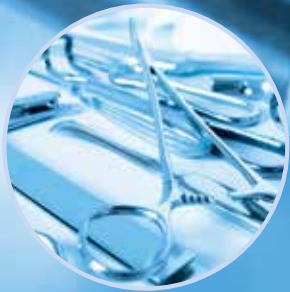

neodisher<sup>®</sup>  
**MediClean**  
**forte**

Hőálló és hőérzékeny orvostechnikai eszközök és műszerek sokoldalú tisztítószer.

# neodisher® MediClean forte – Nr. 1 az orvostechnikai eszközök tisztításában.

## neodisher® MediClean forte

Elsőosztályú, enzimetartalmú, lúgos kémhatású univerzális tisztítószer, amely különösen kíméletes a műszerek alapanyagaihoz.

- Da Vinci EndoWrist-műszerek kézi és gépi tisztításához
- Hőálló és hőérzékeny műszerek kézi és gépi tisztításához



220 kg hordó  
4050 13

20 L kanna  
4050 26

10 L kanna  
4050 30

5 L kanna  
4050 35\*

5 L kanna  
4050 33\*

6x 2 L palack  
4050 42

\* A 405033 számú termék minden fajta gépi tisztítási folyamathoz alkalmazható, a 405035 termék azonban csak a fertőtlenítőszeres számúra kialakított adagolóberendezésekhez tartozó kannakonzolokon történő alkalmazásra alkalmas.

\*\* Az adagolt mennyiség a szennyeződés mértékétől függ.

\*\*\* A tisztító-fertőtlenítő automata gyártójának ajánlásától függően.

### Sokféle alkalmazási terület:

A neodisher® MediClean forte a lúgos és az enzimetartalmú tisztítószeres előnyeit egyesíti. Gyakorlatilag minden tisztításhoz ajánlott:

- Hőálló és hőérzékeny műszerek, ink. MIC- és mikrosebészeti műszerek, flexibilis endoszkópok, aneszteziológiai eszközök, konténerek és egyéb orvostechnikai eszközök tisztításához.
- Da Vinci EndoWrist-műszerek kézi és gépi tisztításához.

### Felhasználási ajánlás:

Hőálló és hőérzékeny műszerek gépi tisztítása	2-10 ml/l**, pl. 40 - 60 °C, 10 perc
Da Vinci EndoWrist-műszerek gépi tisztítása	8 ml/l, 40-55 °C, 10-30 perc***
Hőálló és hőérzékeny műszerek merítéses és ultrahangos tisztítása	5-20 ml/l**, max. 40 °C, 10-30 perc
Da Vinci EndoWrist-műszerek merítéses és ultrahangos tisztítása	20 ml/l, max. 40 °C

A neodisher® MediClean forte különböző in vitro és in vivo tesztekben a patogén prionfehérjékkel kontaminált nemesacél felületeket is megtisztítja (1 %, 55 °C, 10 perc)<sup>1</sup>

## A mi szaktudásunk – az Ön előnye:

- kiváló tisztítóhatás az egyedülálló, alkáliákat, enzimeket és tenzideket kombináló összetételnek köszönhetően
- rendkívüli mértékben kíméletes a műszerek alapanyagaihoz
- az első lúgos-enzimatikus tisztítószer, amely több mint 10 éve piacvezető
- fékezett habzású, optimálisan alkalmazható tisztító-fertőtlenítő automatákban és ultrahangfürdőben egyaránt



- megbízhatóan eltávolítja a beszáradt és denaturált vért, megakadályozza a már levált fehérjék ismételt letapadását
- használható nemesacélhoz, műszeracélhoz, optikákhoz, a szokásos műanyagokhoz valamint aneszteziológiai eszközökhöz
- mindössze egy termék gyakorlatilag az összes tisztítási folyamathoz. Évek óta bevált és kipróbált, a da Vinci EndoWrist-műszerekhez ajánlott készítmény
- kézi előtisztítás esetén az azt követő gépi tisztítás előtt nem szükséges leöblíteni a műszereket

<sup>1</sup>Evaluation of the ability of neodisher MediClean forte to inactivate and/or remove transmissible spongiform encephalopathy (TSE, Prions) agents from surfaces of medical and surgical devices, after direct inoculation of experimentally contaminated surfaces - Service d'Etude des Prions et des Infections Atypiques