



DR. WEIGERT
Hygiëne met Systeem

Endoscopie



Het
**Product-
assortiment.**

Effectieve reiniging van
flexibele endoscopen.

neodisher endo® –
Professionele concepten
voor de meest
**veeleisende
toepassingen.**

Al meer dan 30 jaar

... begeleidt neodisher® de technische ontwikkeling van de instrumentenreiniging en definieert daarbij nieuwe normen.

neodisher® concepten garanderen uitstekende resultaten en een lange levensduur van hoogwaardige materialen.

Met onze speciale technische kennis nemen we zelfs de moeilijkste taken op gevoelige hygiënische terreinen voor onze rekening. Deskundigheid die u kunt vertrouwen.



Professionele concepten voor de meest veeleisende toepassingen.

Sinds de invoering van de eerste waterdichte flexibele endoscopen zijn de technische ontwikkelingen pijlsnel verlopen. Video-endoscopen met hoge resolutie maken een ongekende beeldkwaliteit mogelijk en daarmee ook een efficiënte diagnose. Samen met de ontwikkeling van diagnose naar behandeling is ook de belasting van endoscopen met bloed, slijm en weefsel sterk toegenomen.

Op grond van de structurele eigenschappen van endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten stellen deze hogere eisen aan de reiniging dan veel andere medische producten. Tekortkomingen in de hygiënische reiniging gaan gepaard met infectierisico's voor patiënt en personeel. Een effectieve endoscoopreiniging volgens de strengste kwaliteitsnormen verlaagt het risico van overdracht van ziektekiemen tot een minimum.

Flexibele endoscopen zijn thermisch instabiele instrumenten, wat betekent dat ze door hun beperkte hittebestendigheid niet thermisch gedesinfecteerd of met stoom gesteriliseerd kunnen worden. De reiniging vindt daarom langs chemothermische weg plaats; om die reden worden bijzonder hoge eisen gesteld aan het gebruikte desinfectiemiddel. Een optimale reiniging is wederom een voorwaarde voor een succesvolle desinfectie, omdat achterblijvende verontreinigingen een nadelige invloed hebben op het succes van de desinfectie.

Onze know-how voor kwaliteit in uw procesvoering.

De **neodisher endo®** proceschemicaliën zijn speciaal ontworpen voor gevoelige materialen en staan garant voor een lange levensduur en een effectieve reiniging van de endoscopen.

Voor een effectieve endoscoopreiniging moeten de gebruikte producten voor voorbehandeling, reiniging en desinfectie optimaal op elkaar afgestemd zijn. Alleen zo kunnen ongewenste wisselwerkingen tussen werkzame stoffen, aanslagvorming, materiaalschade en werkingslacunes uitgesloten worden. Daarom adviseren wij het speciaal voor de extra hoge eisen van de endoscoopreiniging ontwikkelde **neodisher endo®** assortiment.



neodisher endo[®] Productassortiment

Behandeling van flexibele endoscopen:	Handmatige voorreiniging	4
	Machinale reiniging	5
	Machinale desinfectie	6
	Handmatige desinfectie	7
Effectieve behandeling met perazijnzuur		8
Handhygiëne		9
Doseertechnische oplossingen		10–11
Gebruiks- en doseerhulpen		12
Systeemservice		13
Gebruiksoverzicht		14–15

Handmatige voorreiniging van flexibele endoscopen

De handmatige voorbehandeling wordt uitgevoerd met reinigers op basis van basen, tensiden en enzymen of gecombineerde reinigende en desinfecterende oplossingen. Tensiden werken emulgerend en dispergerend en maken het mogelijk om niet-wateroplosbare stoffen (bijvoorbeeld vetten) met water te emulgeren en in oplossing te brengen. Enzymen ondersteunen de afbraak van organische resten. Omdat aldehyden kunnen leiden tot fixatie van eiwitten, mogen deze niet voor de voorbehandeling worden gebruikt.

Voorbehandeling	neodisher endo® CLEAN	neodisher endo® DIS active
reinigend	●	●
desinfecterend		●
vloeibaar	●	
pH-neutraal		●
aldehydevrij	●	●
compatibel met aldehyden	●	●

neodisher endo® CLEAN

Reinigingsmiddel voor de machinale en handmatige reiniging van flexibele endoscopen – vloeibaar concentraat – Op basis van licht alkalische stoffen, enzymen en tensiden

Voor de handmatige reiniging van flexibele endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten in het dompel- of ultrasoundbad. Uitstekend reinigingseffect. Leidt tot sterke vermindering van organische resten en voorkomt de herafzetting daarvan. Verwijdert op betrouwbare wijze resten van opgedroogd en gedenatureerd bloed. Zeer veilig voor materiaal; geschikt voor endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten.



Drum	220 kg	4074 13	Jerrycan	5 L	4074 33
Jerrycan	20 L	4074 26	Flessen	6 x 2 L	4074 42
Jerrycan	10 L	4074 30			

neodisher endo® DIS active

Reinigings- en desinfectiemiddel voor de handmatige reiniging van flexibele endoscopen – granulaat – Op basis van perazijnzuur in pH-neutrale configuratie – bactericide, levurocide, beperkt virusdodend (1,0 %, 5 min, 20 °C) bactericide, levurocide, beperkt virusdodend, sporicide (1,0 %, 15 min, 20 °C)

Voor de desinfecterende voorreiniging van flexibele endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten in het dompel- of ultrasoundbad vóór de machinale reiniging. pH-neutraal. Goed reinigingseffect, aantoonbaar niet eiwitfixerend*. Zeer veilig voor materiaal; geschikt voor endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten. Vrij van aldehyde en quataire ammoniumverbindingen (QAV). Opgenomen in de VAH¹-lijst, in de virucidenlijst van de IHO² en in de ÖGHMP³-lijst.




Emmer	8 kg	4077 76	Sachets	25 x 100 g	4077 79
Emmer	4 x 2 kg	4077 81			

Met de teststaafjes neodisher® test strips (Art.Nr. 981320) kan de concentratie van de gebruiksooplossing gecontroleerd worden.

* Publicatie „Reiniger zur Vorbehandlung flexibler Endoskope“ Endo-Praxis 2/2013, 29: 90-92

Machinale reiniging van flexibele endoscopen

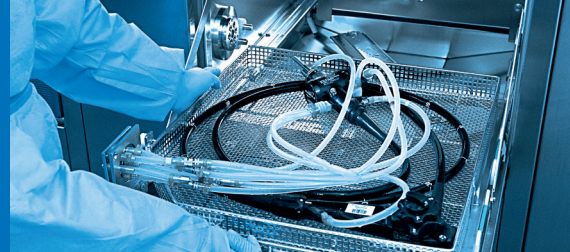

Reiniging	neodisher endo® CLEAN
handmatig	●
machinaal	●
alkalisch	●
enzymatisch	●
bevat tensiden	●

Machinale reiniging verdient de voorkeur boven handmatige reiniging aangezien deze op gestandaardiseerde en gevalideerde wijze binnen een gesloten systeem kan worden uitgevoerd. Andere voordelen zijn de hoge reinigingszekerheid, de aanzienlijke vereenvoudiging van het werk en de betere bescherming van werknemers en materiaal.

neodisher endo® CLEAN

Reinigingsmiddel voor de machinale en handmatige reiniging van flexibele endoscopen – vloeibaar concentraat – Op basis van licht alkalische stoffen, enzymen en tensiden

Voor de reiniging van flexibele endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten in reinigings- en desinfectie-apparaten (RDA-E). Uitstekend reinigingseffect. Voldoet aan de actuele aanbevelingen van het Robert Koch-Instituut (RKI) voor reiniging van medische producten ter vermindering van het risico van overdracht van de nieuwe variant van de Creutzfeldt-Jakob-ziekte (vCJD). Reeds effectief bij lage temperaturen. Laagschuimende formulering – schuimvorming werkt niet nadelig op het reinigend vermogen. Zeer veilig voor materiaal; geschikt voor endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten.

Wanneer neodisher endo® CLEAN ook gebruikt wordt voor handmatige voorreiniging, heeft voorafgaand aan de machinale reiniging de reinigungsoplossing niet te worden afgespoeld.

Drum	220 kg	4074 13	Jerrycan	5 L	4074 33
Jerrycan	20 L	4074 26	Flessen	6 x 2 L	4074 42
Jerrycan	10 L	4074 30			



Controleer voorafgaand aan het gebruik van het product de specifieke gebruiksparameters en informatie over de materiaalvriendelijkheid. De actuele versie van deze informatie kunt u inzien en downloaden in het desbetreffende productblad op www.drweigert.nl in de rubriek Service.



Machinale desinfectie van flexibele endoscopen

Voor de behandeling van flexibele endoscopen moeten in ieder geval bactericide, mycobactericide, fungicide en virusdodende desinfectiemiddelen worden gebruikt.

Aldehydehoudende producten zijn bijzonder geschikt voor desinfectie vanwege hun brede, betrouwbare werking en hun veiligheid voor materiaal.

Desinfectiemiddelen op basis van perazijnzuur onderscheiden zich door hun brede microbiocide werkingsspectrum, hun snelle werking en hun milieuvriendelijke afbraakproducten.

Desinfectie	neodisher endo® SEPT GA	neodisher endo® SEPT PAC	neodisher endo® DIS active
machinaal	●	●	
handmatig			●
aldehydevrij		●	●
bactericide	●	●	●
tuberculocide	●	●	●
mycobactericide	●	●	●
levurocide	●	●	●
fungicide	●	●	●
beperkt virucide (incl. HIV, HBV, HCV)	●	●	●
virusdodend	●	●	●
sporicide (incl. C. difficile)	● *	●	●

* in reinigingsprocessen met neodisher endo® CLEAN

neodisher endo® SEPT GA

Desinfectiemiddelen voor de machinale reiniging van flexibele endoscopen – vloeibaar concentraat – Op basis van glutaraldehyde – bactericide, mycobactericide, fungicide, virusdodend (1 %, 55 °C, 5 min), in processen met neodisher endo® CLEAN effectief tegen sporen (incl. Clostridium difficile)

Voor de desinfectie van flexibele endoscopen in reinigings- en desinfectie-apparaten (ERDA). Gebruiksvriendelijk door de geurarme formulering. Zeer materiaalvriendelijk; geschikt voor endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten. Vrij van formaldehyde en quataire ammoniumverbindingen (QAV).

Opgenomen in de virucidenlijst van de IHO².

De producten neodisher endo® CLEAN en neodisher endo® SEPT GA zijn optimaal op elkaar afgestemd:

Eventuele versleping van het reinigerbad van neodisher endo® CLEAN tijdens de desinfectie heeft geen nadelige invloed op het desinfecterend vermogen van neodisher endo® SEPT GA. Het machinale reinigingsproces met neodisher endo® CLEAN en neodisher endo® SEPT GA voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 15883-4 voor een totale kiemreductie > 9 log-niveaus in het algehele proces.

Drum	200 kg	4071 13	Jerrycan	10 L	4071 30
Jerrycan	20 L	4071 26	Jerrycan	5 L	4071 33



neodisher endo® SEPT PAC

Desinfectiemiddelen voor de machinale reiniging van flexibele endoscopen – vloeibaar concentraat – Op basis van perazijnzuur – bactericide, mycobactericide, fungicide, virusdodend, sporicide (1 %, 25 °C, 10 min of 1 %, 35 °C, 5 min)

Voor de desinfectie van flexibele endoscopen in reinigings- en desinfectie-apparaten (RDG-E). Snelle en complete werking incl. sporen bij 25 °C en bij 35 °C. Geen activator nodig, slechts één component. Geschikt voor endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten. Veiligheid voor materiaal bevestigd over enkele miljoenen cycli. Vrij van aldehyden, formaldehyde en quataire ammoniumverbindingen (QAV). Opgenomen in de virucidenlijst van de IHO².

De producten neodisher endo® CLEAN en neodisher endo® SEPT PAC zijn optimaal op elkaar afgestemd:

Eventuele versleping van het reinigerbad van neodisher endo® CLEAN tijdens de desinfectie heeft geen nadelige invloed op het desinfecterend vermogen van neodisher endo® SEPT PAC. Het machinale reinigingsproces met neodisher endo® CLEAN en neodisher endo® SEPT PAC voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 15883-4 voor een totale kiemreductie > 9 log-niveaus in het algehele proces.

Jerrycan	4,75 L	4075 35
----------	--------	---------



Handmatige desinfectie van flexibele endoscopen



neodisher endo® DIS active

Reinigings- en desinfectiemiddel voor de handmatige reiniging van flexibele endoscopen – granulaat – Op basis van perazijnzuur in pH-neutrale configuratie – bactericide, mycobactericide, fungicide, virusdodend, sporicide (2,0 %, 15 min, 20 °C)


Voor de handmatige desinfectie van flexibele endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten. Zeer veilig voor materiaal; geschikt voor endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten. Aangename geur (ongeparfumeerd), pH-neutraal. Vrij van aldehyde en quataire ammoniumverbindingen (QAV). Opgenomen in de VAH¹-lijst, in de virucidenlijst van de IHO² en in de ÖGHMP³-lijst.



Emmer	8 kg	4077 76
Emmer	4 x 2 kg	4077 81

Sachets	25 x 100 g	4077 79
---------	------------	---------

Met de teststaafjes neodisher® test strips (Art.Nr. 981320) kan de concentratie van de gebruiksooplossing gecontroleerd worden.

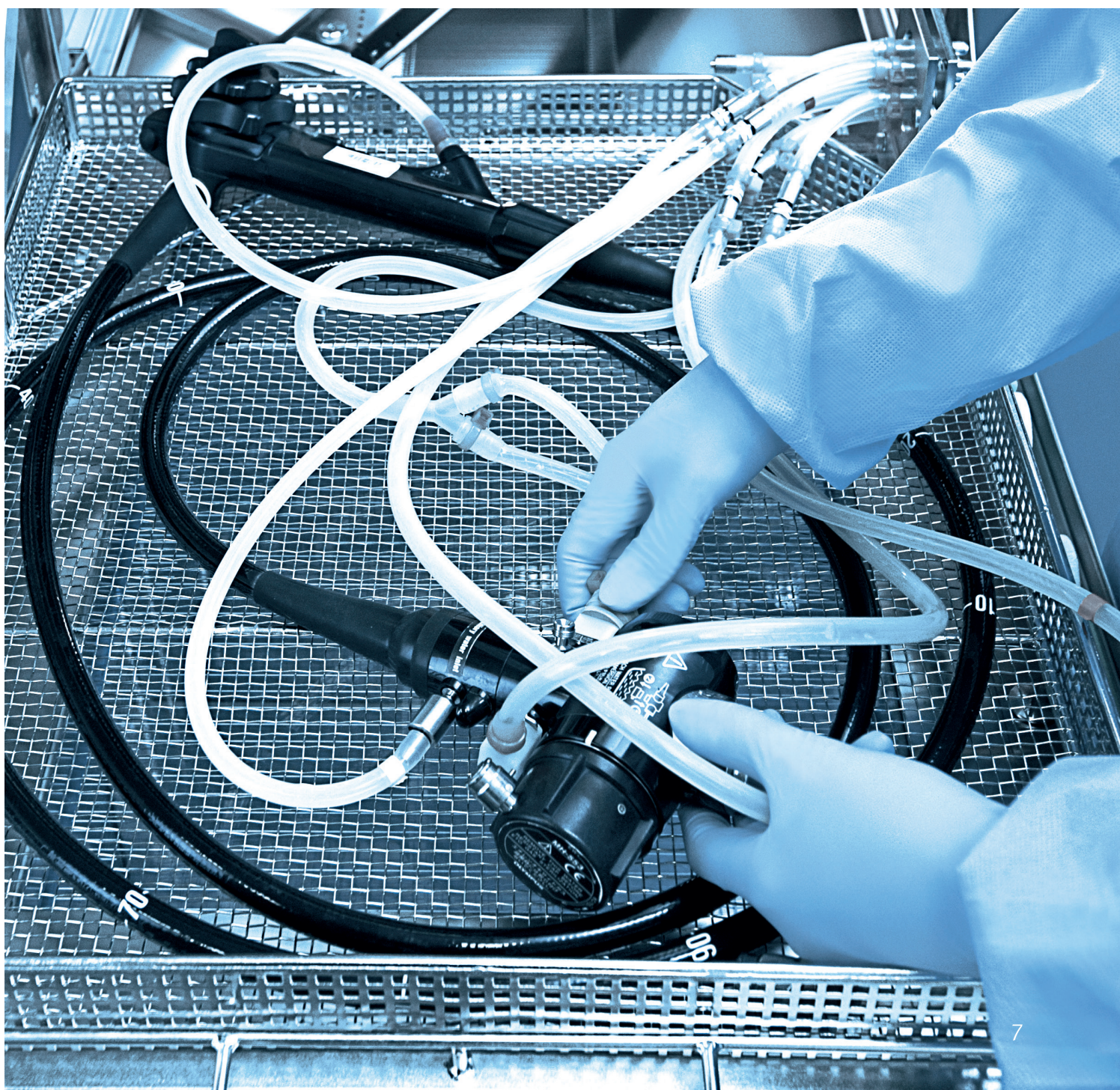



Effectieve reiniging met perazijnzuur.

Desinfecterende reiniging:

In tegenstelling tot de zuur ingestelde perazijnzuurproducten, die uitsluitend worden aanbevolen voor desinfectie na de reiniging, bevat **neodisher endo® DIS active**

- a) meer reinigungsactieve stoffen (tensiden) en
- b) een pH-neutrale configuratie.

Bij **neodisher endo® DIS active** vindt vanwege de speciale formulering derhalve geen fixatie van proteïnen onder invloed van zuur plaats. Het resultaat is een optimaal reinigingseffect met een effectieve desinfecterende werking.*

Voordelen van perazijnzuur

Als desinfecterende stof onderscheidt perazijnzuur zich door zijn brede microbiocide werkingsspectrum en zijn snelle werking. Perazijnzuur levert geen allergische risico's op en ontleedt in milieuvriendelijke afbraakproducten.

Bij de veelal lage pH-waarden (zure omstandigheden) zijn gebruikers echter wel vaak sceptisch over de veiligheid van de kwetsbare materialen in de flexibele endoscopen. Hier is echter geen reden toe, mits het machinale reinigingsproces correct wordt uitgevoerd. De hoge materiaalveiligheid van **neodisher endo® SEPT PAC** is reeds bevestigd in vele miljoenen reinigingscycli.

Dr. Weigert kan als eerste aanbieder van proceschemie bogen op een test met een perazijnzuurproduct volgens de strenge eisen van de ÖGSV („Onderzoek van reinigings- en desinfectieprocessen voor flexibele endoscopen; test met mit **neodisher endo® CLEAN/neodisher endo® SEPT PAC** in combinatie met Belimed WD 430“, Institut für angewandte Hygiene Graz, Nov. 2013).

Alle voordelen van perazijnzuur komen samen in de ontwikkeling van **neodisher endo® DIS active** voor gebruik bij de handmatige reiniging. **neodisher endo® DIS active** is het reinigings- en desinfectiemiddel voor een effectieve handmatige reiniging van flexibele endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten. Het granulaat op basis van perazijnzuur combineert een effectieve desinfectie met een actieve reiniging – en kan gebruikt worden in combinatie met alle andere stoffen! **neodisher endo® DIS active** is pH-neutraal ingesteld, zodat het extra bescherming biedt aan het personeel tijdens de handmatige reiniging. **neodisher endo® DIS active** voldoet aan de voorwaarden van Bijlage 8 „Eisen aan de hygiëne bij de reiniging van flexibele endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten“ van de Aanbeveling van de Commissie voor Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie (KRINKO) van het Robert Koch-Institut (RKI) en van het Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).



Handhygiëne



triformin® HR

Handenreiniger

Milde reiniging ook van zeer vuile handen. Bij uitstek geschikt voor veelvuldig handenwassen. Zeer huidvriendelijk, dermatologisch getest. Dosering door middel van de triformin® dispenser 1.0 en de triformin® dispenser 0.5.



Jerrycan	10 L	3001 30	Flessen	20 x 500 ml	3001 63
Flessen	10 x 1 L	3001 48			

triformin® wash

Waslotion

Voor een verzorgende reiniging van handen en lichaam. Zeer huidvriendelijk, dermatologisch getest. Bijzonder geschikt voor de normale, droge en gevoelige huid. Op basis van natuurlijke plantaardige grondstoffen, met aloë vera en natuurlijke bijenhoning. Bevat geen zeep of loog. Dosering door middel van de triformin® dispenser 1.0 en de triformin® dispenser 0.5.



Jerrycan	5 L	3173 35	Flessen	20 x 500 ml	3173 63
Flessen	10 x 1 L	3173 48			

triformin® care

Huidverzorgingscrème

Voor de verzorging van de handen na het werk en in de pauzes. Zeer huidvriendelijk, dermatologisch getest. Parfumvrij. Dosering vanuit de 500 ml fles met behulp van de triformin® dispenser 0.5.



Flessen	6 x 500 ml	3105 39	Tubes	12 x 100 ml	3105 15
---------	------------	---------	-------	-------------	---------

triformin® protect

Beschermingscrème voor de huid

Bescherm de huid duurzaam tegen uitdroging. Langdurige bescherming en intensieve verzorging. Zeer huidvriendelijk, dermatologisch getest. Parfumvrij. Dosering vanuit de 500 ml fles met behulp van de triformin® dispenser 0.5.



Flessen	6 x 500 ml	3102 39	Tubes	12 x 100 ml	3102 15
---------	------------	---------	-------	-------------	---------



Doseertechnische oplossingen

neodisher® – Onze service voor u:

De juiste concentratie van de reinigings- en desinfectiemiddelen is voorwaarde voor een effectieve reiniging en voor het meest economische gebruik.

Onze neodisher® adviseurs maken u graag wegwijs in de doseertechnische mogelijkheden en ondersteunen u op locatie bij de keuze en implementatie van uw individuele oplossing!

Maak gebruik van onze deskundigheid: De technische kennis van onze neodisher® adviseurs is een sterk argument voor Dr. Weigert.

Effectieve reinigingsprocessen

Intelligente dosering – Procesveiligheid – Gegevensbeheer

Het gebruik van reinigings- en desinfectie-apparaten heeft doorslaggevende voordelen: Enerzijds worden endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten veilig en efficiënt gereinigd terwijl rekening wordt gehouden met de gezondheid van het personeel. Anderzijds zijn deze resultaten door gestandaardiseerde en gevalideerde processen volledig reproduceerbaar. Deze procesveiligheid kan alleen dan gerealiseerd en gedocumenteerd worden wanneer de geschikte reinigings- en desinfectiepreparaten op betrouwbare, nauwkeurige wijze gedoseerd worden.

Innovatieve proceschemicaliën, optimale dosering met moderne doseringssystemen en actuele concepten bieden de grootst mogelijke veiligheid, rentabiliteit en milieuvriendelijkheid.

Onze specialisten ontwerpen, bouwen, installeren en onderhouden installaties van het eenvoudigste doseerstation tot centrale systemen voor meerdere machines en conform de hoogste eisen met betrekking tot gegevensverzameling en -beheer. Wij staan garant voor hoge kwaliteit, functionaliteit en professionaliteit. Samen met u ontwikkelen wij nieuwbouw en verbouwingswerkzaamheden vanaf het eerste begin!

Decentrale doseerapparaten voor desinfectiemiddelen moeten RKI-conform zijn.

Voor de aanmaak van gebruiksklare oplossingen van reinigings- en desinfectiemiddelen uit concentraten voor handmatig gebruik bieden wij bijmengapparaten met een robuuste roestvrij stalen behuizing voor wandmontage, die voldoen aan de RKI-aanbeveling voor decentrale doseerapparaten voor desinfectiemiddelen*. Deze onderscheiden zich door de eenvoudige bediening en beschikken over een automatische uitschakeling in geval van afwezig product en een niveaubewaking.

Meer informatie vindt u op:
www.drweigert.nl > neodisher Medisch > Doseertechniek

Het Doseersysteem

De systeem-componenten


- **weigomatic® Voorreservoir:** PVC, robuust en uitvoerig getest op bestandheid van het materiaal tegen de voor machinale endoscoopreiniging aanbevolen neodisher® reinigings- en desinfectiemiddelen. 1,5 l capaciteit. Geïntegreerde niveaumeting en overloopbeveiliging, verzorgt maximaal vier ERDA's.
- **weigomatic® Concept-doseerpompen:** met toerentalgestuurde aandrijving voor de dosering van neodisher® reinigings- en desinfectiemiddelen
- **weigomatic® Doseerlans:** Roestvrij staal, garandeert volledige lediging van verpakking, aansluiting voorkomt verwarring

weigomatic® endoDOS:

Het **weigomatic® endoDOS-systeem** zorgt voor een absoluut veilig, perfect hygiënisch en economisch doseerproces bij gebruik van een of meer (maximaal vier) reinigings- en desinfectie-apparaten voor endoscopen (ERDA's).

- **volledige lediging**
- **goede bescherming van personeel**
- **continue dosering**

De dosering van de proceschemicaliën vindt plaats via compacte voorreservoirs die zorgen voor een permanente toevoer naar de ERDA's en voorkomen dat er lucht in de doseerleidingen kan worden gezogen. Alleen zo kan een volledige lediging van de verpakking van het reinigings- en desinfectiemiddel zonder onderbrekingen van de dosering worden gegarandeerd. Overgieten van restanten is niet meer nodig. Dit garandeert een optimale veiligheid voor het personeel en een geringe belasting van het milieu. Door het bijvullen van de voorreservoirs via een centraal doseerstation is er bovendien sprake van een duidelijk interface tussen de doseereenheid en de reinigingsapparatuur als medisch product.

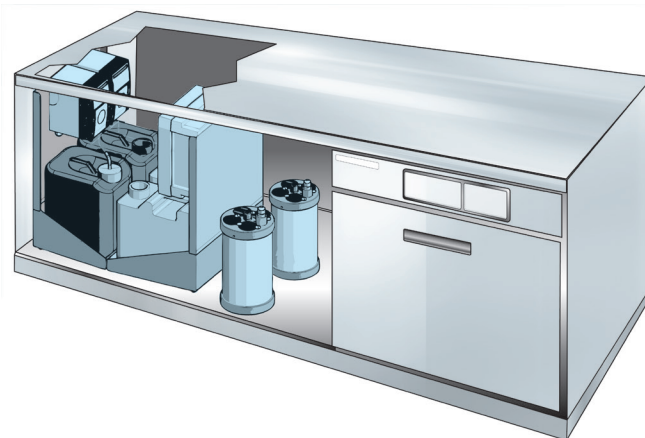



Gebruiks- en doseerhulpen

Doseer- en gebruikshulpmiddelen voor jerrycans en drums

Sleutel van kunststof voor eenvoudig openen van jerrycans en drums
Sleutel van aluminium voor eenvoudig openen van drums

Art.-Nr. 9810 07
Art.-Nr. 9810 05

Jerrycanpomp voor 5 L en 10 L jerrycans (30 ml dosering)
Jerrycanpomp voor 20 L jerrycans (30 ml dosering)

Art.-Nr. 9807 01
Art.-Nr. 9807 00

Aftapkraan voor 5 L en 10 L jerrycans
Aftapkraan voor 20 L jerrycans
Aftapkraan voor drums

Art.-Nr. 9800 04
Art.-Nr. 9800 03
Art.-Nr. 9800 02

Drumtrechter
Handpomp voor drums
Drumwig, voor optimale restleging door schuinplaatsing
Drumkar
Opvangbak voor twee drums

Art.-Nr. 9803 11
Art.-Nr. 9803 08
Art.-Nr. 9803 12
Art.-Nr. 9803 10
Art.-Nr. 0763 90



Doseer- en maatbekers

500 ml maatbeker met schaal
1000 ml maatbeker met schaal

Art.-Nr. 9801 06
Art.-Nr. 9801 00



Persoonlijke beschermende uitrusting

Beschermende handschoenen
Veiligheidsbril
Oogspoelfles

Art.-Nr. 9880 05
Art.-Nr. 9880 06
Art.-Nr. 9880 07



Accessoires

Roerlepel
neodisher® test strips (50 stuks)
3 L-desinfectiebak (met zeefinzet en deksel)
10 L-desinfectiebak (met zeefinzet en deksel)
30 L-desinfectiebak met aftapkraan (met zeefinzet en deksel)

Art.-Nr. 9802 12
Art.-Nr. 9813 20
Art.-Nr. 9611 00
Art.-Nr. 9611 20
Art.-Nr. 9611 12



Doseer- en drukdispensers voor triformin® producten

Doseerdispensers

triformin® dispenser 1.0 gold* voor dosering vanuit 1 L-flessen
triformin® dispenser 0.5 gold* voor dosering vanuit 500 ml-flessen
triformin® dispenser 1.0 silver** voor dosering vanuit 1 L-flessen
triformin® dispenser 0.5 silver** voor dosering vanuit 500 ml-flessen
triformin® dispenser 1.0 basic voor dosering vanuit 1 L-flessen
triformin® dispenser 0.5 basic voor dosering vanuit 500 ml-flessen

Art.-Nr. 9810 51
Art.-Nr. 9810 21
Art.-Nr. 9810 52
Art.-Nr. 9810 22
Art.-Nr. 9810 53
Art.-Nr. 9810 23

Drukdispensers

voor 1 L-flessen triformin® HR en triformin® wash
voor 0,5 L-flessen triformin® HR en triformin® wash
voor 0,5 L-flessen triformin® care en triformin® protect

Art.-Nr. 9802 00
Art.-Nr. 9802 03
Art.-Nr. 9802 02

Wandcontainers

voor 1 L-flessen triformin® wash
voor 0,5 L-flessen triformin® wash, triformin® care en triformin® protect

Art.-Nr. 9810 56
Art.-Nr. 9810 59



* geschikt voor vaatwasser en autoclaaf; roestvrij stalen pomp kan naar voren worden uitgenomen

** geschikt voor vaatwasser en autoclaaf



Systeemservice

Altijd op de hoogte!

Wij bieden naast trainingen, endo-meetings en andere trainings-events ook actuele informatieve materialen aan.

Systeemservice voor permanente service – voor blijvend perfecte resultaten.

Op basis van decennialange ervaring, excellente vakkennis en nauwe samenwerking met de fabrikanten van endoscopen en andere medische producten en van reinigings- en desinfectie-apparaten kunnen wij op iedere vraag snel het juiste antwoord vinden. Wij zijn met alle apparatuur op de markt zeer vertrouwd.

Competentie in één pakket.

Reproduceerbare, gevalideerde reinigings- en desinfectieprocessen zijn een voorwaarde voor een effectieve hygiënestatus - maak gebruik van onze deskundigheid:

De technische kennis van onze **neodisher®** adviseurs is een sterk argument voor Dr. Weigert. Wij adviseren u over alle zaken die te maken hebben met reiniging en desinfectie van medische producten en accessoires.





Gebruiksoverzicht

Overzicht	neodisher endo [®] DIS active	neodisher endo [®] CLEAN	neodisher endo [®] SEPT GA	neodisher endo [®] SEPT PAC
Voorreiniging		●		
desinfecterende voorreiniging	●			
machinale reiniging		●		
machinale desinfectie			●	●
handmatige reiniging		●		
handmatige desinfectie	●			

Voorbehandeling	Materiaalcompatibiliteit	machinale behandeling		
		neodisher endo [®] CLEAN	neodisher endo [®] SEPT GA	neodisher endo [®] SEPT PAC
	neodisher endo [®] CLEAN	●	●	●
	neodisher endo [®] DIS active	●	●	●



Gebruiksoverzicht

machinale behandeling	neodisher endo® CLEAN	neodisher endo® SEPT GA	neodisher endo® SEPT PAC
Reiniging			
alkalisch	●		
enzymatisch	●		
Desinfectie			
aldehydvrij			●
bactericide		●	●
tuberculocide		●	●
mycobactericide		●	●
levurocide		●	●
fungicide		●	●
beperkt virusdodend		●	●
virusdodend		●	●
sporicide (incl. C. difficile)		●*	●

handmatige behandeling	neodisher endo® CLEAN	neodisher endo® DIS active
Reiniging		
alkalisch	●	
enzymatisch	●	
Desinfectie		
aldehydvrij		●
bactericide		●
tuberculocide		●
mycobactericide		●
levurocide		●
fungicide		●
beperkt virusdodend		●
virusdodend		●
sporicide (incl. C. difficile)		●

* in reinigingsprocessen met neodisher endo® CLEAN



DR. WEIGERT
Hygiëne met Systeem

Overal paraat waar
het om hygiëne gaat –
**in Europa en
wereldwijd.**



Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
info@drweigert.de

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11/12 a
1100 Wien
Tel.: +43-1-99460 6275
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG
Baarerstrasse 14
6300 Zug
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14
9404 RK Assen
Tel.: +31-592-31 93 93
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd
Watling Court, Orbital Plaza,
Watling Street, Cannock
WS11 0EL
Tel.: +44-1543 404 633
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdynskie 6A
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
office_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV
Paseo de la Castellana 141,
Planta 8
28046 Madrid
Tel.: +34-91 572 65 77
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy CDG Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út 16
1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
Info@drweigert.hu

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com