



In Sachen Hygiene immer vor Ort – in Europa und weltweit:

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
info@drweigert.de

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11/12 a
1100 Wien
Tel.: +43-1-99460 6275
info@drweigert.at

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3
9405 PT Assen
Tel.: +31-592-31 93 93
info@drweigert.nl

Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út 16
1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
Info@drweigert.hu

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdynskie 6D
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
office_pl@drweigert.com

Dr. Weigert (Schweiz) AG
Baarerstrasse 14
6300 Zug
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert UK Ltd
Newmarket Suite 17
Keys Business Village
Keys Park Road
Cannock, WS12 2HA
Tel.: +44-1543 471 222
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy CDG Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
info@drweigert.fr

Dr. Weigert España
Edificio MB-One
Avda. de Europa, 19/3A
28108 Alcobendas Madrid
Tel.: +34-91 793 21 48
info.spain@drweigert.com



Medizin

neodisher® –
für maximale
**Hygiene-
Sicherheit.**

Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen.

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com



neodisher® SBN plus – Spezialnachspülmittel für Steckbecken.

neodisher® SBN plus

Wirkungsvolles Spezialnachspülmittel zur Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen

- Mit frischem Lindenblütenduft gegen unangenehme Gerüche
- Für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte mit Dampfdesinfektion



200 kg Fass
4792 13

5 L Kanister
4792 35

Anwendungsbereich:

- Zur Kalkabbindung und Nachspülung bei der Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten mit Dampfdesinfektion
- Für eine optimierte, schnelle und fleckenfreie Trocknung
- Für säurebeständige Steckbeckenspüler geeignet
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich der zusätzliche Einsatz von **neodisher® SBR extra**, einem Spezialreiniger für Steckbecken und Urinflaschen

Desinfektion mit heißem Dampf:

- Bei Steckbeckenspülern mit thermischen Verfahren erfolgt die Desinfektion mit einem Heißwasser-Dampfgemisch
- Der Dampferzeuger ist das Herzstück des Spülgerätes und muss vor Verkalkungen geschützt werden, die längere Aufheizzeiten, höheren Stromverbrauch, Überhitzung und damit Zerstörung der Heizspiralen bedeuten können

Unsere Kompetenz – Ihr Vorteil:

- sauer eingestelltes Spezialnachspülmittel auf Basis organischer Säuren
- mit speziellen Enthärtungskomponenten zur wirksamen Wasserhärte-Abbindung
- mit angenehm frischem Lindenblütenduft
- mit Tensiden in schaumarmen Einstellung



- verhindert wirkungsvoll Kalkablagerungen im Dampferzeuger, in der Spülkammer und auf dem Spülgut
- bei allen Wasserhärten einsetzbar
- überdeckt zuverlässig unangenehme Gerüche
- für eine optimierte, schnelle und fleckenfreie Trocknung ohne Kalkablagerung



Auf Säurebeständigkeit von Dosiersystemen und Dampferzeugern achten.
Weitere Produktinformationen und Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktmerkblatt.

neodisher® Reinigung – Härteabbindung & Nachspülung.

neodisher® SBR extra

Materialschonender Reiniger, entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen

- Zur Unterstützung der Reinigung bei besonders starken Verschmutzungen (wie Kalkseifenränder und Rückstände von Cytostatika aus menschlichen Ausscheidungen)
- Für Steckbeckenspüler, die mit einer entsprechenden Dosierpumpe ausgestattet sind



5 L
5 L Kanister
4007 35

neodisher® SBK

Kombiniertes Härteabbinde- und Klarspülmittel auf Basis organischer Säuren

- Zur Vermeidung von Kalkablagerungen im Dampferzeuger, Rohrleitungen und Düsen
- Für eine schnelle und fleckenfreie Trocknung
- Für säurebeständige Steckbeckenspüler geeignet



200 kg Fass
4006 13

5 L Kanister
4006 35

neodisher® SBX

Mildalkalische Flüssigkomponente zur Abbindung der Wasserhärte

- Zur Vermeidung von Kalkablagerungen im Dampferzeuger
- Für alle Steckbeckenspüler geeignet



5 L
5 L Kanister
4015 35

