



DR. WEIGERT
Hygiène avec Système

Médical



La
**gamme des
produits.**

Nettoyage et désinfection des
dispositifs médicaux.

neodisher® –
notre expérience
pour votre
sécurité.

Depuis plus de 30 ans

... neodisher® participe à l'évolution technique dans le domaine du traitement des instruments chirurgicaux et pose de nouveaux jalons.

Les concepts neodisher® garantissent des résultats exceptionnels et la longévité des matériaux haut de gamme.

Grâce à notre savoir-faire spécifique dans les domaines sensibles de l'hygiène, nous sommes en mesure de résoudre même les problèmes les plus complexes. Une compétence à laquelle vous pouvez entièrement faire confiance.

Toutes les compétences d'une seule main.

Des procédés de nettoyage et de désinfection reproductibles et validés sont les conditions indispensables pour une hygiène vraiment sûre. Profitez de nos compétences en la matière : le professionnalisme des conseillers neodisher® est un argument de poids qui plaide en faveur de Dr. Weigert. Nous répondrons à toutes vos questions liées au nettoyage et à la désinfection de dispositifs médicaux et d'accessoires.

Des systèmes de dosage et de commande modernes permettent la saisie des quantités et le contrôle des flux des consommables, la télétransmission de données pour le contrôle des opérations et la documentation des lots dans le cadre du système d'assurance-qualité.

Des produits chimiques innovants, un dosage optimal au moyen des systèmes de dosage modernes weigomatic® et des concepts pertinents vous garantissent un maximum de sécurité, de rentabilité et de respect de l'environnement.

Un système global pour des résultats exceptionnels.

Notre système global est synonyme d'un suivi permanent afin de garantir l'excellence des résultats aussi dans la durée. Grâce à notre expérience de longue date, à notre excellent savoir-faire professionnel et à notre étroite collaboration avec les fabricants de dispositifs médicaux et d'appareils de nettoyage et de désinfection, nous trouvons rapidement la réponse adaptée aux besoins de nos clients. Nous connaissons en détail tous les appareils proposés sur le marché. Nos installations de dosage sont entretenues régulièrement. Nous assurons la formation de votre personnel et créons les conditions requises pour des opérations sûres.

Le conseiller neodisher® est votre interlocuteur pour répondre de façon fiable et professionnelle à toutes les questions relatives au traitement sûr des dispositifs médicaux.



Gamme de produits neodisher®

Dispositifs médicaux et accessoires :	Prétraitement	4
	Nettoyage en machine	5-7
	Désinfection en machine	8
	Neutralisation	9
	Rinçage et entretien	10
	Protection et rénovation	11
	Nettoyage manuel	12
	Désinfection manuelle	13
Endoscopes flexibles :	Prétraitement	14
	Nettoyage en machine	15
	Désinfection en machine	16
	Désinfection manuelle	17
Traitement de lave-bassins et urinaux		18
Traitement de cadres de lit et de tables d'opération		19
Nettoyage et désinfection des surfaces		20
Hygiène des mains		21
Solutions techniques de dosage		22-23
Auxiliaires d'utilisation et systèmes de dosage		24
Service après-vente		25
Conseils d'utilisation		26-27



Dispositifs médicaux et accessoires Prétraitement

Un traitement adapté

... commence par le prétraitement du dispositif médical, si possible, immédiatement après son utilisation, afin d'éviter la formation de dépôts pendant le séchage.

Prétraitement	neodisher® Septo PreClean ZP	neodisher® Septo PreDis ZP	neodisher® Septo Active
nettoyant	●	●	●
désinfectant	●	●	●*
pH neutre			●
sans aldéhyde	●	●	●
compatible avec les aldéhydes		●	●
liquide	●	●	

* convient également pour la désinfection finale des dispositifs médicaux semi-critiques

neodisher® Septo PreClean ZP

Détergent désinfectant – Concentré liquide –

A base d'amines – Bactéricide, levuricide, actif sur virus à enveloppe (1,0 %, 15 min., 20 °C)

Pour le nettoyage et la pré-désinfection en bain de trempage ou à ultrasons avant le traitement en machine. Assure la non-fixation des protéines, même pendant des temps de trempage prolongés de l'instrumentation (nuit ou week-end). Excellente compatibilité avec les dispositifs médicaux. Sans aldéhyde ni composés d'ammonium quarternaires.



Bidon	5 l	4068 35	Flacon	10 x 1 l	4068 45
-------	-----	---------	--------	----------	---------

neodisher® Septo PreDis ZP

Détergent pré-désinfectant – Concentré liquide –

A base des composés d'ammonium quaternaires – Bactéricide, levuricide, actif sur Hépatite B, Hépatite C, VIH

Pour le nettoyage et la pré-désinfection en bain de trempage ou à ultrasons avant le traitement en machine. Assure la non-fixation des protéines. Grande compatibilité matériels. Sans aldéhyde.



Bidon	5 l	4208 35	Flacon	10 x 1 l	4208 45
-------	-----	---------	--------	----------	---------

neodisher® Septo Active

Détergent désinfectant – Granulés –

A base d'acide peracétique – Bactéricide, levuricide, effet virucide limité (1,0 %, 5 min., 20 °C)

Bactéricide, levuricide, effet virucide limité, sporicide (1,0 %, 15 min., 20 °C)

Pour le prétraitement désinfectant dans des bains de trempage ou des bains à ultrasons avant le traitement en machine. pH neutre. Excellent pouvoir nettoyant, ne fixe pas les protéines. Très bonne compatibilité avec le matériel. Odeur agréable. Sans aldéhyde ni composés d'ammonium quaternaires. Listé VAH¹, inscrit dans la liste des virucides de l'IHO², listé ÖGHMP³.



Seau	8 kg	4098 76	Sachets	25 x 100 g	4098 79
Seau	4 x 2 kg	4098 81			

Les bandelettes de test neodisher® test strips (Réf. 981320) permettent de contrôler la concentration de la solution.

Dispositifs médicaux et accessoires Nettoyage en machine



neodisher® 3Clean

Le concept propose la solution idéale pour tous les matériaux et tous les types de salissures grâce à ses 3 procédés et à ses 3 détergents adaptés : neodisher® MediClean forte, neodisher® SeptoClean, neodisher® DuoClean. Les procédés et détergents pouvant être choisis spécifiquement garantissent une propreté sans résidus et des résultats fiables.

Nettoyage	neodisher® MediClean forte	neodisher® SeptoClean	neodisher® DuoClean
alcalin	●	●	●
contient des tensio-actifs	●	●	●
enzymatique	●		
désinfectant		●	
inactivation du prion		●	

neodisher® MediClean forte

**Détergent alcalin universel – Concentré liquide –
Contient des fournisseurs d'alcalinité, enzymes et tensio-actifs**

Préservation du matériel, utilisation polyvalente. Les résidus de sang séché et dénaturé sont éliminés de façon fiable. Évite que des résidus de protéines décollés se déposent à nouveau.



Container	1000 kg	4050 03	Bidon	20 l	4050 26
Container	600 kg	4050 09	Bidon	10 l	4050 30
Fût	220 kg	4050 13	Bidon*	5 l	4050 33
Fût RFID ⁴	220 kg	4050 14	Bidon*	5 l	4050 35
			Flacon	6 x 2 L	4050 42

neodisher® SeptoClean

**Détergent alcalin désinfectant – Concentré liquide –
Bactéricide, levuricide, virucide, inactivation totale du prion**

Le procédé neodisher SeptoClean à 2 niveaux, avec un seul produit chimique, garantit une propreté parfaite et une sécurité hygiénique. Inactivation et élimination des prions**. Large spectre désinfectant et excellente compatibilité avec le matériel. Inscrit dans la liste virucide de l'IHO².



Fût	270 kg	4025 13	Bidon	10 l	4025 30
Fût RFID ⁴	270 kg	4025 14	Bidon	5 l	4025 33
Bidon	25 kg	4025 26			



neodisher® DuoClean

**Détergent alcalin fort intensif – Concentré liquide –
Sans phosphates, silicates et agents oxydants**

Pour le nettoyage intensif en machine d'instruments chirurgicaux en acier inoxydable et d'autres surfaces résistant aux produits alcalins. Pouvoir nettoyant performant contre le sang, les protéines et les résidus tenaces d'opérations. Élimine également d'autres salissures qui adhèrent fortement aux instruments.



Fût	240 kg	4030 13	Bidon	10 l	4030 30
Bidon	20 l	4030 26	Bidon	5 l	4030 33

⁴ Radio Frequency Identification

* neodisher MediClean forte est disponible dans deux bidons différents de 5 litres : l'article 405033 est prévu pour toutes les opérations en machine, l'article 405035 est adapté pour la console du bidon des appareils de dosage de produits désinfectants comme neomatik® medIDOS

** Testé selon la méthode de détermination de J. Bertram, M. Mielke, M. Beeke, K. Lemmer, M. Baier, G. Pauli : Inactivation et élimination du prion lors du traitement de dispositifs médicaux, une contribution pour le contrôle et la déclaration de procédés adaptés, Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 2004 • 47:36–40



Dispositifs médicaux et accessoires

Nettoyage en machine

Nos recommandations

... pour le traitement en machine des instruments de chirurgie, micro-chirurgie et chirurgie mini-invasive, endoscopes rigides, implants, bacs de stérilisation, instruments d'anesthésie, d'inhalation et de soins intensifs, chaussures pour blocs opératoires et biberons

Nettoyage	neodisher® MediClean	neodisher® MediZym	neodisher® FA	neodisher® Alka 300	neodisher® MA	neodisher® AN
alcalin	●		●	●	●	●
contient des tensio-actifs	●	●			●	●
enzymatique	●	●				●
contient du chlore actif				●		
liquide	●	●	●	●		

neodisher® MediClean

Détergent enzymatique, très faiblement alcalin – Concentré liquide –

Excellent pouvoir nettoyant, préservation parfaite des matériaux, obtenue habituellement uniquement avec des produits dont le pH est neutre.



Fût	220 kg	4043 13	Bidon	10 l	4043 30
Bidon	20 l	4043 26	Bidon	5 l	4043 33

neodisher® MediZym

Détergent enzymatique au pH neutre – Concentré liquide –

Nettoyage à base d'enzymes et de composants renforçant l'action nettoyante tout en préservant les matériaux. Élimination des résidus de sang séché et dénaturé.



Container	600 kg	4040 09	Bidon	10 l	4040 30
Fût	220 kg	4040 13	Bidon	5 l	4040 33
Bidon	20 l	4040 26			

neodisher® FA

Détergent alcalin « classique » – Concentré liquide – Sans tensio-actifs ni additifs oxydants

Excellent pouvoir nettoyant ainsi qu'une bonne compatibilité avec le matériel.



Fût	270 kg	4101 13	Bidon	10 l	4101 30
Bidon	25 kg	4101 26	Bidon	5 l	4101 33

neodisher® Alka 300

Détergent alcalin – Concentré liquide – Contient du chlore actif

Pouvoir nettoyant intensif avec un effet de décomposition oxydant pour les résidus organiques coriaces.



Fût	270 kg	3103 13	Bidon	12 kg	3103 30
Bidon	25 kg	3103 26			



Dispositifs médicaux et accessoires

Nettoyage en machine



neodisher® MA

**Détergent alcalin – Poudre –
Sans ajout d'oxydants**

Excellent pouvoir nettoyant ainsi qu'une bonne compatibilité avec le matériel.

Seau 10 kg 4107 76

Flacons 12 x 1 kg 4107 87



neodisher® AN

**Détergent faiblement alcalin – Poudre –
A base d'enzymes protéolytiques**

Spécialement conçu pour le traitement des instruments d'anesthésie. Une très bonne compatibilité avec le matériel.

Seau 10 kg 4104 76



neodisher® OXIVARIO

**Renforceur de nettoyage – Concentré liquide –
A base d'oxygène actif**

Renforceur de nettoyage à effet oxydant pour éliminer des résidus coriaces coagulés de protéines et de tissus humains, spécialement conçu pour les procédés Miele OXIVARIO et OXIVARIO PLUS.

Bidon 5 l 4004 33



neodisher® SystemAct

Composant détergent enzymatique – Ultra-concentré liquide –

Composant détergent enzymatique devant être utilisé conjointement avec le composant détergent faiblement alcalin neodisher® SystemClean. Excellente performance de nettoyage grâce à la combinaison personnalisable des composants alcalin et enzymatique. Haute protection du matériel, haute conservation de l'anodisation. Le dosage s'effectue à partir du système de dosage weigomatic® system ALPHA spécialement conçu pour le dosage des ultra-concentrés.

Bidon RFID⁴ 2 x 5 l 4023 37



neodisher® SystemClean

Composant détergent faiblement alcalin – Ultra-concentré liquide –

Composant détergent faiblement alcalin devant être utilisé conjointement avec le composant détergent enzymatique neodisher® SystemAct. Excellente performance de nettoyage grâce à la combinaison personnalisable individuellement des composants alcalin et enzymatique. Haute protection du matériel, haute conservation de l'anodisation. Le dosage s'effectue à partir du système de dosage weigomatic® system ALPHA spécialement conçu pour le dosage des ultra-concentrés.

Bidon RFID⁴ 2 x 5 l 4024 37





Dispositifs médicaux et accessoires

Désinfection en machine

Nos recommandations

... pour la désinfection chimico-thermique des instruments de chirurgie, microchirurgie et chirurgie mini-invasive, endoscopes rigides, implants, bacs de stérilisation, instruments d'anesthésie, d'inhalation et de soins intensifs, chaussures pour blocs opératoires

Désinfection	neodisher® SeptoClean	neodisher® Septo DN
bactéricide	●	●
tuberculocide		●
mycobactéricide		●
levuricide	●	●
fongicide		●
virucide	●	●
inactivation du prion	●	

neodisher® SeptoClean

Détergent alcalin désinfectant – Concentré liquide – Bactéricide, levuricide, virucide, inactivation du prion

Le procédé neodisher SeptoClean à deux niveaux d'utilisation avec un seul produit chimique garantit une propreté parfaite et une sécurité hygiénique. Efficacité d'inactivation et d'élimination des prions*. Large spectre désinfectant ainsi qu'une compatibilité avec le matériel élevée, parfaitement adapté au traitement simplifié de dispositifs médicaux thermolabiles. Inscrit dans la liste virucide de l'IHO².



Fût	270 kg	4025 13	Bidon	10 l	4025 30
Fût RFID ⁴	270 kg	4025 14	Bidon	5 l	4025 33
Bidon	25 kg	4025 26			

neodisher® Septo DN

Désinfectant – Concentré liquide – Bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide

Très faible odeur obtenue par la composition spéciale des principes actifs. Moindre risque d'inhalation qu'avec les désinfectants usuels ayant une teneur plus élevée en glutaraldéhyde. Inscrit dans la liste virucide de l'IHO².



Fût	200 kg	4010 13	Bidon	5 l	4010 33
Bidon	20 l	4010 26			

Dispositifs médicaux et accessoires Neutralisation



Nos recommandations

... pour la neutralisation de résidus alcalins lors du traitement en machine des instruments chirurgicaux, instruments d'anesthésie, conteneurs, biberons, chaussures pour blocs opératoires et autres instruments médico-techniques

Neutralisation	neodisher® N	neodisher® Z
acide	●	●
sans tensio-actifs	●	●
sans phosphates		●
matériaux sensibles		●

neodisher® N

Agent de neutralisation acide – Concentré liquide – A base d'acide phosphorique. Sans tensio-actifs

Pour neutraliser des résidus alcalins résistants et pour éliminer du calcaire et d'autres résidus solubles dans l'acide lors du traitement en machine.



Container	1000 kg	4201 03	Bidon	12 kg	4201 30
Fût	290 kg	4201 13	Bidon	5 l	4201 33
Bidon	25 kg	4201 26	Flacons	12 x 1 l	4201 87

neodisher® Z

Agent de neutralisation acide – Concentré liquide – A base d'acides organiques. Sans tensio-actifs ni phosphates

Pour neutraliser des résidus alcalins résistants au traitement en machine.



Fût	240 kg	4202 13	Bidon	5 l	4202 33
Bidon	20 l	4202 26	Flacons	12 x 1 l	4202 87
Bidon	10 l	4202 30			



Dispositifs médicaux et accessoires

Rinçage et entretien

neodisher® MediKlar

Liquide de rinçage – Concentré liquide –

Pour le séchage rapide et sans taches lors du traitement en machine d'instruments chirurgicaux, d'instruments oculaires, d'instruments d'anesthésie, des conteneurs à instruments, des endoscopes flexibles et d'implants ainsi que des biberons. Réduit le temps de séchage de façon significative.

Fût	200 kg	4045 13	Bidon	10 l	4045 30
Fût RFID ⁴	200 kg	4045 14	Bidon	5 l	4045 33
Bidon	20 l	4045 26			



neodisher® MediKlar special

Liquide de rinçage – Concentré liquide –

Pour le séchage rapide et sans taches lors du traitement en machine d'instruments chirurgicaux, d'instruments oculaires, d'instruments d'anesthésie, des conteneurs à instruments et d'implants ainsi que des biberons. Neutralise les résidus alcalins résistants et réduit la formation de taches lors de l'utilisation d'eau adoucie pour le rinçage.

Fût	200 kg	4073 13	Bidon	5 l	4073 33
Fût RFID ⁴	200 kg	4073 14	Flacons	12 x 1 l	4073 49
Bidon	20 kg	4073 26			



neodisher® SystemRinse

Liquide de rinçage – Concentré liquide –

Pour un séchage rapide et sans traces lors du le traitement en machine de dispositifs médicaux tels que les instruments chirurgicaux y compris ceux de chirurgie mini-invasive et les micro-instruments, ustensiles d'anesthésie, conteneurs et autres instruments médicaux. Réduit considérablement le temps de séchage. Le dosage s'effectue à partir du système de dosage weigomatic® system ALPHA spécialement conçu pour le dosage des ultra-concentrés.

Bidon RFID ⁴	2 x 5 l	4045 37
-------------------------	---------	---------



neodisher® IP Konz

Produit d'entretien pour instruments – Concentré liquide – A base d'émulsifiants et d'huile blanche médicale

Pour une utilisation en dernier cycle de rinçage lors d'un traitement en machine. N'a aucune influence négative sur la stérilisation à vapeur. Ne présente pas de risque toxicologique.

Bidon	5 l	4306 33
-------	-----	---------



neodisher® IP Spray

Produit d'entretien pour instruments – Spray – A base d'huile blanche médicale

Pour l'entretien manuel ciblé d'instruments à articulation après un traitement en machine. N'occasionne aucune incrustation, n'a aucune influence sur la stérilisation à vapeur ou la stérilisation à l'air chaud. Ne présente pas de risque toxicologique.

Bombe aérosol	12 x 1 kg	4304 90
---------------	-----------	---------



Dispositifs médicaux et accessoires

Protection et rénovation



neodisher® PreStop Nouveau

Inhibiteur de corrosion avec un pouvoir de détergence automatique – Mousse à pulvériser –

Agent anticorrosif à pulvériser directement sur les instruments chirurgicaux après leur utilisation en salle d'opération ou après l'étape de pré-désinfection.

Empêche les piqûres de corrosion sur les instruments en acier inoxydable, pouvant être provoquées par des résidus de sang ou de solution de chlorure de sodium. Facilite le nettoyage ultérieur. Pour les instruments chirurgicaux dont les instruments destinés à la microchirurgie.



Flacons 12 x 0,75 l 4086 47

neodisher® IR

Nettoyant de rénovation acide – Concentré liquide –

Pour la rénovation d'instruments chirurgicaux en acier inoxydable en bain de trempage et en bain à ultrasons. Pour éliminer les taches (coloration), les minces couches de rouille et la rouille erratique. Lire la fiche technique avant toute utilisation.



Bidon 12 kg 4204 30

Flacons 12 x 1 l 4204 49





Dispositifs médicaux et accessoires Nettoyage manuel

Nos recommandations

... pour le traitement manuel des instruments de chirurgie, microchirurgie et chirurgie mini-invasive, endoscopes rigides, implants, bacs de stérilisation, instruments d'anesthésie, d'inhalation et de soins intensifs

Nettoyage	neodisher® MediClean forte	neodisher® MultiZym	neodisher® LM 2	neodisher® MediClean
manuel	●	●	●	●
en machine	●			●
faiblement alcalin	●*		●	●
contient des tensio-actifs	●	●	●	●
enzymatique	●	●		●

neodisher® MediClean forte

**Détergent alcalin universel – Concentré liquide –
Contient des fournisseurs d'alcalinité, enzymes et tensio-actifs**

Préservation des matériaux, utilisation polyvalente. Les résidus de sang séché et dénaturé sont éliminés de façon fiable. Évite que les résidus de protéines décollés se déposent à nouveau.



Container	1000 kg	4050 03	Bidon	20 l	4050 26
Container	600 kg	4050 09	Bidon	10 l	4050 30
Fût	220 kg	4050 13	Bidon**	5 l	4050 33
Fût RFID ⁴	220 kg	4050 14	Bidon**	5 l	4050 35
			Flacon	6 x 2 L	4050 42

neodisher® MultiZym

**Détergent multi-enzymatique – Concentré liquide –
Sans acide borique ni borates, sans parfum ni colorants**

Excellentes performances de nettoyage grâce à la formule multi-enzymatique. Nettoyage actif sans résidus, évite que les résidus de protéines se déposent de nouveau. Élimine les dépôts biologiques. Compatibilité avec le matériel. pH neutre.



Bidon	5 l	4087 35	Flacons	10 x 1 l	4087 45
-------	-----	---------	---------	----------	---------

neodisher® LM 2

Détergent faiblement alcalin – Concentré liquide –

Pour le nettoyage d'instruments chirurgicaux dans des bains de trempage et à ultrasons. Peu moussant.



Bidon	20 kg	4403 26	Flacons	10 x 1 l	4403 45
Bidon	10 l	4403 30			

neodisher® MediClean

Détergent très faiblement alcalin et enzymatique – Concentré liquide –

Excellentes performances de nettoyage, tout en préservant les matériaux, ce qui n'est habituellement possible qu'avec des produits au pH neutre.



Fût	220 kg	4043 13	Bidon	10 l	4043 30
Bidon	20 l	4043 26	Bidon	5 l	4043 33

Dispositifs médicaux et accessoires

Désinfection manuelle



Nos recommandations

... pour la désinfection manuelle d'instruments thermostables et thermolabiles

Désinfection	neodisher® Septo Active*	neodisher® Septo Fin*
sans aldéhyde	●	
bactéricide	●	●
tuberculocide	●	●
mycobactéricide	●	●
levuricide	●	●
fongicide	●	●
effet virucide limité (y compris VIH, HBV, HCV)	●	●
virucide	●	●
sporicide / <i>C. difficile</i>	●	●
liquide		●

* convient également pour la désinfection finale des dispositifs médicaux semi-critiques

neodisher® Septo Active

Détergent désinfectant – Granulés –

A base d'acide peracétique – Bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, sporicide (2,0 %, 15 min., 20 °C)

Pour la désinfection manuelle d'instruments thermostables et thermolabiles et pour le nettoyage désinfectant manuel dans des bains de trempage ou à ultrasons. Sans aldéhyde et composés d'ammonium quaternaires. Listé VAH¹, inscrit dans la liste des virucides de l'IHO², listé ÖGHMP³.

Seau	8 kg	4098 76	Sachets	25 x 100 g	4098 79
Seau	4 x 2 kg	4098 81			

Les bandelettes de test neodisher® test strips (Réf. 981320) permettent de contrôler la concentration de la solution.



neodisher® Septo Fin

Désinfectant – Concentré liquide –

A base d'aldéhydes – Bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide, sporicide (C. difficile) (5,0%, 60 min, 20°C)

Pour une utilisation dans des bains de trempage. Sans formaldéhyde ni glyoxal. Très bonne compatibilité avec le matériel. Listé VAH¹, inscrit dans la liste des virucides de l'IHO², listé ÖGHMP³.

Bidon	5 l	4207 35	Flacons	6 x 2 l	4207 42
-------	-----	---------	---------	---------	---------



Endoscopes flexibles Prétraitement

Le prétraitement manuel

... est effectué avec des détergents ou des solutions nettoyantes et désinfectantes combinées. Les tensio-actifs permettent d'émulsifier dans l'eau des substances non solubles dans l'eau (par ex. des graisses) et de les transférer dans la solution. Les enzymes contribuent à l'élimination des résidus organiques.

Prétraitement	neodisher endo® CLEAN	neodisher endo® MED	neodisher endo® DIS active
nettoyant	●	●	●
désinfectant		●	●*
pH neutre		●	●
compatible avec les aldéhydes	●	●	●
liquide	●	●	

* convient également pour la désinfection finale des dispositifs médicaux semi-critiques

neodisher endo® CLEAN

Détergent pour le traitement en machine et manuel des endoscopes flexibles – Concentré liquide – A base des fournisseurs d'alcalinité, d'enzymes et de tensio-actifs

Pour le nettoyage manuel des endoscopes flexibles et du matériel endoscopique dans des bains de trempage ou des bains à ultrasons. Excellent pouvoir nettoyant. Provoque un net appauvrissement en résidus organiques et empêche qu'ils se déposent à nouveau. Élimine les résidus de sang séché et dénaturé de façon fiable. Très bonne compatibilité avec le matériel ; adapté pour les endoscopes de tous les fabricants principaux.



Fût	220 kg	4074 13	Bidon	10 l	4074 30
Fût RFID ⁴	220 kg	4074 14	Bidon	5 l	4074 33
Bidon	20 l	4074 26	Flacons	6 x 2 l	4074 42

neodisher endo® MED

Détergent désinfectant pour le prétraitement manuel des endoscopes flexibles – Concentré liquide – A base des composés d'ammonium quaternaires – Bactéricide, levuricide, effet virucide limité (1,0 %, 15 min, 20 °C)

Pour le prétraitement désinfectant des endoscopes flexibles et du matériel endoscopique dans des bains de trempage ou des bains à ultrasons avant le traitement en machine. Très bon pouvoir nettoyant, ne fixe pas les protéines. Excellente compatibilité avec le matériel. Sans aldéhyde ni alkylamines. Compatible avec des désinfectants contenant des aldéhydes ou de l'acide peracétique. Listé VAH¹ et inscrit dans la liste des virucides de l'IHO².



Bidon	5 l	4210 35	Flacons	10 x 1 l	4210 45
-------	-----	---------	---------	----------	---------

neodisher endo® DIS active

Détergent désinfectant pour le traitement manuel des endoscopes flexibles – Granulés – A base d'acide peracétique – Bactéricide, levuricide, effet virucide limité (1,0 %, 5 min., 20 °C) Bactéricide, levuricide, effet virucide limité, sporicide (1,0 %, 15 min., 20 °C)

Pour le prétraitement désinfectant des endoscopes flexibles et du matériel endoscopique dans des bains de trempage ou des bains à ultrasons avant le traitement en machine. pH neutre. Bon pouvoir nettoyant, sans fixer les protéines**. Très bonne compatibilité avec le matériel ; adapté pour les endoscopes de tous les fabricants principaux. Sans aldéhyde ni composés d'ammonium quaternaires. Listé VAH¹, inscrit dans la liste des virucides de l'IHO², listé ÖGHMP³.



Seau	8 kg	4077 76	Sachets	25 x 100 g	4077 79
Seau	4 x 2 kg	4077 81			

Les bandelettes de test neodisher® test strips (N° d'article 981320) permettent de contrôler la concentration de la solution.

Endoscopes flexibles Nettoyage en machine



Le traitement en machine

... est à préférer au traitement manuel étant donné qu'il est effectué en circuit fermé, standardisé et qu'il peut être validé. Outre la sécurité élevée du traitement, les autres avantages sont les suivants : un travail nettement plus facile et une bonne protection du personnel et des matériaux.

Nettoyage	neodisher endo® CLEAN
manuel	●
en machine	●
alcalin	●
enzymatique	●
contient des tensio-actifs	●

neodisher endo® CLEAN

Détergent pour le traitement en machine et manuel des endoscopes flexibles – Concentré liquide – A base des fournisseurs d'alcalinité, d'enzymes et de tensio-actifs

Pour le nettoyage d'endoscopes flexibles et de matériel endoscopique dans des laveurs-désinfecteurs. Excellent pouvoir nettoyant. Répond aux exigences actuelles de l'Institut Robert Koch (RKI) pour le traitement de dispositifs médicaux pour minimiser les risques de transmission de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt Jakob (vCJK). Efficace même à basses températures. Aucun effet négatif sur les performances de nettoyage en raison de la faible formation de mousse. Préserve parfaitement les matériaux ; convient aux endoscopes de tous les principaux fabricants.

Si vous utilisez également neodisher endo® CLEAN pour le prétraitement manuel, vous n'aurez pas besoin de rincer la solution détergente avant l'étape du traitement en machine.



Fût	220 kg	4074 13	Bidon	10 l	4074 30
Fût RFID ⁴	220 kg	4074 14	Bidon	5 l	4074 33
Bidon	20 l	4074 26	Flacons	6 x 2 l	4074 42



Endoscopes flexibles Désinfection en machine

Endoscopes flexibles

... ils devraient être traités au minimum avec des produits désinfectants bactéricides, mycobactéricides, fongicides et virucides. Les produits aldéhydiques sont particulièrement adaptés pour la désinfection grâce à leur excellente efficacité et à leur excellente compatibilité avec le matériel. Les produits désinfectants à base d'acide peracétique sauront vous convaincre par leur large spectre désinfectant, leur efficacité rapide et des résidus de décomposition respectueux de l'environnement.

Désinfection	neodisher endo® SEPT GA*	neodisher endo® SEPT PAC*	neodisher endo® DIS active*
en machine	●	●	
manuel			●
sans aldéhyde		●	●
bactéricide	●	●	●
tuberculocide	●	●	●
mycobactéricide	●	●	●
levuricide	●	●	●
fongicide	●	●	●
effet virucide limité (y compris VIH, HBV, HCV)	●	●	●
virucide	●	●	●
sporicide (y compris <i>C. difficile</i>)	●**	●	●

* convient également pour la désinfection finale des dispositifs médicaux semi-critiques

** efficace contre les spores de *Clostridium difficile* dans le cadre du procédé de traitement avec neodisher endo® CLEAN

neodisher endo® SEPT GA

Désinfectant pour le traitement en machine des endoscopes flexibles – Concentré liquide – A base de glutaraldéhyde – Bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide. Dans le procédé avec neodisher endo® CLEAN, efficace contre les spores (y compris *Clostridium difficile*)

Pour la désinfection d'endoscopes flexibles dans des laveurs-désinfecteurs. Particulièrement agréable à utiliser grâce à sa formule à faible odeur. Très bonne compatibilité avec le matériel ; adapté pour les endoscopes de tous les principaux fabricants. Sans formaldéhyde ni composés d'ammonium quaternaires. Inscrit dans la liste virucide de l'IHO². Les produits **neodisher endo® CLEAN** et **neodisher endo® SEPT GA** s'accordent de façon optimale : la présence de traces du détergent neodisher endo® CLEAN dans le cycle de désinfection n'affecte pas les performances du désinfectant neodisher endo® SEPT GA. Le procédé de traitement en machine avec neodisher endo® CLEAN et neodisher endo® SEPT GA répond aux exigences de la norme DIN EN ISO 15883-4 pour une réduction totale des germes > 9 log lors du procédé global.

Fût	200 kg	4071 13	Bidon	10 l	4071 30
Fût RFID ⁴	200 kg	4071 14	Bidon	5 l	4071 33
Bidon	20 l	4071 26			



neodisher endo® SEPT PAC

Désinfectant pour le traitement en machine des endoscopes flexibles – Concentré liquide – A base d'acide peracétique – Bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, sporicide

Pour la désinfection d'endoscopes flexibles en laveurs-désinfecteurs. Efficacité rapide et large, y compris sporicide à 25 °C et 35 °C. Pas besoin d'activateur, un seul composant. Convient aux endoscopes de tous les principaux fabricants. Compatibilité avec le matériel confirmée pour des millions de cycles. Sans aldéhyde ni composés d'ammonium quaternaires. Inscrit dans la liste virucide de l'IHO². Les produits **neodisher endo® CLEAN** et **neodisher endo® SEPT PAC** s'accordent entre eux de façon optimale : la présence de traces du détergent neodisher endo® CLEAN dans le cycle de désinfection n'affecte pas les performances du désinfectant neodisher endo® SEPT PAC. Le procédé de traitement en machine avec neodisher endo® CLEAN et neodisher endo® SEPT PAC répond aux exigences de la norme DIN EN ISO 15883-4 pour une réduction totale des germes > 9 log lors du procédé global.

Bidon	4,75 l	4075 35
-------	--------	---------



Endoscopes flexibles Désinfection manuelle



neodisher endo® DIS active

Détergent désinfectant pour le traitement manuel des endoscopes flexibles – Granulés –
A base d'acide peracétique – Bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, sporicide (2,0 %, 15 min., 20 °C)

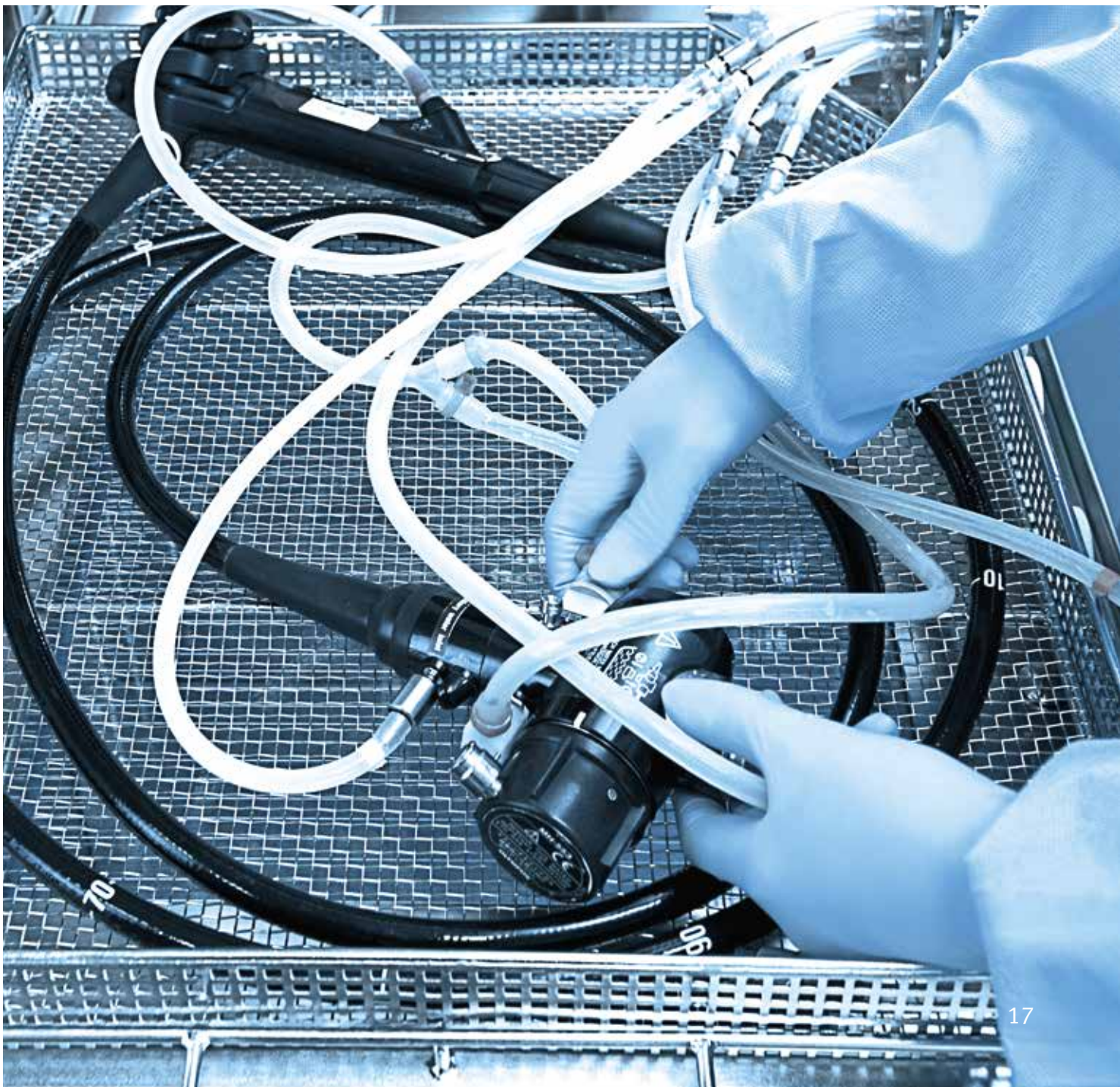
Pour la désinfection manuelle des endoscopes flexibles et du matériel endoscopique.

Très bonne compatibilité avec le matériel ; convient aux endoscopes de tous les principaux fabricants. Odeur agréable (sans parfum), pH neutre. Sans aldéhyde ni composés d'ammonium quaternaires. Listé VAH¹, inscrit dans la liste des virucides de l'IHO², listé ÖGHMP³.



Seau	8 kg	4077 76	Sachets	25 x 100 g	4077 79
Seau	4 x 2 kg	4077 81			

Les bandelettes de test neodisher® test strips (Réf. 981320) permettent de contrôler la concentration de la solution.





Traitement de bassins et d'urinaux

Anticalcaires

... pour éviter la formation de dépôts de calcaire dans le générateur de vapeur, les conduites et buses qui entraîneraient des durées de chauffe plus longues, une consommation accrue d'énergie, une surchauffe et la destruction des serpentins chauffants.

Aperçu	neodisher® SBR extra	neodisher® SBN plus	neodisher® SBK	neodisher® SBX
nettoyage	●			
action anticalcaire		●	●	●
rinçage		●	●	●
effet antimousse			●	●
toutes les duretés de l'eau	●	●	●	●

neodisher® SBR extra

Détergent – Concentré liquide –

Élimine même les salissures tenaces, comme les résidus de savon calcaire et de produits cytostatiques provenant de déjections humaines. Adapté aux lave-bassins équipés d'une pompe de dosage adaptée.

Bidon 5 l 4007 33



neodisher® SBN plus

Produit combiné anticalcaire et rinçage – Concentré liquide – A base d'acides organiques et de tensio-actifs

Empêche efficacement les dépôts de calcaire dans le générateur de vapeur, les conduites et les buses, même avec de l'eau très calcaire. Pour un séchage optimisé, rapide et sans taches. Adapté à tous les lave-bassins résistants aux acides. Odeur fraîche et agréable.

Bidon 5 l 4792 35



neodisher® SBK

Produit combiné anticalcaire et rinçage – Concentré liquide – A base d'acides organiques

Évite efficacement les dépôts de calcaire dans le générateur de vapeur, les conduites et les buses, même avec de l'eau très calcaire. Contribue à un séchage rapide et sans taches. Effet antimousse. Adapté aux lave-bassins résistants aux acides.

Fût 200 kg 4006 13

Bidon 5 l 4006 35



neodisher® SBX

Produit anticalcaire – Concentré liquide –

Pour éviter les dépôts de calcaire dans le générateur de vapeur. Adapté à tous les lave-bassins.

Bidon 5 l 4015 35



Traitement de cadres de lits et de tables d'opération



neodisher® Dekonta AF*

Détergent désinfectant combiné – Concentré liquide – Sans aldéhyde – Bactéricide, levuricide, effet virucide limité

Pour le traitement en machine de cadres de lit, conteneurs à instruments, tables d'opération, chariots de transport et chaussures pour blocs opératoires dans des installations de décontamination. Efficacité rapide, tout en préservant les matériaux.



Container	590 kg	4018 09	Fût RFID ⁴	200 kg	4018 14
Fût	200 kg	4018 13	Bidon	20 l	4018 26

neodisher® TN

Produit de rinçage – Concentré liquide –

Pour un meilleur séchage de matériaux difficiles à mouiller, comme par ex. les matières plastiques lors du traitement en machine de cadres de lit et de chariots de transport dans des installations de décontamination, pH neutre.



Fût	200 kg	3115 13	Bidon	20 l	3115 26
-----	--------	---------	-------	------	---------

neodisher® MediKlar special

Produit de rinçage – Concentré liquide –

Pour le séchage rapide et sans taches lors du traitement en machine des conteneurs à instruments et des cadres de lit. Neutralise les résidus alcalins résistants et réduit la formation de taches lors de l'utilisation d'eau adoucie lors du rinçage final.



Fût	200 kg	4073 13	Bidon	5 l	4073 33
Fût RFID ⁴	200 kg	4073 14	Flacons	12 x 1 l	4073 49
Bidon	20 kg	4073 26			

neodisher® BP

Produit de rinçage – Concentré liquide –

Pour le rinçage et l'entretien de pièces mobiles de cadres de lit, tables d'opération et chariots de transport lors du traitement en machine dans des installations de décontamination. Effet graissant et protection anti-corrosion.



Fût	180 kg	4307 13	Bidon	20 l	4307 26
-----	--------	---------	-------	------	---------

* Utiliser le produit désinfectant avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l'étiquette et la fiche produit.





Nettoyage et désinfection des surfaces

neoform® Active*

**Détergent désinfectant – Granulés –
A base d'acide peracétique – Bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide et sporicide**

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces dans les domaines médical, soin et laboratoire. Temps d'action réduits, large spectre d'action. Très bon pouvoir nettoyant, ne fixe pas les protéines, excellente compatibilité avec le matériel. Dégage peu de poussière, facile à dissoudre – dosage propre, précis et simple. Listé VAH¹ et inscrit dans la liste des virucides de l'IHO².

Seau 4 x 2 kg 4471 81 | Sachets 40 x 50 g 4471 75

Les bandelettes de test neodisher® test strips (N° d'article 981320) permettent de contrôler la concentration de la solution.



neoform MED AF*

**Détergent désinfectant sans aldéhyde – Concentré liquide –
Bactéricide, levuricide, effet virucide limité**

Pour le nettoyage et la désinfection de dispositifs médicaux et d'équipement médical. S'utilise dans le procédé d'essuyage. Listé VAH¹ et inscrit dans la liste des virucides de l'IHO².

Bidon 5 l 4056 35



neoform MED FF*

**Détergent désinfectant – Concentré liquide –
Bactéricide, tuberculocide, levuricide, virucide, efficace contre C. difficile**

Pour le nettoyage et la désinfection de dispositifs médicaux et d'équipement médical. S'utilise dans le procédé d'essuyage. Listé VAH¹ et inscrit dans la liste des virucides de l'IHO².

Bidon 5 l 4057 35



neoform® Rapid*

**Désinfection rapide – Solution alcoolique prête à l'emploi –
Bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide, effet virucide limité et active contre les norovirus**

Solution alcoolique pour la désinfection des surfaces des dispositifs médicaux, dans le domaine des laboratoires et dans les domaines pharmaceutique et cosmétique. S'utilise dans les procédés d'essuyage. Listé VAH¹ et inscrit dans la liste des virucides de l'IHO².

Flacons 12 x 0,75 L 5643 47



Hygiène des mains



triformin® wash

Lotion de lavage

Pour nettoyer et soigner les mains et le corps. Très bonne tolérance cutanée, testée dermatologiquement. Convient particulièrement aux peaux normales, sèches et sensibles. A base de matières premières végétales, contient de l'aloë vera et du miel naturel. Sans savon ni alcalins. Dosage avec le distributeur triformin® 1.0 et le distributeur triformin® 0.5.



Bidon	5 l	3173 35	Flacons	20 x 500 ml	3173 63
Flacons	10 x 1 l	3173 48			

triformin® wash pure

Lotion de lavage

Pour nettoyer et soigner les mains et le corps. Très bonne tolérance cutanée, testée dermatologiquement. Convient particulièrement aux peaux normales et sèches. Sans parfum ni colorants, avec des composants de soins nourrissants et de la glycérine à vertus hydratantes. Sans savon ni alcalins. Dosage avec le distributeur triformin® 1.0 et le distributeur triformin® 0.5.



Flacons	10 x 1 l	3183 48	Flacons	20 x 500 ml	3183 63
---------	----------	---------	---------	-------------	---------

triformin® care

Crème de soin pour la peau

Pour prendre soin de vos mains après le travail et pendant les pauses. Très bonne tolérance cutanée, testée dermatologiquement. Sans parfum. Dosage à partir du flacon de 500 ml avec le distributeur triformin® 0.5.



Flacons	6 x 500 ml	3105 39	Tubes	12 x 100 ml	3105 15
---------	------------	---------	-------	-------------	---------

triformin® protect

Crème de protection pour la peau

Protège durablement la peau contre le dessèchement. Protection longue durée et soin intense. Très bonne tolérance cutanée, testée dermatologiquement. Sans parfum. Dosage à partir du flacon de 500 ml avec le distributeur triformin® 0.5.



Flacons	6 x 500 ml	3102 39	Tubes	12 x 100 ml	3102 15
---------	------------	---------	-------	-------------	---------



Solutions techniques de dosage

Dosage intelligent – Sécurité des processus – Gestion des données

Un système de dosage de pointe, qui permet de saisir les données en vue d'une alimentation automatique de laveurs-désinfecteurs, est indispensable pour garantir des processus fiables, leur validation et des instruments dont les résultats de nettoyage sont toujours parfaits. Nos spécialistes conçoivent, construisent, installent et entretiennent de tels équipements, de la simple station de dosage aux systèmes centralisés pour plusieurs laveurs-désinfecteurs avec la saisie et la gestion des données associées. Nos exigences : un maximum de qualité, de fonctionnalité et de professionnalisme. Associez-nous dès le début à vos projets de transformation ou de nouvelle installation.

Installations de centrales de dosage

Les centrales de dosage alimentent plusieurs laveurs-désinfecteurs en produits chimiques dans de grandes unités de lavage. Ces installations peuvent se trouver à distance des laveurs-désinfecteurs. Les grands conditionnements permettent non seulement de réaliser des économies mais contribuent aussi à la sécurité des opérateurs qui n'ont plus besoin de manipuler des bidons. Le dosage s'effectue en circuit fermé. Le principe modulaire **weigomatic**® offre une grande souplesse aux solutions individuelles ainsi que de nombreuses options variées pour leur évolutivité. Nous concevons la centrale de dosage qui convient de manière optimale à vos besoins.

Le programme de gestion des données **weigomatic**® intègre des données qualitatives essentielles aux processus de lavage et de désinfection. Ainsi, toutes les informations importantes telles que les durées de service des laveurs-désinfecteurs et les quantités de produits chimiques consommées peuvent être enregistrées et consignées en permanence, puis être affichées clairement sur l'écran de l'ordinateur ou le panneau d'affichage tactile, tout en étant consultées, analysées et exploitées sur place ou à distance, via Internet. Un maximum de rentabilité, la détection en amont d'anomalies et de dysfonctionnements en font un outil incontournable pour garantir le respect de tous les processus validés et de leur sécurité optimale.

weigomatic® DOS Manager

weigomatic® **DOS Manager** est un système de dosage et de contrôle destiné à commander les opérations de dosage de tous les produits chimiques liquides dans des **weigomatic**® réservoirs de stockage devant alimenter des laveurs-désinfecteurs. L'unité de mémorisation intégrée permet de saisir en permanence les données spécifiques telles que les quantités consommées et les temps de fonctionnement, utilisable et consultable de manière claire via PC. La détection en amont d'anomalies assure la rentabilité des processus et leur sécurité optimale.

weigomatic® identSYSTEM

Ce système permet d'identifier un produit automatiquement et sans contact pour exclure tout risque de confusion. Ainsi, il ne rend pas seulement les opérations de changement d'un bidon plus intuitives, mais il est aussi et surtout garant de la fiabilité absolue de chaque processus de traitement et de désinfection qui débute. Le principe de fonctionnement, d'une grande simplicité, repose sur l'utilisation en continu de la technologie RFID (Radio Frequency Identification). Chaque fût équipé d'un **weigomatic**® transpondeur RFID est codé individuellement. Le signal qu'il émet est reconnu par un récepteur fixé sur la station de dosage, pour garantir qu'il s'agit bien du produit chimique requis. Après l'activation du dosage automatique de tous les produits chimiques correspondants, tous les paramètres et données essentiels aux processus de traitement sont enregistrés tels que : la date et l'intervalle de changement de conditionnements, le numéro de lot du produit chimique utilisé et sa date limite d'utilisation.

Pour plus d'informations :
www.drweiger.fr > neodisher Médical > Technique de dosage



Solutions techniques de dosage

weigomatic® system ALPHA

Le système de dosage spécialement conçu pour le dosage des ultra-concentrés dans le but d'optimiser le traitement en machine des instruments. Le dosage individuel des deux composants chimiques **neodisher® SystemAct** et **neodisher® SystemClean** révolutionne considérablement le process de nettoyage. Une technique de dosage innovante à faible encombrement avec une sécurité maximale des processus tout en optimisant l'étape de nettoyage. Il est éventuellement possible d'y ajouter le troisième composant de rinçage **neodisher® SystemRinse**. Le système est composé de la technologie RFID.

weigomatic® Drumtainer

Ce système combiné de transport et de stockage pour fût est la solution idéale pour faciliter la manutention du changement et de l'entreposage des fûts à la station de dosage. Ce système rend l'utilisation du bac collecteur dans la chambre de dosage inutile, car le fût reste pendant toute la durée d'utilisation dans le compartiment **weigomatic® Drumtainer**, qui est lui-même homologué en tant que bac collecteur.* Les quatre roulettes confèrent une grande mobilité au **weigomatic® Drumtainer**. Autre avantage : plus besoin de soulever les fûts. L'entreposage et le transport gagnent en sécurité et facilité et ce, sans le moindre chariot à fourche ou élévateur. Grâce à l'inclinaison de son fond, chaque fût peut être complètement vidé. Des couvercles de couleurs empêchent de confondre les produits. En outre, des étiquettes et des consignes de sécurité à l'extérieur permettent de les identifier sans risque de confusion.

weigomatic® endoDOS

weigomatic® endoDOS est un processus de dosage absolument fiable, parfait d'un point de vue hygiénique et économique et qui est utilisable avec un ou plusieurs laveurs-désinfecteurs pour endoscopes. Le dosage des produits chimiques est assuré par les **weigomatic®** réservoirs de stockage compacts qui alimentent en permanence les laveurs-désinfecteurs pour endoscopes et empêchent que les circuits de dosage ne puissent aspirer de l'air. C'est le seul moyen de garantir la vidange complète des bidons de produits chimiques sans pour autant devoir arrêter l'alimentation en produits dosés. Plus besoin de transvaser le fond d'un bidon à un autre. Il en résulte une meilleure protection du personnel et un moindre impact sur l'environnement. Des bidons et des lances de dosage de différentes formes évitent tout risque de confusion entre les produits chimiques. L'alimentation des **weigomatic®** réservoirs de stockage via une station de dosage centralisée offre une interface univoque entre l'unité de dosage et le laveur-désinfecteur pour endoscopes flexibles en tant que dispositif médical.

neomatik® mediDOS

L'unité de dosage commandé par un microprocesseur est utilisé pour produire des solutions prêtes à l'emploi de produits nettoyants et désinfectants à partir de concentrés liquides pour une application manuelle. Le mélangeur avec un boîtier robuste en acier inoxydable monté au mur se caractérise par son utilisation facile et dispose d'un arrêt automatique en cas de défaut produit et d'un contrôleur de niveau. **neomatik® mediDOS** répond à la recommandation RKI pour le ou les appareils de dosage de produits désinfectants décentralisés.**

Technique de dosage et de commande – fiable et performante :

Le dosage précis des produits chimiques et la saisie des paramètres essentiels d'un processus sont des conditions sine qua non de validation de ce processus. Dr. Weigert est leader depuis plusieurs dizaines d'années lorsqu'il s'agit de concevoir des systèmes professionnels. Grâce à cette expérience, nous pouvons vous proposer des concepts et des solutions sur mesure pour vous garantir une sécurité maximale, une rentabilité élevée et une utilisation simple.

Le personnel hospitalier responsable de l'hygiène est conscient de l'importance de choisir des concepts fiables et durables. Chez Dr. Weigert, les technologies de commande de dosage évoluent constamment, au travers de nos années d'expérience, tout en respectant les exigences les plus récentes.

* Numéro d'agrément DIBt Z-40.22-478. Description : agrément général pour des dispositifs collecteurs stationnaires en polyéthylène (PE-LLD) pour réceptionner des bacs de stockage (200 L) en polyéthylène (PE-HD) avec la désignation Drumtainer

** Exigences en matière d'agencement, de propriétés et d'exploitation d'appareils de dosage de produits désinfectants décentralisés, Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 2004 · 47:67–72

Auxiliaires d'utilisation et systèmes de dosage

Systemes de dosage et d'utilisation pour les bidons et les fûts



Clé en matière plastique pour ouvrir facilement les bidons et fûts	Réf 9810 07
Pompe pour bidon de 5 l, 10 l et 12 kg (30 ml par pression)	Réf 9807 01
Pompe pour bidon de 20 l et 20 kg à 25 kg (30 ml par pression)	Réf 9807 00
Pompe manuelle pour fûts	Réf 9803 08
Robinet pour bidon de 5 l, 10 l et 12 kg	Réf 9800 04
Robinet pour bidon de 20 l et 20 kg à 25 kg	Réf 9800 03
Robinet pour fûts	Réf 9800 02
neodisher® OXIVARIO Bouchon de prélèvement pour le raccordement de neodisher® OXIVARIO (bidon de 5 l) sur laveur-désinfecteur Miele	Réf 9810 12
Entonnoir pour fûts	Réf 9803 11
Cale pour le vidage optimal des fûts par leur mise en biais	Réf 9803 12
Chariot porte-fût	Réf 9803 10
Bac collecteur pour deux fûts	Réf 0763 90

Équipement personnel de protection



Gants de protection	Réf 9880 05
Lunettes de protection	Réf 9880 06
Boîte de rangement „Équipement de Protection Individuelle (EPI)“	Réf 9880 08

Accessoires



Embout de pulvérisation	Réf 9500 07
Pulvérisateur de mousse	Réf 9500 08
Gobelet gradué 500 ml	Réf 9801 06
Gobelet gradué 1000 ml	Réf 9801 00
Agitateur	Réf 9802 12
neodisher® test strips (50 unités)	Réf 9813 20
Bac de désinfection de 3 l (avec tamis et couvercle)	Réf 9611 00
Bac de désinfection de 10 l (avec tamis et couvercle)	Réf 9611 20
Bac de désinfection de 30 l avec robinet (avec tamis et couvercle)	Réf 9611 40

Distributeurs et distributeurs doseurs pour produits triformin®



Distributeurs doseurs	
Distributeur triformin® 0.5 touchless pour le dosage de flacons de 500ml	Réf 9810 30
Support pour distributeur triformin® touchless	Réf 9810 31
Distributeur triformin® 1.0 gold* pour le dosage à partir de flacons de 1 l	Réf 9810 51
Distributeur triformin® 0.5 gold* pour le dosage à partir de flacons de 500 ml	Réf 9810 21
Distributeur triformin® 1.0 silver** pour le dosage à partir de flacons de 1 l	Réf 9810 52
Distributeur triformin® 0.5 silver** pour le dosage à partir de flacons de 500 ml	Réf 9810 22
Distributeur triformin® 1.0 basic*** pour le dosage à partir de flacons de 1 l	Réf 9810 53
Distributeur triformin® 0.5 basic*** pour le dosage à partir de flacons de 500 ml	Réf 9810 23
Distributeurs	
pour flacons de 1 l triformin® wash et triformin® wash pure	Réf 9802 00
pour flacons de 0,5 l triformin® wash et triformin® wash pure	Réf 9802 03
pour flacons de 0,5 l triformin® care et triformin® protect	Réf 9802 02
Support mural	
pour flacons de 1 l triformin® wash et triformin® wash pure	Réf 9810 56
pour flacons de 0,5 l triformin® wash, triformin® wash pure, triformin® care et triformin® protect	Réf 9810 59

* Distributeur sans contact avec technologie sensorielle

** passe au lave vaisselle et en autoclave ; pompe en acier inoxydable retirable par l'avant

*** passe au lave vaisselle et en autoclave ; pompe en acier inoxydable

avec pompe en plastique



Service après-vente

Un suivi permanent

Le conseil nous tient à cœur : nous souhaitons vous apporter notre savoir-faire et notre expérience pour solutionner et anticiper tout problème potentiel. Notre accompagnement vous permet d'obtenir de bons résultats sur la durée. Nos installations de dosage sont entretenues régulièrement. Nos études microbiologiques permettent de contrôler le respect des exigences en matière d'hygiène. Nous assurons la formation de votre personnel dans le but d'une parfaite connaissance de nos produits et de leur utilisation.

L'hygiène et la sécurité sont nos priorités !

Ceux qui sont en charge du traitement des dispositifs médicaux en connaissent bien l'exigence en termes de résultats et de qualité de procédures. Faites confiance à notre expérience et à notre sens du service !

Les procédés de nettoyage et de désinfection doivent permettre d'obtenir des résultats reproductibles. Il faut donc valider les procédés et les documenter. Profitez du savoir-faire de Dr. Weigert pour des procédés d'hygiène qui garantissent un excellent rapport efficacité, sécurité et rentabilité.

Le traitement des instruments commence au bloc opératoire par leur immersion dans des bacs adaptés et se termine par leur stérilisation. En cas de modification de la surface du matériel, par exemple des instruments chirurgicaux après leur traitement en laveur-désinfecteur, il faut contrôler la totalité du cycle. Des modifications de la surface du matériel peuvent survenir au bloc opératoire après leur utilisation ou pendant leur traitement dans le stérilisateur à vapeur.

Nous déterminons les causes des modifications des matériaux et effectuons pour cela des analyses microscopiques des surfaces et des examens systématiques. Les analyses d'eaux, de condensés de vapeur, d'eaux d'alimentation de la chaudière, des emballages de stérilisation, nous fournissent beaucoup d'informations. C'est sur cette base que nous établissons nos recommandations pratiques pour éviter la formation de nouvelles décolorations, etc. Résultats haut de gamme sur la durée garantis.

neodisher® – force de proposition.

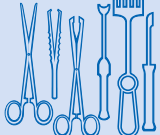
neodisher® a toujours été avant-gardiste en ce qui concerne le développement de produits et de procédés de nettoyage. Une collaboration étroite avec les fabricants d'instruments et de dispositifs médicaux est la meilleure approche pour développer des produits chimiques innovants et la conception de nouveaux procédés. Des solutions sur mesure pour les utilisateurs – pour une meilleure sécurité et la préservation du matériel !

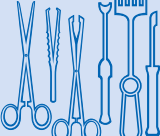





Conseils d'utilisation

Traitement de dispositifs médicaux & et d'accessoires

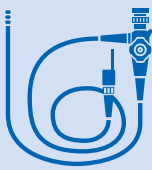
	neodisher® Septo PreClean ZP	neodisher® Septo PreDis ZP	neodisher® Septo Active	neodisher® MediClean forte	neodisher® SeptoClean	neodisher® DuoClean	neodisher® MediClean	neodisher® MediZym	neodisher® FA	neodisher® Alka 300	neodisher® MA	neodisher® AN	neodisher® Septo DN	neodisher® System Act	neodisher® System Clean	neodisher® N	neodisher® Z	neodisher® MultiZym	neodisher® LM 2	neodisher® Septo Fin
Prétraitement	●	●	●	●	●		●	●										●	●	
Nettoyage en machine				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●					
Désinfection en machine					●								●*							
Neutralisation																●	●			
Nettoyage manuel			●	●			●	●										●	●	
Désinfection manuelle			●*																	●*

	neodisher® MediKlar	neodisher® MediKlar special	neodisher® SystemRinse	neodisher® IR	neodisher® IP Konz	neodisher® IP Spray	neodisher® PreStop 
Rinçage	●	●	●				
Rénovation				●			
Protection/Entretien					●	●	●



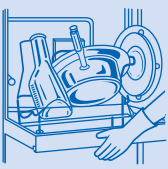
Conseils d'utilisation

Traitement d'endoscopes flexibles


	neodisher [®] endo [®] MED	neodisher [®] endo [®] DIS active	neodisher [®] endo [®] CLEAN	neodisher [®] endo [®] SEPT GA	neodisher [®] endo [®] SEPT PAC
Prétraitement			●		
Prétraitement désinfectant	●	●			
Nettoyage en machine			●		
Nettoyage manuel			●		
Désinfection en machine				● *	● *
Désinfection manuelle		● *			




Traitement de lave-bassins et d'urinaux

	neodisher [®] SBR extra	neodisher [®] SBN plus	neodisher [®] SBK	neodisher [®] SBX
Nettoyage	●			
Action anticalcaire		●	●	●
Rinçage		●	●	●


Traitement de cadres de lit et de tables d'opération

	neodisher [®] Dekonta AF**	neodisher [®] TN	neodisher [®] Mediklar special	neodisher [®] BP
Nettoyage	●			
Désinfection	●			
Rinçage		●	●	●

Hygiène des mains

	triformin [®] wash	triformin [®] wash pure	triformin [®] care	triformin [®] protect
Nettoyage des mains	●	●		
Soins de la peau			●	
Protection de la peau				●

Nettoyage et désinfection des surfaces

	neoform [®] MED AF**	neoform [®] MED FF**	neoform [®] Rapid**	neoform [®] Active**
Nettoyage	●	●		●
Désinfection	●	●		●
Désinfection rapide			●	

* convient également pour la désinfection finale des dispositifs médicaux semi-critiques

** Utiliser le produit désinfectant avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l'étiquette et la fiche produit.



DR. WEIGERT
Hygiène avec Système

En matière d'hygiène
toujours à vos côtés –
en Europe et **dans
le monde
entier.**



Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
info@drweigert.de

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11/12 a
1100 Wien
Tel.: +43-1-99460 6275
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG
Baarerstrasse 14
6300 Zug
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3
9405 PT Assen
Tel.: +31-592-31 93 93
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd
Newmarket Suite 17
Keys Business Village
Keys Park Road
Cannock, WS12 2HA
Tel.: +44-1543 471 222
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdynskie 6D
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
office_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España
Edificio MB-One
Avda. de Europa, 19/3A
28108 Alcobendas Madrid
Tel.: +34-91 793 21 48
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy CDG Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út 16
1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
Info@drweigert.hu

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com