




DR. WEIGERT

Higiéniai rendszerek

Orvostechnika

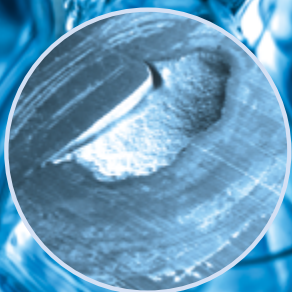

neodisher®
PreStop

Korróziógátló habspray sebészeti eszközök
célzott előkezeléséhez.

neodisher® PreStop – a korróziógátló sebészeti eszközök előkezeléséhez.

neodisher® PreStop

Korróziógátló, sebészeti eszközök és kellékek műtőben történt használata utáni célzott kezelésére

- Kloridok által okozott lyukkorrózió megelőzésére
- Műszerek előtisztítása már közvetlenül a műtőben
- Sebészeti eszközökhöz és kellékekhez, beleértve a MIC eszközöket is
- **neodisher® PreStop** nem minősül veszélyes készítménynek a CLP szabályozás (EG) 1272/2008 szerint



12 x 0,75 L flakon




Hatékony korrózióvédelem:

- A **neodisher® PreStop** meggátolja a lyukkorrózió kialakulását műszeracélból készült sebészeti eszközök felületein, amelyek a használat során letapadt vér ill. egyéb fiziológiás sóoldatok műszerekre gyakorolt káros hatása miatt alakulhat ki

Alkalmazási javaslat:

- A **neodisher® PreStop** terméket hígítatlanul, tömény formában, közvetlenül a műtéti használat után permetezzük a műszergyűjtő dobozba helyezett eszközökre úgy, hogy azokat a termék teljesen benedvesítse. Ezután a műszergyűjtő dobozt tartjuk lezárt állapotban
- A **neodisher® PreStop** termékkel kezelt műszerek akár 72 órán keresztül is tárolhatóak
- Ezután a műszereket a megszokott módon tisztítjuk ill. fertőtlenítjük, készítjük elő az újrafelhasználáshoz

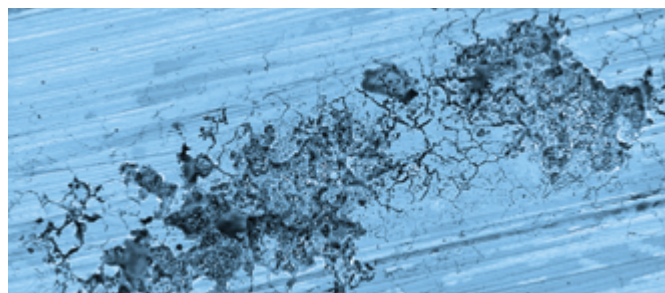

A kloridok által okozott lyukkorróziós károk a műszereken már nem javíthatóak.

A mi **szaktudásunk** – az Ön **előnye**:

- megbízhatóan meggátolja a különböző kloridok által okozott lyukkorróziót
- a műszereket a befűtés után nedvesen tartja
- műszerek előtisztítása már közvetlenül a műtőben
- csökkenti a mikroorganizmusok szaporodását a műszerek felületén a kontaktidő alatt (bakteriostatikus)



- megóvjaa a műszereket a visszafordíthatatlan károktól és ezáltal növeli azok élettartamát és értékét
- megakadályozza a műtéti szennyeződések rászáradását, a kezelt műszerek akár 72 órán át tárolhatóak
- megkönnyíti a az előtisztítást követő újrafelkészítést
- megnöveli a munkahelyi biztonságot a személyzet műszerekkel történő munkavégzése során