




**DR. WEIGERT**

Hygiëne met Systeem

Medisch

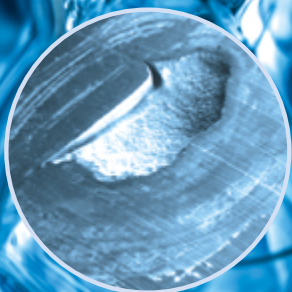

neodisher<sup>®</sup>  
**PreStop**

Corrosiestop bij de voorbehandeling van chirurgische instrumenten.

# neodisher® PreStop – de corrosiestop bij de voorbehandeling van chirurgische instrumenten.

## neodisher® PreStop

Tegen corrosie beschermend middel dat direct na gebruik in de OK op chirurgische instrumenten gespreid kan worden

- Voor het gericht voorkomen van door chloriden veroorzaakte putcorrosie
- De voorreiniging begint al na het opbrengen
- Voor chirurgische instrumenten, inclusief MIC-instrumenten
- **neodisher® PreStop** is geen gevaargoed conform CLP-Verordening (EG) Nr. 1272/2008



12 x 0,75 L Flasche  
4086 47




### Gegarandeerde bescherming tegen corrosie:

- **neodisher® PreStop** voorkomt putcorrosie op instrumenten van roestvrij staal, die door aanhechtende restanten van bloed of fysiologische zoutoplossingen ontstaan kan

### Aanbevolen gebruik:

- **neodisher® PreStop** onverdund direct na de OK volledig op de in de afvoercontainer gedeponeerde chirurgische instrumenten met de schuimsproeier aanbrengen. Afvoercontainer vervolgens gesloten houden
- Met **neodisher® PreStop** behandeld instrumentarium kan tot 72 uur bewaard worden
- Aansluitend zorgvuldig afspoelen en zoals gebruikelijk verder behandelen

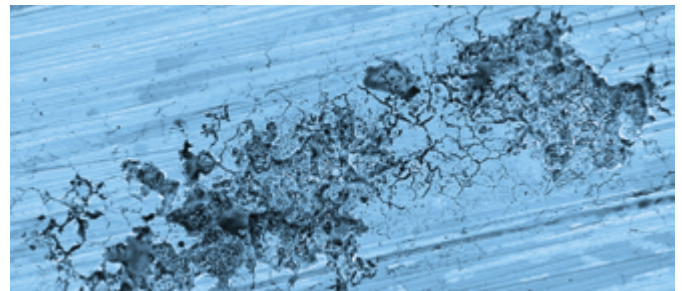

Beschadigingen op instrumentstaal als gevolg van door chloride veroorzaakte putcorrosie is onherstelbaar

## Onze kennis – uw voordeel:

- voorkomt door chloride veroorzaakte putcorrosie op betrouwbare wijze
- houdt het instrumentarium na het insproeien vochtig
- de voorreiniging begint al na het opbrengen
- remt de groei van micro-organismen op het instrumentarium tijdens de contacttijd af (bacteriostatisch)



- beschermt instrumentstaal tegen onherstelbare beschadigingen en zorgt ervoor dat het instrumentarium zijn waarde behoudt
- voorkomt het opdrogen van restanten uit de OK; het behandelde instrumentarium kan tot maximal 72 uur bewaard worden
- vereenvoudigd de verdere reiniging
- verhoogt de persoonlijke bescherming in de omgang met het instrumentarium