

neodisher® IP Konz



Műszerápoló speciális mosogatógépekhez. Toxikológiai szakvéleménnyel.
OKBI/562/2000.

Fő alkalmazási terület: Sebészeti műszerek ápolása mosogatógépekben, az öblítési folyamat során.

Tulajdonságok: A neodisher IP Konz tisztított paraffinolajat és emulgátorokat tartalmazó műszerápoló, koncentrátum formájában. Alkalmos műszermosogató és fertőtlenítő automatákban történő felhasználásra. Az neodisher IP Konz maradékai nem rakódnak több rétegben egymásra az acél felületeken és nem is keményednek meg a sterilizálás folyamán. Összetétele révén alkalmas a sterilizálást megelőző műszerápolásra, mert a védőréteg nem biztosítja a fertőző csírák túlélését. A későbbi tisztítási folyamat során a neodisher IP Konz-védőréteg maradéktalanul eltávolítható, ezért minden műszertisztítás ill. fertőtlenítés során pótolni kell.

A neodisher IP Konz-ot a gyártás során bakteriológiai ellenőrzésnek vetik alá, így garantálható, hogy a termék mentes a vegetatív csíráktól.

A neodisher IP Konz megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Adagolás: Egészségügyi mosogató és műszermosó automatákban:
1 - 2 ml/l a gép adagolóján keresztül az utolsó öblítővízhez.
Az előzetes tisztítás után az utolsó öblítési folyamat vizéhez 1 - 2 ml/l neodisher IP Konz koncentrátumot adunk. Az öblítővíz hőfoka legalább 50 °C legyen.

A merítéses ill. áztatásos eljárásokhoz a nehezen megelőzhető kontaminálódás veszélye miatt nem ajánlott a neodisher IP Konz használata.

A gépi adagolás alternatívájaként használható a neodisher IP Spray-el történő műszerápolás.

Szakértői vélemény: A gyártó rendelkezik az alábbi toxikológiai szakvéleményekkel (GT 4302/1-84):
- primer bőrizgató hatás kísérleti nyúlón
- szemirritációs teszt kísérleti nyúlón
- perorális applikáció patkányon

Regisztráció: A hatóanyagok FDA által engedélyezettek (eng. szám: 176210, 177120 és 172878)

- Műszaki adatok:** Fajsúly (20 °C): 0,9 g/cm³
Viszkozitás (koncentrátum, 20 °C): < 50 mPas
- Összetétel:** EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:
15 - 30 % nem ionos tenzidek
> 30 % alifás szénhidrogének (DAB minőségű paraffin olaj)
Egyéb komponensek: tartósítók
- CE-jelzés:** A termék megfelel a Németországban hatályos gyógyászati eszközökről szóló törvénynek és a 93/42/EWG ajánlásnak.
- Biológiai lebonthatóság:** A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és tisztítószerokról szóló törvénynek valamint az 1977.01.30-án módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát szabályozó rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai úton).
- Fiziológia:** A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett élettani szempontból nem veszélyes.
- Zöld pont:** A termék megfelel az EU-ban érvényes, csomagolóanyagokra vonatkozó rendeleteknek. Az üres csomagolóanyagot a **Duales System Deutschland GmbH (DSD)** dolgozza fel.
- Tárolás:** Fagymentes helyen tárolandó. < 10 °C alatti hőmérsékleten tárolva a termék irreverzibilisen megzavarosodhat. Szakszerűen tárolva 2 évig eltartható.
- Veszélyek és balesetvédelmi ajánlások:** Az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete értelmében a termék veszélytelen, veszélyességi fokát nem kötelező feltüntetni a csomagoláson.