




Enyhén lúgos tisztítószer fogászati műszerek gépi előkészítéséhez

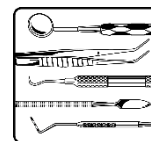

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

- Fogászati műszerek gépi tisztítása, beleértve a kézidarabokat, valamint az olyan fogászati eszközöket, mint a tálcák, öblítőpoharak és vesetálak

Hatásspektrum:

- Megbízhatóan távolítja el a rászáradt és a denaturált vér maradványait
- Kimagasló hatásfokkal távolítja el a szerves anyagokat
- Alkalmas a rozsdamentes acélból, általános műanyagokból készült fogászati műszerekhez és eszközökhöz, valamint a kézidarabok anyagaihoz
- Az eloxált alumíniumon történő használatra való alkalmassága előzetes vizsgálatot igényel

Különleges tulajdonságok:

- Rendkívüli mértékben kíméli az anyagot
- Lúgokat és tenzideket tartalmaz, amelyek meggátolják a fehérjemaradványok újbóli lerakódását, és csökkentik a tisztító oldat határfelületi feszültségét

Alkalmazása és adagolása:

A neodisher MediClean Dental tisztító és fertőtlenítő berendezésekben használható. Az adagolási mennyiség többek között a tisztítandó eszköz szennyezettségi fokától függ. A neodisher MediClean Dental használatával történő gépi tisztítás során az alábbi paraméterek követendők:

2–10 ml/l (0,2–1,0 V/V%), pl. 50–60 °C-on,
10 percig.

A kompozittömés-, fogcement- és lenyomatanyag-maradványokat még azok megkötése előtt el kell távolítani a műszerekről.

A tisztítási fázisban és a végső öblítéshez teljesen ásványmentesített víz használata javasolt. Ha a végső öblítéskor teljesen ásványmentesített vizet használnak, azzal elkerülhető a vízfoltok kialakulása, egyúttal pedig az eloxált alumínium is védelmet élvez. Az adagoláshoz megfelelő adagolókészülékek alkalmazandók.

A neodisher MediClean Dental oldatot teljesen le kell öblíteni (lehetőleg teljesen ásványmentesített) vízzel.

Általános tudnivalók a használathoz:

- Csak ipari használatra
- Más termékkel nem keverhető
- Termékváltás előtt az adagolórendszert és annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni
- Az előkészítést a gyógyászati termékekre vonatkozó jogszabályok és az érvényes előírások szerint, megfelelő, validált eljárással kell végezni.
- Kérjük, vegye figyelembe a gyógyászati termék-gyártó előkészítési javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány követelményeinek megfelelően
- Tartsa be a tisztító és fertőtlenítő berendezés gyártójának kezelési útmutatóit

Technikai adatok:

pH-érték	10,4–10,8 (2–10 ml/l, teljesen ásványmentesített víz esetén, 20 °C) Városi vízben vagy lágyított vízben, valamint pl. sokáig álló előöblítő vízben a pH-érték eltérő lehet
----------	---



Viszkozitás	< 10 mPas (koncentrárum, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Titrlási faktor	0,78 (a neodisher MediClean Dental speciális titrlási útmutatója szerint)

MB 4053/3-2 Állapot: 2021. február

Hatóanyagok:

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet értelmében:


< 5% nem ionos és anionos tenzidek
valamint enzimek

CE-jelölés:

A neodisher MediClean Dental megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó európai jogszabályok előírásainak.

Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság felé kell jelenteni.

Tárolás:

0–25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
Napfénytől védett helyen tárolandó. Szakszerű tárolás esetén 2 évig tárolható. Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum mögött nyomtatott dátumot.

A tárolási idő alatt az eredeti, zárt göngyölegekben előfordulhat a folyadék elszíneződése. Az alkalmazástechnikai tulajdonságokat ez nem befolyásolja.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon találhatóak. Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapokat.