

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Neodisher® IR

Middel voor grondreiniging

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGBIED:

Grondreiniging van *chirurgische* instrumenten in *dompelbad* of *ultrasoonbad*.

EIGENSCHAPPEN:

- Verwijdert aanloopkleuren, vlieg- of vreemdrest
- Neodisher® IR verwijdert *automatisch* hardnekkige minerale residuen veroorzaakt door bijvoorbeeld een slechte water- of stoomkwaliteit

DOSERING/GEBRUIK:

- **Dompelbad:**

Instrumenten onderdompelen in een warme gebruiksooplossing : **10 - 100** ml/l (1-10 %) – maximaal 50 °C.

Voor instrumenten met een *hardmetalen inzet* geldt een verdunning van **10 – 30** ml/l

Na een *inwerktijd* van ca. **1** uur instrumenten **grondig naspoelen** met water en laten **drogen**.

Zo nodig kan de inwerktijd worden *verlengd* tot **4** uur.

LET OP: instrumenten niet 's nachts in het bad laten liggen!

- **Ultrasoonbad:**

15 - 35 ml/l (1-10 %) – maximaal 50 °C.

De inwerktijd ligt veelal tussen **1 en 5** minuten (zie ook de aanwijzingen van de fabrikant van het instrumentarium)

Zo nodig de behandeling herhalen.

Indien de behandeling geen resultaat geeft kunt u contact met ons opnemen teneinde de aard van de verkleuring te laten onderzoeken

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

Neodisher® IR

Middel voor grondreiniging

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

NB:

- **ALLEEN GESCHIKT** voor instrumenten vervaardigd van *gehard chroomstaal* en *chromnikkelstaal*.
- Bij roestvaststalen instrumenten *zonder kwaliteitsgarantie* is altijd een test vooraf noodzakelijk.
- Instrumenten met een inzet van hardmetaal kunnen met neodisher® IR worden behandeld mits de beperkende voorwaarden, vermeld door de fabrikant van het instrument, in acht worden genomen¹⁾
- Opschriften die met behulp van lasertechniek zijn aangebracht kunnen verbleken
- De *tank* van het dompelbad en de afvoerleiding(en) moeten *zuurbestendig* zijn (*eterniet* en *gietijzer* is niet geschikt).
Eventueel de *gebruiksoplossing* eerst neutraliseren met een *alkalisch reinigingsmiddel* (*zonder actiefchlor*)
- Gebruik **nooit** een metaalborstel om de verkleuring te verwijderen: het instrument wordt onherstelbaar beschadigt en wordt daarmee gevoeliger voor roestvorming.
- **NIET TOEPASSEN** voor de eerste reiniging van fabrieksnieuwe instrumenten!

Gebruiksoplossing na afloop goed *wegspoelen* (bij voorkeur met *RO-* of *demiwater*)

Niet vermengen met andere producten!

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

1): conform de voorschriften in DIN EN ISO 17664

PRODUCTGEGEVENS:

| | |
|--|--|
| Verschijningsvorm: | vloeibaar |
| S.g. (bij 20 °C): | 1,4 g/ cm ³ |
| pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 10 -100 ml/l: | 1,8 – 0,9 |
| Viscositeit (concentraat, 20 °C): | < 50 mPas |
| Houdbaarheid: | 48 maanden (zie opslagcondities!) |

CE-MARKERING (conform de **richtlijn 93/42/EWG** voor medische producten)

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Neodisher® IR

Middel voor grondreiniging

Dr. Weigert Nederland BV
Postbus 865
9400 AW ASSEN
Tel.: 0592 319 393
Fax: 0592 310 117
e-mail: info@drweigert.nl
web site: www.drweigert.nl

WERKZAME STOFFEN (conform richtlijn 89/542/EG):

- < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

HANTERING EN OPSLAG:

| | |
|---|--|
| Advies voor veilig hanteren: | De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
| Opslag: | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
| Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag: | - |
| Minimum / maximum temperatuur: | zie etiket. |
| Overig: | Niet blootstellen aan direct zonlicht. |

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

| | |
|------------|------------------------------|
| UN nummer: | 1805 |
| | FOSFORZUUR, OPLOSSING, 8-III |

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

| | | |
|---|-----------|--|
| Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC | | |
| Gevarensymbool: | C | bijtend |
| | Bevat: | fosforzuur > 25% |
| Bijzondere gevaren: | R 34 | Veroorzaakt brandwonden. |
| Veiligheidsaanbevelingen: | S 26 | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. |
| | S 27 | Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. |
| | S 28 | Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water |
| | S36/37/39 | Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. |
| | S 45 | Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). |
| Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids Informatieblad. | | |

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Neodisher® IR

Middel voor grondreiniging

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS Weinig schadelijk voor in water levende organismen

ABM):

SANERINGSINSPANNING: B

VERPAKKING(EN):

| Bestelnummer: | Verpakkingsvorm: |
|---------------|------------------|
| 420448 | 10 x 1 L |
| 420430 | 12 KG |

Versie: 13-11-2008 (vervangt versie: -)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl!

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.