

neodisher[®] SBR extra

Reinigingsmiddel voor bedpanspoelers

Vloeibaar concentraat



Belangrijkste toepassingsgebied:

Reiniging van bedpannen en urinalen in bedpanspoelers.

Eigenschappen:

neodisher SBR extra is een schuimarm vloeibaar reinigingsmiddel. uitstekende resultaten bij het verwijderen van hardnekkige kalkzeepresten en sporen van cytostatica in menselijke afscheidingen. neodisher SBR extra is geschikt voor gebruik bij alle waterhardheden.

Dosering en gebruik:

neodisher SBR extra kan alleen worden toegepast in bedpanspoelers die zijn voorzien van een doseerpomp voor reinigingsmiddelen. De aanbevolen dosering is 1 - 3 ml/l, afhankelijk van waterhardheid en vervuilingsgraad.

indien de machine daarvoor geschikt is kan neodisher SBR extra ook worden toegepast voor kalkafbinding en naspoeling.

Na gebruik ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Niet vermengen met andere producten.

Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant voor reinigen en desinfecteren van de voorwerpen, volgens de DIN en ISO 17664 richtlijnen.

Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de reinigings en desinfectiemachine.

Alleen voor professioneel gebruik!

Productgegevens:

Soortelijkgewicht (20 °C): 1.2 g/cm³
pH-waarde (in demi water, 20 °C) 1 - 3 ml/l: 11.2 – 11.5
Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 50 mPa s

Ingrediënten:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:
< 5 % fosfonaten
15 - 30 % EDTA

CE-markering: CE

neodisher SBR extra voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische producten.

Hantering en opslag:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden. Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de stempel op het etiket achter het zandloper symbool .

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).

MB 4007 GB/2-4
Versie 01-2015
Vervangt: 15-09-2011



Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl