

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] SBX

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

Complexvormer t.b.v. bedpanspoelers

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGBIED:

Afbinding van waterhardheid ter voorkoming van kalkaanslag in bedpanspoelers.

EIGENSCHAPPEN:

- Zwak alkalische samenstelling
- Voorkomt, bij correct gebruik, kalkaanslag in stoomopwekkers
- Geschikt voor alle waterhardheden

DOSERING/GEBRUIK:

- **1 – 3** ml/l, afhankelijk van de waterhardheid
Dosering kan direct in het water voor de stoomopwekker plaatsvinden of in de voorraadtank (voor de reiniging en de stoomopwekker)

Bij *hardnekkige* verontreinigingen wordt aanvullend het gebruik van neodisher[®] **SBR-Extra** aanbevolen (speciaal reinigingsmiddel voor bedpanspoelers)


NB:

Zie ook de instructies van de fabrikant van de reinigings-/desinfectiemachine!

Niet vermengen met andere producten!

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCTGEGEVENS:

Versijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	1,1 g/ cm ³
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 1-3 ml/l:	9,8 – 10,2
Viscositeit (concentraat, 20 °C):	< 50 mPas
Houdbaarheid:	48 maanden (zie opslagcondities!)
Bruikbaar tot:	Zie de vermelding na het symbool 

CE-MARKERING:  0297

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- 15 – 30%: polycarboxylaten
- Conserveringsmiddelen (Sodium Hydroxymethylglycinate)

neodisher[®] SBX voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische producten.

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] SBX

Complexvormer t.b.v. bedpanspoelers

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Opslag:	Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	Tussen 0 en 30 °C
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht.

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR): geen gevaar goed in de zin van de voorschriften

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC	
Gevaarsymbool:	-
Bijzondere gevaren:	-
Veiligheidsaanbevelingen:	-
Lege verpakkingen (eventueel met product resten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek13)!	

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat + Gebruiksoptlossing:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
401535	5 L
401530	10 L

Versie: 15-09-2011 (vervangt versie: 01-12-2010)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

*Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website **www.drweigert.nl!***

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.