




neodisher® Alka 300



Alkalisch reinigingsmiddel voor de machinale reiniging van thermostabiele en thermolabiele instrumenten

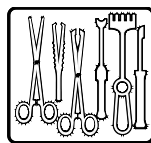

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Machinale reiniging van instrumenthouders, chirurgische instrumenten en anesthesieapparatuur
- Intensieve handmatige reiniging van chirurgische instrumenten in het dompelbad
- Intensieve handmatige reiniging van bedpannen middels het afveegproces met het neoform wipes RTF-dispensersysteem voor vliesdoeken
- Machinale reiniging van kooien in de veehouderij

Werkingscapaciteit:

- Verwijdert bloed- en eiwitresten en organische resten
- Geschikt voor instrumentstaal, chroomnikkelstaal, verchroomd en vernikkeld materiaal evenals zuiver aluminium, aluminium-magnesiumlegeringen en gangbare kunststoffen
- Vóór elk gebruik moet de geschiktheid voor speciale instrumenten, bijv. instrumenten met lenzen of anesthesie- en beademingsapparatuur, evenals geanodiseerd aluminium, worden gecontroleerd

Bijzondere eigenschappen:

- Met actief chloor voor een intensief reinigende werking
- Met oxidatieve afbraakkracht voor hardnekkige organische resten
- Kan bij elke waterhardheid worden gebruikt, maar wordt meestal gebruikt met onthard of volledig gedemineraliseerd water

Toepassing en dosering:

neodisher Alka 300 kan in reinigings- en desinfectieapparaten worden gebruikt. Voor

intensieve reinigingen kan het worden gebruikt in een dompelbad of in een afveegproces.

De volgende parameters worden bij de verschillende gebruiksmogelijkheden aanbevolen:

Machinale reiniging van instrumenthouders, chirurgische instrumenten en anesthesieapparatuur	2 - 5 ml/l (0,2 - 0,5 %)*
Machinale reiniging van kooien in de veehouderij	2 - 5 ml/l (0,2 - 0,5 %)*
Intensieve handmatige reiniging van chirurgische instrumenten en bedpannen	Raadpleeg uw neodisher-adviseur of de toepassingstechnieken van neodisher in verband met de gebruiksparameters voor de intensieve reiniging van chirurgische instrumenten en bedpannen

* De doseerhoeveelheid is o.a. afhankelijk van de mate van vervuiling van de te reinigen artikelen

Gebruik bij dosering passende doseertoestellen.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- De gebruiksooplossing neodisher Alka 300 moet in zijn geheel met water (bij voorkeur volledig zoutvrij) worden afgespoeld.
- Niet mengen met andere producten.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften



neodisher® Alka 300

op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.

- Let op de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664, de schoonmaakaanbevelingen van de fabrikant van de kooien en de aanbevelingen van het Arbeitskreis Käfigaufbereitung (AK-KAB, de 'Werkgroep voor de behandeling van kooien') in de actuele editie van de AK-KAB-brochure 'Käfigaufbereitung in der Tierhaltung richtig gemacht' (Het juist behandelen van kooien in de veehouderij).
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het reinigings- en desinfectieapparaat.

Technische gegevens:

Dichtheid	ca. 1,4 g/cm ³ (20 °C)
pH-bereik	11,1 - 11,9 (2 - 5 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (concentraat, 20 °C)
Titreerfactor	1,04 (conform de titreerhandleiding van neodisher)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig EG-detergentiaverordening
648/2004:

< 5 % chloorhoudende bleekmiddelen
15 - 30 % fosfaten

CE-markering:

neodisher Alka 300 voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie ervan op de hoogte te worden gesteld.

Opslaginstructies:

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen -10 °C en 25 °C worden aangehouden. Tegen zonlicht beschermen. Bij juiste opslag 1 jaar houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 3103/3-3

Versie: 05/2021