




# neodisher<sup>®</sup> BN



## Neutraal naspoelmiddel voor machinale reiniging van bedframes en transportkarren

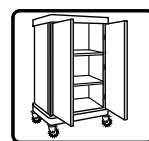

### Vloeibaar concentraat

#### Toepassingsgebied:

- Machinale naspoeling van bedframes en transportkarren in grote ontsmettingsinstallaties die volgens de instructies van de fabrikant machinaal geprepareerd kunnen worden

#### Vermogensspectrum:

- Zeer goede vochtregulerende eigenschappen, voor een snelle en streepvrije droging van het bewerkte materiaal
- Bij de juiste doseer- en spoeltemperatuur worden de bedframes en transportkarren gelijkmatig bevochtigd en zonder druppels of strepen gedroogd
- Bij materiaal dat gemaakt is van polysulfon (PSU) of polyfenyleensulfon (PPSU) kan bij contact met naspoelingsmiddelen spanningsscheuren ontstaan. Deze moeten altijd vooraf worden gecontroleerd op geschiktheid.

#### Bijzondere eigenschappen:

- Verkort significant de droogtijd.
- Vermindert de tijd en energie die nodig is voor de machinale preparatie.
- Uitstekend verenigbaar met materialen.

#### Toepassing en dosering:

neodisher BN wordt gebruikt voor de afsluitende spoeling in grote ontsmettingsinstallaties. Het automatische doseertoestel bepaalt hoeveel neodisher BN er aan het naspoelwater wordt toegevoegd. Gebruik bij dosering passende doseertoestellen.

De dosering is afhankelijk van de waterkwaliteit, het type en materiaal van het behandelde instrument en de naspoeltemperatuur. De optimale dosering van neodisher BN dient bij de inbedrijfstelling van de machine te worden ingesteld.

In geval van hard of zout water is een speciale waterbehandeling vereist voor een optimaal

spoelresultaat. Ter voorkoming van watervlekken wordt het gebruik van volledig ontzilt water in de afsluitende spoeling aanbevolen.

|                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Afhankelijk van de waterkwaliteit, het behandelde instrument en de naspoeltemperatuur | 0,2 - 0,5 ml/l |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

#### Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- Let op de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664, de aanbevelingen van de fabrikant van de transportkarren en de aanbevelingen van het Arbeitskreis Bettgestell- und Wagentekontaminationsanlagen (AK-BWA, de 'Werkgroep decontaminatie-installaties voor bedframes en karren') in de actuele editie van de AK-BWA-brochure 'Maschinelle Dekontamination'.
- Het reinigen, desinfecteren en steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van de ontsmettingsapparatuur.
- Niet mengen met andere producten.
- Bij het beoogd gebruik van neodisher BN zijn er geen gevolgen voor de biocompatibiliteit van de behandelde instrumenten (Biologische beoordeling van medische hulpmiddelen conform EN ISO 10993-1).



# neodisher<sup>®</sup> BN

## Technische gegevens:

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| pH-waarde   | 6,5 - 6,0 (0,2 - 0,5 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C) |
| Viscositeit | < 10 mPa·s (concentraat, 20 °C)                                      |
| Dichtheid   | ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                    |

MB 4972/3-1

Versie: 08/2020

## Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen  
overeenkomstig EG-detergentenverordening  
648/2004:  
< 5 % fosfonaat, polycarboxylaat  
15 - 30 % niet-ionische tensiden  
tevens conserveringsmiddel  
(methylchlorisothiazolinon / methylisothiazolinon)

## CE-markering:

neodisher BN voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische producten.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie op de hoogte te worden gesteld.

## Opslaginstructies:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Tijdens de opslag kunnen in de oorspronkelijke gesloten vaten kleurverschillen optreden. Dit heeft geen invloed op de eigenschappen met betrekking tot het gebruik van het product.

## Gevaar- en veiligheidsinstructies:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsgegevensbladen. Deze zijn beschikbaar op [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) in de rubriek 'Service/Downloads'.

Vaten alleen volledig gelegeerd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven.  
Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid.