

neodisher® DuoClean

Hoog alkalisch reinigingsmiddel voor machinale reiniging
van thermostabiele instrumenten - vloeibaar concentraat



Belangrijkste toepassingsgebied:

Eigenschappen:

Intensieve reiniging van chirurgisch instrumentarium
(m.n. voor gynaecologie, orthopedie en HF-chirurgie).

neodisher DuoClean is een sterk alkalisch, tensiden bevattend, intensief reinigingsmiddel. Met een goede reinigende werking voor het verwijderen van bloed, eiwit en hardnekkige operatie residuen. verwijdert, ook na een lange indroogtijd, de meest hardnekkige verontreinigingen zoals ingedroogd bloed en eiwitten. Hierdoor kunnen instrumenten van de gynaecologie, de orthopedie en de hoogfrequentchirurgie zonder tijdrovende voor- en nabehandeling worden gereinigd en gesteriliseerd. neodisher DuoClean bevat geen fosfaten, silicaten en oxidatiemiddelen.

neodisher DuoClean is geschikt voor rvs en alkalibestendige materialen zoals glas en kunststoffen. neodisher DuoClean is niet geschikt voor aluminium en eloxaal. Bij instrumenten van titaan en titaanlegeringen kan kleurverschil optreden; hiermee dient rekening te worden gehouden bij bijvoorbeeld implantaten met een kleurcodering.

neodisher DuoClean is inzetbaar bij alle waterhardheden.

Dosering en gebruik:

neodisher DuoClean wordt gebruikt in reiniging en desinfectieautomaten. De dosering ligt tussen de 3 - 5 ml/l, en is afhankelijk van de mate van vervuiling op de instrumenten.

Typische programma's zijn als volgt:

Voor machinale reiniging van chirurgische instrumenten:

- Voorreiniging met koud water
- Reiniging: 3 - 5 ml/l neodisher DuoClean, 10 minuten bij 60°C
- Eerste tussenspoeling
- Tweede tussenspoeling
- Naspoelen en thermische desinfectie bij 90°C:
0.3 - 1.0 ml/l neodisher MediKlar

Voor machinale reiniging van chirurgische instrumenten in het twee traps neodisher DuoClean proces:

- Voorreiniging met koud water
- Eerste reinigings stap: 3 ml/l neodisher DuoClean, 5 minuten, 55 °C
- Tweede reinigings stap: 5 ml/l neodisher DuoClean, 5 minuten, 60 °C
- Eerste tussenspoeling
- Tweede tussenspoeling
- Naspoelen en thermische desinfectie bij 90°C:
0.3 - 1.0 ml/l neodisher MediKlar

Maak gebruik van geschikte doseersystemen.

The neodisher DuoClean gebruiksooplossing na afloop goed wegspoelen (bij voorkeur met RO- of demiwater)

Vóór eerste gebruik het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Zie ook de instructies van de fabrikant van de instrumenten (zoals vastgelegd in DIN EN ISO 17664), alsmede die van de fabrikant van de reinigings-/desinfectiemachine.

Niet vermengen met andere producten. Alleen voor professioneel gebruik!



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14, 9404 RK Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl.

neodisher[®] DuoClean

Hoog alkalisch reinigingsmiddel voor machinale reiniging
van thermostabiele instrumenten - vloeibaar concentraat



Productgegevens:

Soortelijk gewicht (20 °C): 1.2 g/cm³
pH-waarde (in gedemineraliseerd water bij, 20 °C) 3 - 5 ml/l: 12.3 - 12.5
Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 50 mPas
Titratie factor: 0.53

Ingrediënten:

Ingrediënten conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:
< 5 % amfotere tensiden, 5-15 % polycarboxylaten

CE-markering CE

neodisher DuoClean voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG,
bijlage I over medische producten.

Hantering en opslag:

Altijd bij een temperatuur tussen -5 en 30 °C.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden. Voor de vervaldatum wordt
verwezen naar de stempel op het etiket achter het zandloper symbool .

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten)
afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen
wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig
omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en
dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad
(rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 4030 NL /2-6
Versie 06-2014
Vervangt 24-08-2011



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14 9404 RK Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring.
Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland
B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.
Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl.