




neodisher[®] FA Dental

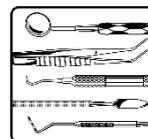

Détergent alcalin pour le traitement en machine des instruments dentaires



Concentré liquide

Domaine d'utilisation :

- Nettoyage en machine d'instruments dentaires et d'ustensiles utilisés en cabinet dentaire tels que les plateaux, les gobelets de rinçage et les haricots.

Spectre d'efficacité :

- Élimine les résidus de sang, d'albumine, d'os et de pommades
- Offre une protection élevée du matériel et une protection anti-corrosion pour les instruments dentaires et les ustensiles en acier inoxydable utilisés en cabinet dentaire
- Ne convient pas pour le nettoyage en machine des contre-angles. Il est conseillé d'utiliser pour cela le détergent neodisher MediClean Dental

Propriétés particulières :

- Avec protection élevée des matériaux
- Ne contient ni agents oxydants, ni tensioactifs

Utilisation et dosage :

neodisher FA Dental s'utilise dans les laveurs-désinfecteurs pour instruments dentaires. Le dosage dépend notamment du degré de salissure des objets à laver et s'élève à 4 - 5 ml/l.

Pour le dosage de neodisher FA Dental, utilisez des systèmes de dosage appropriés.

Les instruments doivent être débarrassés des restes de composite, de ciment dentaire et de masse pour empreinte dentaire avant durcissement.

Pour éviter des taches d'eau, il est recommandé d'utiliser une eau déminéralisée lors du rinçage final.

La solution d'application neodisher FA Dental doit être entièrement rincée à l'eau (de préférence déminéralisée).

Recommandations générales d'utilisation :

- Uniquement pour un usage professionnel.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Avant tout changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage et les tuyaux d'aspiration.
- Le traitement doit être réalisé conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations applicables avec des méthodes appropriées et validées.
- Les recommandations générales d'utilisation du fabricant des dispositifs médicaux sont à respecter conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664.
- Les notices d'instructions des fabricants des laveurs-désinfecteurs doivent être respectées.

Données techniques :

Valeur pH	11,8 – 12,0 (4 – 5 ml/l, déterminée en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 50 mPa s (concentré, 20 °C)
Densité	environ 1,5 g/cm ³ (20 °C)
Facteur de titrage	0,68 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 :
15 à 30 % de phosphates



neodisher[®] FA Dental

Marquage CE : 

neodisher FA Dental satisfait aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Consignes de stockage :

Craint le gel à partir de -15 °C. Conserver à une température comprise entre -15 °C et 30 °C. Durée de conservation en cas de stockage conforme : 3 ans. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole .

Indications de risques et de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.com dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

Éliminer seulement les conditionnements complètement vidés et fermés. Élimination de produit restant : voir la fiche de données de sécurité.

MB 4124/3-2 Version 02/2021

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.