

neodisher[®] FA Dental

Alkalisch reinigingsmiddel voor de machinale reiniging van dentale instrumenten
Vloeibaar concentraat



Belangrijkste toepassingsgebied:

Reiniging van dentaal instrumentarium en benodigdheden zoals trays, Mondspoelbekers en nierschalen.

Eigenschappen:

neodisher FA Dental is een alkalisch product en verwijdert bloed, eiwitten, zalf en achtergebleven botrestantjes

neodisher FA Dental uitstekende materiaal en corrosiebescherming bij instrumentarium en benodigdheden van rvs.

neodisher FA Dental is niet geschikt voor het reinigen van aandrijfunits; hiervoor adviseren wij het gebruik van neodisher MediClean Dental.

neodisher FA Dental bevat geen oxidatiemiddelen en tensiden.

Dosering en gebruik:

neodisher FA Dental is geschikt voor gebruik t.b.v. de reiniging van dental instrumenten in reinigings- /desinfectiemachines.

De dosering bedraagt, afhankelijk van de mate van verontreiniging, tussen de 4 - 5 ml/l.

Maak voor het doseren gebruik van voor neodisher FA Dental geschikte doseerapparatuur.

Resten van composiet, cement en stoffen voor gebit afdrukken moet ruwweg worden verwijderd voordat de set wordt gereinigd.

Om watervlekken te voorkomen is het gebruik van demi-water in de laatste spoeling aan te bevelen. Geëloxeerd aluminium is dan ook beschermd.

De neodisher FA Dental gebruiks-oplossing moet volledig met water afgespoeld worden (bij voorkeur met demi-water).

Niet vermengen met andere producten.

Na gebruik ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Let ook op de aanwijzingen van de instrumenten fabrikant voor reinigen en desinfecteren volgens de DIN en ISO 17664 richtlijnen.

Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de reinigings en desinfectiemachine.

Alleen voor professioneel gebruik!

Productgegevens:

Soortelijk gewicht (20 °C): 1.5 g/cm³

pH-waarde (in demi water, 20 °C) 4 - 5 ml/l: 11.8 – 12.0

Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 50 mPa s

Titratie factor: 0,66

Ingrediënten:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

15 - 30 % fosfaten

CE-markering:

neodisher FA Dental voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische producten.



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319353
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl

neodisher[®] FA Dental

Alkalisch reinigingsmiddel voor de machinale reiniging van dentale instrumenten
Vloeibaar concentraat



Hantering en opslag:

Gevoelig voor vorst bij een temperatuur onder de - 15 °C.
Altijd bij een temperatuur tussen -15 en 30 °C.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 48 maanden.
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de stempel op het etiket achter het zandloper symbool .

Bijzondere gevaar en Veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 4124 /2-3
Versie 10-2014
Vervangt 06-09-2011



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319353
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl