

neodisher® FRN

Vloeibaar, pH-neutraal en fosfaatvrij reinigingsmiddel
Voor gebruik in reinigings- en desinfectiemachines



Belangrijkste toepassingsgebied: Eigenschappen:

Mechanical cleaning of bedframes, trolleys and containers in decontamination units.

neodisher FRN is een wasmiddel voor gevoelige materialen op basis van speciale oppervlakte actieve stoffen in een niet-schuimende formule.
neodisher FRN bevat geen oxidatiemiddelen, zuren en alkaliën waardoor ook het afvalwater pH-neutraal is.

Geen aantasting van kwetsbare materialen.

Toe te passen bij water met een hardheid tot 5 °d (1 mmol/l).

Dosering en gebruik:

1 - 5 ml / l (via een geschikt doseerapparaat)

De neodisher FRN gebruikoplossing na afloop goed wegspoelen (bij voorkeur met demiwater).

Niet vermengen met andere producten!

Productgegevens:

Soortelijk gewicht (20 °C): 1.0 g/cm³

pH waarden van neodisher FRN-oplossingen, in water van 15 °d (3 mmol/l) onthard tot 0 °d (0 mmol/l), bij 20 °C:

Concentratie neodisher FRN	pH waarde
0 ml/l	7.5
1 ml/l	7.5
5 ml/l	7.5

Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 50 mPas

Ingredienten:

Ingredients according to Regulation (EC) No 648/2004 on detergents:
15 - 30 % niet-ionische tensiden
conserveringsmiddelen (N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine)

CE-markering:

neodisher FRN voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische producten.

Hantering en opslag:

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 48 maanden.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

neodisher FRN is geen gevaarlijk product volgens de richtlijn 1999/45/EG.

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).

MB 4120 / 2-2
Versie 10-2014
Vervangt 30-08-2011



Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl