




neodisher® IP Konz

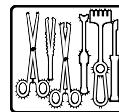

Produit d'entretien pour instruments à utiliser dans les laveurs-désinfecteurs



Concentré liquide

Domaine d'application :

- Soins de base pour le traitement en machine des instruments chirurgicaux lors du rinçage final

Spectre d'efficacité :

- Convient particulièrement pour une utilisation dans des laveurs-désinfecteurs en tant que soins de base pour les instruments chirurgicaux avant la stérilisation.
- Aucun germe ne subsiste dans la pellicule d'huile ultrafine.
- Ne convient pas pour les instruments qui sont stérilisés à l'air chaud.
- En cas d'utilisation conforme de neodisher IP Konz, la biocompatibilité des instruments traités n'est pas altérée (Évaluation biologique des dispositifs médicaux selon EN ISO 10993-1). Les substances actives correspondent aux exigences applicables des normes 21 CFR 176.210 (émulsifiants) et 21 CFR 172.878 (huile de paraffine) de la FDA ainsi que des USP/EUP/DAB (huile de paraffine).

Propriétés particulières :

- À base d'huile de paraffine hautement purifiée et d'émulsifiants
- N'a pas d'impact sur une ultérieure stérilisation à la vapeur.
- Les résidus ne s'accumulent pas sur les surfaces en acier et ne se résinifient pas non plus pendant la procédure de stérilisation.

Utilisation et dosage :

neodisher IP Konz est destiné à être utilisé dans les laveurs-désinfecteurs. Les paramètres suivants sont recommandés lors de l'utilisation en machine de neodisher IP Konz :

Utilisation dans le dernier rinçage	1 – 2 ml/l, min. 50 °C
-------------------------------------	------------------------

Pour le dosage, utiliser des appareils de dosage appropriés.

À l'étape de nettoyage suivante, la pellicule de neodisher IP Konz est entièrement éliminée, ce qui fait que neodisher IP Konz doit être utilisé à l'issue de chaque opération de désinfection et de nettoyage.

L'utilisation de neodisher IP Konz dans les bains de trempage est déconseillée en raison du risque d'introduction et de prolifération incontrôlées de germes.

Nous recommandons de remplacer neodisher IP Konz par neodisher IP Spray pour l'entretien ciblé des instruments articulés après le traitement en machine.

Recommandations générales d'utilisation :

- Uniquement pour usage professionnel.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Avant tout changement de produit, rincer avec de l'eau et du produit le système de dosage et les tuyaux d'aspiration.
- Le traitement doit être réalisé conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations applicables avec des méthodes appropriées et validées.
- Les recommandations générales d'utilisation du fabricant des dispositifs médicaux sont à respecter conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664.
- Les notices d'instructions des fabricants des laveurs-désinfecteurs doivent être respectées.



neodisher[®] IP Konz

Données techniques :

Densité	environ 0,9 g/cm ³ (20 °C)
Viscosité	< 50 mPa s (concentré, 20 °C)

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents

648/2004 :

15 – 30 % de tensioactifs non ioniques

> 30 % d'hydrocarbures aliphatiques (huile de paraffine DAB)

Marquage CE :

neodisher IP Konz satisfait aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Consignes de stockage :

Conserver à une température comprise entre 0 et 30 °C. En cas de stockage à moins de 10 °C, une turbidité réversible peut survenir.

Durée de conservation en cas de stockage conforme : 2 ans. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole



Indications de risques et de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr, dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

Éliminer seulement les conditionnements complètement vidés et fermés. Pour l'élimination de produit restant, voir la fiche de données de sécurité.

MB 4306/03-2 Version 04/2020

Les informations fournies dans cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas pour autant l'utilisateur de procéder à ses propres tests et essais. Une garantie juridiquement contraignante de l'existence de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.