

neodisher® IP Konz

Onderhoudsmiddel voor (chirurgische) instrumenten



Belangrijkste toepassingsgebied:

Smearing van beweegbare delen van chirurgische instrumenten in reinigings- en desinfectiemachines.

Eigenschappen:

neodisher IP Konz is een geconcentreerd onderhoudsmiddel op basis van hoogwaardige paraffineolie en emulgatoren. neodisher IP Konz wordt toegevoegd aan het laatste spoelwater van wasmachines als instrumentensmering. Residues verharden niet bij het steriliseren. Vanwege de emulgatoren is er geen interferentie met stoomsterilisatie. Neodisher IP Konz wordt bij iedere reiniging weggewassen zodat het altijd in de laatste spoelgang weer opnieuw moet worden gedoseerd.

neodisher IP Konz is niet geschikt indien hete lucht sterilisatie wordt toegepast.

neodisher IP Konz wordt onderworpen aan een bacteriologische eindcontrole en bevat geen vegetatieve kiemen.

Dosering en gebruik:

In wasmachines voor chirurgische instrumenten:

1 - 2 ml/l bij de laatste spoelgang
(temperatuur van het water dient minstens 50°C te zijn)

We raden het gebruik van neodisher IP Konz in dompelbaden af, vanwege het gevaar van een ongecontroleerde introductie van ziektekiemen.

Als alternatief kan neodisher IP Spray worden gebruikt voor behandeling na reiniging.

Niet vermengen met andere producten.

De reiniging moet voldoen aan alle verordeningen op grond van de richtlijn medische hulpmiddelen en moeten worden uitgevoerd in passende gevalideerde processen.

Deskundigenrapport:

neodisher® IP Konz is bij correct gebruik in toxicologische zin onbedenklijk (in de zin van EN ISO 10993-1).

Samenvatting van de toxicologische onderzoeken op aanvraag verkrijgbaar.

Werkzame stoffen zijn bij de FDA geregistreerd (onder nr. 176210, 177120 en 172878).

Productgegevens:

Soortelijk gewicht (20 °C): 0.9 g/cm³

Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 50 mPas

Ingrediënten:

Samenstelling conform EG detergenten richtlijn 648/2004:

15 - 30 % nietionische tensiden

> 30 % alifatische koolwaterstoffen (paraffineolie DAB)

Conserveringsmiddelen (Methylchloroisoethiozolinone/Methylisothiazolinone)

CE-markering: CE

neodisher IP Konz voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische producten.

Hantering en opslag:

Vorstvrij opslaan. Bij temperaturen onder 10°C kan een reversibele vertroebeling ontstaan.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 48 maanden.



Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwardweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl

neodisher® IP Konz

Onderhoudsmiddel voor (chirurgische) instrumenten



Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).

MB 4306 / 2-4
Versie 05-2015
Vervangt 06-09-2011



Dr. Weigert Nederland BV
Balkendarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl