




neodisher® IP Konz

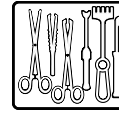

Agente de limpeza para instrumentos para utilização em equipamentos de limpeza e desinfecção



Concentrado líquido

Área de aplicação:

- Cuidados básicos durante o enxaguamento final de instrumentos cirúrgicos no reprocessamento mecânico.

Espetro de desempenho:

- Especialmente indicado para utilização em dispositivos de limpeza e desinfecção para a manutenção básica de instrumentos cirúrgicos antes da esterilização
- Ausência de germes na película de óleo extremamente fina
- Não é adequado para instrumentos esterilizados com ar quente.
- Quando utilizado de acordo com as instruções, o neodisher IP Konz não afeta a biocompatibilidade dos instrumentos tratados (Avaliação biológica de dispositivos médicos de acordo com a norma EN ISO 10993-1). Os ingredientes ativos estão em conformidade com os requisitos aplicáveis da FDA 21 CFR 176.210 (emulsionantes) e 21 CFR 172.878 (óleo de parafina), bem como da USP/EUP/DAB (óleo de parafina).

Características especiais:

- À base de óleo de parafina altamente purificado e emulsionantes.
- Isso não afeta a esterilização a vapor subsequente?
- Os resíduos não se acumulam nas superfícies de aço nem endurecem durante o processo de esterilização.

Utilização e dosagem:

O neodisher IP Konz destina-se a ser utilizado em equipamentos de limpeza e desinfecção. Os seguintes parâmetros são recomendados para a aplicação automatizada do neodisher IP Konz:

Utilize no enxaguamento final.	1 - 2 ml/l, mín. 50 °C
--------------------------------	------------------------

Para a dosagem, deve ser utilizado um equipamento de dosagem adequado.

Durante a limpeza subsequente, a película neodisher IP Konz é completamente removida, sendo necessário reutilizar o neodisher IP Konz no final de cada ciclo de desinfecção e limpeza.

A utilização do neodisher IP Konz não é recomendada para banheiras de imersão devido ao risco de contaminação e proliferação descontrolada de germes.

Como alternativa à utilização do neodisher IP Konz, recomendamos o cuidado específico das articulações com o neodisher IP Spray após o reprocessamento da máquina.

Instruções gerais relativas à utilização:

- Apenas para aplicações comerciais.
- Não misturar com outros produtos.
- Enxaguar o sistema de dosagem, incluindo as mangueiras de aspiração, com água antes de mudar o produto.
- O processamento deve ser realizado de acordo com a legislação relativa a dispositivos médicos e regulamentos aplicáveis, utilizando procedimentos validados adequados
- Observe as recomendações de processamento do fabricante do dispositivo médico de acordo com os requisitos da norma DIN EN ISO 17664.
- Devem ser seguidas as instruções de funcionamento do fabricante do equipamento de limpeza e desinfecção.



Dados técnicos:

Densidade	aprox. 0,9 g/cm ³ (20 °C)
Viscosidade	< 50 mPa s (concentrado, 20 °C)

Ingredientes:

Ingredientes para produto de limpeza segundo a diretiva CE relativa a detergentes 648/2004:

Tensioativos não iónicos 15 – 30%


> 30% de hidrocarbonetos alifáticos (óleo de parafina DAB)

Marcação CE:

O neodisher IP Konz cumpre os requisitos resultantes da legislação europeia relativa aos dispositivos médicos.

Em caso de incidente grave com este produto, este deverá ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente.

Instruções para armazenamento:

Durante o armazenamento deve ser mantida uma temperatura entre 0 e 30 °C. Se armazenado abaixo dos 10 °C, pode ocorrer turvação reversível. Pode ser armazenado durante 2 anos se for corretamente conservado. Pode ser utilizado até: ver a impressão na etiqueta por trás do símbolo .

Indicações de perigo e segurança:

As informações de segurança e ambientais podem ser encontradas nas fichas de dados de segurança. Estão disponíveis em www.drweigert.com na secção "Assistência/Downloads".

Eliminar apenas os recipientes vazios e selados.

Eliminação de resíduos de material de enchimento: ver ficha de dados de segurança.

MB 4306/03-2

Versão 04/2020