




neodisher® IP Spray



Műszerápoló spray

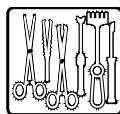

Spray

Alkalmazási terület:

- Sebészeti műszerek, elsősorban csuklós műszerek kézi ápolása

Hatásspektrum:

- Sebészeti műszerek gépi előkészítés utáni célzott ápolása, ha a csuklós műszerek tisztító- és fertőtlenítőberendezésben végzett ápolása nem megfelelő, vagy ha a tisztító- és fertőtlenítőberendezésbe nem adagolták a neodisher IP Konz terméket
- A neodisher IP Spray rendeltetésszerű használata esetén a termék nem befolyásolja a kezelt műszerek biokompatibilitását (Orvostechikai eszközök biológiai értékelése, EN ISO 10993-1 szabvány)

Különleges tulajdonságok:

- Orvosi tisztaságú fehérolaj alapú (gyógyszeripari használatú, nagy tisztaságú paraffinolaj)
- Nem okoz lerakódásokat
- Bizonyítottan nem befolyásolja kedvezőtlenül a későbbi, gőzzel vagy forró levegővel végzett sterilizálást

Alkalmazása és adagolása:

Célzottan permetezze be a műszereket a neodisher IP Spray-vel, különös tekintettel a csuklókra. Fújás közben lehetőleg tartsa függőlegesen a flakont. A szűrőedények bepermetezéséhez használjon rövidített szórócsöves flakont. Ehhez húzza le a szórócsövet a fejről, majd ollóval vágja a kívánt hosszúságúra. Ezután dugja vissza a szórócső rövidített végét a szórófejbe, hogy a spray eloszlása optimális legyen, és ne torzuljon el a megvágott szél miatt.

Általános tudnivalók a használathoz:

- Csak ipari használatra.
- Az előkészítést a gyógyászati termékekre vonatkozó jogszabályok és az érvényes

előírások szerint, megfelelő, validált eljárással kell végezni.

- Kérjük, vegye figyelembe a gyógyszeráttermék-gyártó előkészítési javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány követelményeinek megfelelően.

Hatóanyagok:

Európai Gyógyszerkönyv szerinti paraffinolaj gyógyszeripari használatra, nem ionos tenzidek, propán/bután hajtógáz


CE-jelölés:

A neodisher IP Spray megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó európai jogszabályok előírásainak.

Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság felé kell jelenteni.

Tárolás:

5–30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. Szakszerű tárolás esetén 3 évig tárolható.

Felhasználható: lásd a flakon alján a  szimbólum mögött nyomtatott dátumot.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon találhatóak.

Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapokat. A tartályban nyomás uralkodik. Napsugárzásnak és 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek kitenni tilos. A flakont erővel felnyitni, tűzbe dobni még üres állapotban is tilos.

MB 4304/3-1

Állapot: 2020/01