



neodisher[®] LM 2



Reinigingsmiddel voor de handmatige reiniging van thermostabiele en thermolabiele instrumenten en laboratoriumglaswerk

Vloeibaar concentraat



Toepassingsgebied:

- Handmatige reiniging van chirurgische instrumenten inclusief tandheelkundige instrumenten in een dompel- en ultrasoundbad
- Handmatige reiniging van laboratoriumglaswerk in medische, industriële en biologische laboratoria
- Handmatige reiniging van gebruiksvoorwerpen en kooien in de veehouderij
- Reiniging van pipetten zuigflessen in speciale vaatwasmachines

Werkingcapaciteit:

- Verwijdert organische resten, zoals aangekoekte bloed- en eiwitresten evenals resten van voer en uitwerpselen uit dierenkooien en anorganische resten
- Ondersteunt het verwijderen van tandcement
- Eenvoudig af te spoelen
- Veroorzaakt geen hinderlijk schuim
- Ook te gebruiken voor handmatige voorreiniging, dankzij de schuimarme component kan de vaat vervolgens zonder tussenspoeling in de vaatwasser worden geplaatst
- Geschikt voor de gebruikelijke materialen waarvan laboratoriumbenodigdheden zijn gemaakt, zoals glas, keramiek, roestvrij staal en kunststoffen
- Lichte metalen vooraf op geschiktheid controleren
- Te gebruiken bij iedere hardheid

Bijzondere eigenschappen:

- Bevat bijzonder schuimarme tensiden en verschillende reinigingsversterkers

- Zeer goed geschikt voor het ultrasoon reinigen van chirurgische en tandheelkundige instrumenten, vooral microinstrumenten
- Als laboratoriumglaswerk vóór de machinale reiniging wordt geautoclaveerd, wordt nat autoclaveren met toevoeging van neodisher LM 2 (30 ml/l) aanbevolen. Vuilresten branden niet in en kunnen in geval van machinale reiniging gemakkelijker worden verwijderd

Toepassing en dosering:

Handmatige reiniging van chirurgische instrumenten en laboratoriumglaswerk:
5 - 20 ml/l in een dompel- en ultrasoundbad
Inwerktijd 10 - 30 min

Handmatige reiniging van gebruiksvoorwerpen en kooien in de veehouderij:
5 - 30 ml/l inwerktijd 10 - 30 min

Machinale reiniging van pipetten:
10 - 30 ml/l in pipettenvaatwassers,
inwerktijd 10 - 30 min

Nat autoclaveren van laboratoriumglaswerk:
30 ml/l neodisher LM 2 toevoegen. Vuilresten branden niet in en kunnen bij de daarop volgende machinale reiniging gemakkelijker worden verwijderd

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Niet mengen met andere producten.
- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.



neodisher[®] LM 2

- De gebruiksooplossing van neodisher LM 2 moet in zijn geheel met water (bij voorkeur volledig ontzilt) worden afgespoeld.
- Let op de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664..

Vaten alleen volledig gelegeerd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

Technische gegevens:

pH-waarde	10,6 - 11,3 (5 - 30 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 10 mPa s (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,2 g/cm ³ (20 °C)

MB 4403/3-2
Versie: 02/2021

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen
overeenkomstig EG-detergentiaverordening
648/2004:

< 5% amfotere tensiden, a-ionische tensiden
15 - 30 % fosfaten

CE-markering:

neodisher LM 2 voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie ervan op de hoogte te worden gesteld.

Opslaginstructies:

Vorstvrij bewaren. Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsgegevensbladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven. Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid.