




neodisher[®] MA

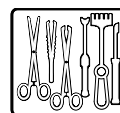

Agente de limpieza para el reprocesamiento de instrumentos termoestables y termolábiles, así como material de laboratorio hecho de vidrio

En polvo

Ámbito de aplicación:

- Limpieza automatizada de instrumental quirúrgico, equipos de anestesia, calzado de quirófano y otros productos sanitarios, así como biberones, en hospitales y consultorios médicos
- Limpieza automatizada de material de laboratorio hecho de vidrio en laboratorios médicos, biológicos y químicos

Gama de prestaciones:

- Limpieza eficaz de residuos de sangre, proteínas y alimentos
- Adecuado para material de laboratorio hecho de vidrio, acero inoxidable, acero para instrumentos, aluminio puro, aleaciones de aluminio y magnesio, equipos cromados, plásticos comunes y materiales utilizados en equipos de anestesia
- En el caso de objetos anodizados, neodisher MA reduce la agresividad del agua descalcificada sobre la capa anodizada
- Apto para cualquier valor de dureza del agua

Características especiales:

- Alta protección del material
- Sin ningún daño en las graduaciones
- Efecto reductor de espuma

Uso y dosificación:

neodisher MA se utiliza en lavavajillas especiales. La dosis es de 1-4 g/l, dependiendo, entre otras cosas, del área de aplicación y del grado de contaminación de los instrumentos o del material de laboratorio hecho de vidrio.

Ejemplos de aplicación:

Reprocesamiento de instrumental:	
Limpieza con neodisher MA	3 g/l, 55 °C
Neutralización con neodisher Z	1-2 ml/l

Eliminación de residuos de medios de cultivo, reactivos, sangre y suero	
Limpieza con neodisher MA	3 g/l
Neutralización con neodisher Z	1-2 ml/l
Los medios de cultivo deben retirarse antes de limpiar. Si tiene dificultades para eliminar tintes como violeta de genciana, etc., utilice neodisher [®] N o neodisher [®] LaboClean GK para el enjuague previo.	

Eliminación de residuos de leche, comida para bebés y papillas	
Limpieza con neodisher MA	3 g/l, 70-95 °C
Neutralización con neodisher Z	1 ml/l

Se recomienda usar agua totalmente desmineralizada durante el paso de limpieza y el enjuague final.

Indicaciones generales sobre el uso:

- Solo para aplicaciones comerciales.
- No lo mezcle con otros productos.
- La solución de aplicación de neodisher MA debe enjuagarse por completo con agua (de preferencia totalmente desmineralizada).
- El reprocesamiento debe realizarse mediante procedimientos adecuados de acuerdo con las recomendaciones KRINKO¹ y BfArM², así como el Reglamento alemán sobre usuarios de productos sanitarios.



- Tenga en cuenta las recomendaciones de reprocesamiento del fabricante del instrumental, de acuerdo con los requisitos de la norma DIN EN ISO 17664.
- Se deben observar las instrucciones de uso de los fabricantes de las lavadoras-desinfectadoras.
- Tenga en cuenta las recomendaciones de limpieza de los fabricantes de material de laboratorio hecho de vidrio, así como las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre reprocesamiento de material de laboratorio hecho de vidrio (AK LAB) en la última edición del manual de AK LAB «Reprocesamiento de material de laboratorio hecho de vidrio: reprocesamiento de material de laboratorio hecho de vidrio de forma segura y sin dejar residuos».

Datos técnicos:

Valor de pH	11,5-12,1 (1- 4 g/l, determinado en agua totalmente desmineralizada, 20 °C)
Densidad aparente	aprox. 915-965 g/l
Factor de titulación	0,44 (según las instrucciones de titulación de neodisher)

Ingredientes:

Ingredientes para agentes de limpieza según el Reglamento CE de detergentes 648/2004:

- < 5 % de tensioactivos no iónicos
- > 30 % de fosfatos

Marcado CE:

neodisher MA cumple los requisitos de la legislación europea sobre productos sanitarios.

En caso de que se produzca un incidente grave con este producto, se deberá informar al fabricante y a la autoridad pertinente.

Instrucciones de almacenamiento:

¡Vuelva a cerrar la tapa después de retirarla! La humedad puede hacer que el producto se apelmace y pierda eficacia.

Durante el almacenamiento, se debe mantener una temperatura de entre 0 °C y 30 °C. Se puede almacenar durante 2 años en las condiciones adecuadas.

Fecha de caducidad: véase la fecha impresa en la etiqueta tras el símbolo .

Indicaciones de peligro y seguridad:

Encontrará información sobre seguridad y medio ambiente en las fichas de datos de seguridad. Están disponibles en www.drweigert.com, en la sección «Servicio/Descargas».

Deseche los envases solo si están completamente vacíos y cerrados. Eliminación del contenido sobrante: véase la ficha de datos de seguridad.

Ficha técnica 4107/3-1

Última actualización: 01/2020

¹ Higiene hospitalaria y prevención de infecciones del Instituto Robert Koch

² Instituto federal de medicamentos y productos sanitarios de Alemania