




Tisztítószer fogászati műszerek gépi előkészítéséhez Folyékony koncentrátum

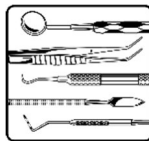

Alkalmazási terület:

- Fogászati műszerek gépi tisztítása, beleértve a kézidarabokat, valamint az olyan fogászati eszközöket, mint a tálcák, öblítőpoharak és vesetálak
- Fogászati műszerek merülő- és ultrahangos fürdőben végzett kézi tisztítása

Hatásspektrum:

- Megbízhatóan távolítja el a rászáradt és a denaturált vér maradványait
- Kimagasló hatásfokkal távolítja el az organikus anyagokat, és megakadályozza a fehérjemaradványok újbóli lerakódását
- Elősegíti a biofilmek eltávolítását
- Alkalmas a rozsdamentes acélból, általános műanyagokból készült fogászati műszerekhez és eszközökhöz, valamint a kézidarabok anyagaihoz
- Az eloxált alumíniumon történő használatra való alkalmassága előzetes vizsgálatot igényel

Különleges tulajdonságok:

- Nagyon kíméletes az anyagokhoz
- Kiváló tisztítási teljesítmény a lúgos kémhatású anyagokon, tenzideken és enzimeken alapuló egyedülálló formulának köszönhetően
- Kézi előtisztításhoz való használatkor az azt követően neodisher MediClean Dental tisztítószerrel végzett gépi előkészítéshez nincs szükség a tisztítóoldat lemosására
- Jelölésmentes: nem tartalmaz veszélyes anyagot, nem tartalmaz veszélyes árut

Alkalmazása és adagolása:

A neodisher MediClean Dental tisztító- és fertőtlenítőberendezésekben, valamint merülő- és ultrahangos fürdőben használható. Az adagolási mennyiség többek között a tisztítandó eszköz szennyezettségi fokától függ.

A neodisher MediClean Dental használatakor az alábbi paraméterek javasoltak:

Fogászati műszerek gépi és kézi tisztítása:

Fogászati műszerek gépi tisztítása	2–10 ml/l (0,2–1,0%)*, pl. 40–60 °C, 10 perc
Általános javaslat	5 ml/l (0,5%)*, pl. 55 °C, 10 perc
Fogászati műszerek merülő- és ultrahangos fürdőben végzett kézi tisztítása	5–20 ml/l (0,5–2%)*, max. 40 °C, 10–30 perc

* az adagolási mennyiség többek között a szennyezettség fokától függ

Az adagoláshoz megfelelő adagolóeszközök alkalmazandók.

A kompozittömés-, fogcement- és lenyomatanyag-maradványokat még azok megkötése előtt el kell távolítani a műszerekről.

A tisztítási fázisban és a végső előblítéshez teljesen ásványmentesített víz használata javasolt. Ha a végső öblítéskor teljesen ásványmentesített vizet használnak, azzal elkerülhető a vízfoltok kialakulása, egyúttal pedig az eloxált alumínium is védelmet élvez.





A kézi tisztításhoz használt oldatot legalább minden munkanap fel kell frissíteni, és látható szennyeződések esetén ki kell cserélni.

Általános tudnivalók a használatához:

- Csak ipari használatra
- Más termékkel nem keverhető
- Termékváltás előtt az adagolórendszert és annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni
- Az előkészítést a gyógyászati termékekre vonatkozó jogszabályok és az érvényes előírások szerint, megfelelő, validált eljárással kell végezni.
- A neodisher MediClean Dental oldatot teljesen le kell öblíteni (lehetőleg teljesen ásványmentesített) vízzel.
- Gyógyászati termékek előkészítése: Kérjük, vegye figyelembe a gyógyászatitermék-gyártó előkészítési javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány követelményeinek megfelelően
- Tartsa be a tisztító és fertőtlenítő berendezés gyártójának kezelési útmutatóit

Technikai adatok:

pH-érték	10,4–10,8 (2–10 ml/l, teljesen ásványmentesített víz esetén, 20 °C) Városi vízben vagy lágyított vízben, valamint pl. sokáig álló előöblítő vízben a pH-érték eltérő lehet
Sűrűség	kb. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Viszkozitás	< 10 mPa s (koncentrációt, 20 °C)
Titrlási faktor	0,77 (a neodisher MediClean Dental titrlási útmutatója szerint)

Hatóanyagok:

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és tisztítószerokról szóló 648/2004/EK rendelet értelmében:
< 5% nem ionos és anionos tenzidek, valamint enzimek

CE-jelölés:

A neodisher MediClean Dental megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó európai jogszabályok előírásainak.

Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság felé kell jelenteni.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen tárolandó.
0–25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
Napfénytől védett helyen tárolandó.
Szakszerű tárolás esetén 2 évig tárolható.
Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum mögött nyomtatott dátumot.
A tárolási idő alatt az eredeti, zárt göngyölegekben előfordulhat a folyadék elszíneződése. Az alkalmazástechnikai tulajdonságokat ez nem befolyásolja.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A neodisher MediClean Dental az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet értelmében nem veszélyes anyag.
A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.
További biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatóak. Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

MB 4053 / 3-2
Állapot: 05/23