




# neodisher® MediKlar Dental



## Naspoelmiddel voor machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten

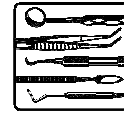

Vloeibaar concentraat

### Toepassingsgebied:

- Naspoelen tijdens het machinaal voorbereiden van tandheelkundige instrumenten, waaronder overdrachtsinstrumenten, alsmede tandheelkundige gebruiksvoorwerpen zoals trays, mondspoelbekers en nierschalen

### Werkingscapaciteit:

- Verbetert de bevochtiging van oppervlakken van roestvrij staal en kunststof
- Versnelt het drogen bij de machinale verwerking
- Bij gebruik volgens de bestemming van neodisher Mediclean Dental wordt de biocompatibiliteit van de behandelde instrumenten niet aangetast (Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen volgens EN ISO 10993-1).

### Bijzondere eigenschappen:

- Verkort de droogtijd significant
- neutraliseert overgedragen alkalineresten en alkalisch water

### Toepassing en dosering:

neodisher Mediclean Dental wordt gebruikt in reinigings- en desinfectiemachines voor tandheelkundige instrumenten. De dosering vindt automatisch plaats via het machine-eigene doseerapparaten tijdens de laatste spoelcyclus en bedraagt 0,2 - 0,4 ml/l.

De doseerapparaten moeten geschikt zijn voor het doseren van neodisher Mediclean Dental.

### Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Niet mengen met andere producten.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water doorspoelen.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het reinigings- en desinfectieapparaat.
- Het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.
- Let op de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664.

### Technische gegevens:

pH-waarde	4,0 - 3,7 (0,2 - 0,4 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

### Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:  
< 5 % fosfonaten  
15 - 30 % niet-ionische oppervlakactieve stoffen tevens conserveringsmiddelen (methylchlorisothiazolinon/methylisothiazolinon)




## CE-markering:

neodisher Mediclean Dental voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Europese wetgeving inzake medische hulpmiddelen.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie ervan op de hoogte te worden gesteld.

## Opslaginstructies:

Vorstvrij bewaren. Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool 

## Gevaar- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com) in de rubriek 'Service/Downloads'.

Vaten alleen volledig gelegeerd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 4776/3-1

Versie: 05/2020



De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven. Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid.