




neodisher® MediKlar special

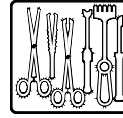

Nachspülmittel zur maschinellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten



Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Nachspülung von Medizinprodukten wie chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesieutensilien, Instrumentencontainern und Implantaten sowie Babyflaschen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten
- Klarspülung von Bettgestellen in Großraumdekontaminationsanlagen, die gemäß Herstellerangaben maschinell aufbereitet werden können

Leistungsspektrum:

- Sehr gute Benetzungseigenschaften, auch auf schwer benetzbaren Kunststoffoberflächen
- Für eine schnelle und streifenfreie Trocknung des Behandlungsguts
- Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von neodisher MediKlar special wird die Biokompatibilität der behandelten Instrumente nicht beeinflusst (Biologische Beurteilung von Medizinprodukten nach EN ISO 10993-1)
- Zubehörteile von Anästhesieutensilien aus Polysulfon (PSU) sowie aus Polyphenylsulfon (PPSU) wie z. B. Konnektoren von Larynxmasken, Ventile, Adaptoren und Teile von Instrumenten-Containerdeckeln können bei Kontakt mit Nachspülmitteln herstellungsbedingt Spannungsrisse bilden. Sie sind jeweils auf Eignung vorzuprüfen

Besondere Eigenschaften:

- Verkürzt die Trocknungszeit deutlich
- Neutralisiert verschleppte Alkalireste
- Reduziert die Fleckenbildung bei Einsatz von enthärtetem Wasser in der Schlusspülung

Anwendung und Dosierung:

neodisher MediKlar special wird in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Großraumdekontaminationsanlagen eingesetzt. Die Dosiermenge ist u.a. vom Anwendungsbereich, dem Spülgut und der Wasserqualität abhängig. Folgende Parameter sind bei der Anwendung von neodisher MediKlar special einzuhalten:

- Zur Nachspülung von chirurgischen Instrumenten, Anästhesieutensilien, Instrumentencontainern, Implantaten und Babyflaschen: 0,2 - 0,4 ml/l
- Zur Nachspülung von Bettgestellen: 0,2 - 0,8 ml/l

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Großraumdekontaminationsanlagen und Dosiersysteme müssen für den Einsatz von neodisher MediKlar special geeignet sein.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664, die Aufbereitungsempfehlungen der Hersteller der Bettgestelle sowie die Empfehlungen des Arbeitskreises Bettgestell- und Wagendekontaminationsanlagen (AK-BWA) in der aktuellen Ausgabe



neodisher[®] MediKlar special

der AK-BWA-Broschüre „Maschinelle Dekontamination“.

- Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgeräthehersteller sind zu beachten.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4073/3-2
Stand: 07/2020

Technische Daten:

pH-Wert	4,0 - 3,5 (0,2 - 0,8 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 50 mPa s (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	ca. 1,05 g/cm ³ (20 °C)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:


< 5 % Phosphonate,
15 - 30 % nichtionische Tenside,
außerdem Konservierungsmittel
(Methylchloroisothiazolinone/
Methylisothiazolinone)

CE-Kennzeichnung:

neodisher MediKlar special erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.