

neodisher[®] N



Folyékony, savas kémhatású gépi mosogatószer tisztításra és semlegesítésre, speciális mosogatógépekhez
OKBI/563/2000.

- Fő alkalmazási terület:** Lúgos kémhatású mosogatószer maradványainak semlegesítésére és / vagy savas gépi előtisztításra az alábbiakhoz:
- * sebészeti műszerek, anaesthesiológiai eszközök, konténerek, műtőscipők, cumisüvegek, valamint más egészségügyi és orvostechnikai berendezésekhez;
 - * laboratóriumi üvegekhez egészségügyi valamint ipari laboratóriumokban;
 - * állatketrecek és szállítókocsik tisztítására (savas mosás).

Tulajdonságok: A neodisher N alkalmas lúgos tisztítószer-maradványok semlegesítésére, valamint mész, húgykő és más, savban oldódó szennyeződések és lerakódások eltávolítására. Nem tartalmaz tenzideket, könnyen leöblíthető, kémiai-termikus eljárásokban használva baktericid hatású.

Mindenfajta üveg, kerámia, nemesacél, valamint saválló műanyagok és gumik tisztítására alkalmas, ezeket az anyagokat nem támadja meg. **A színesfémeket, krómozott és nikkal bevonatú fémeket, valamint az eloxált alumíniumot a neodisher N oldatai megtámadják!**

A savas oldatok elvezetésére saválló lefolyókat kell kiépíteni a mosogatógépekhez. Eternit és öntöttvas csövek e célra nem alkalmasak, ezért ilyen esetekben a savas kémhatású oldatot semlegesíteni kell, mielőtt a gépből kiengednék.

Adagolás: Speciális mosogatógépekben (azok adagolórendszerén keresztül):
Lúgos semlegesítésére: 1 - 2 ml/, a lúgos mosási folyamat utáni első öblítővízhez adagolva

Savas előmosáshoz/ mosogatóshoz: 2 - 4 ml/l, 40 - 60 °C-on.

A neodisher N oldatait alaposan öblítsük le.

Figyelem: A termék alkalmazását megelőzően meg kell győződni a mosogató berendezés és a lefolyók savállóságáról!

Műszaki adatok:	Fajsúly (20 °C): 1,5 g/cm ³ pH-érték (20 °C-os deszt. vízben) 1 - 15 ml/l: 2,2 - 1,4 Viszkozitás (koncentrátum, 20 °C): < 10 mPas Titrálási faktor: 0,16 (neodisher titrálási módszer szerint)
Összetétel:	EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok: 15 - 30 % szerves foszfor (foszforsav) Egyéb komponensek: szerves savak
CE-jelzés:	CE-jelzés: A termék megfelel a Németországban hatályos gyógyászati eszközökről szóló törvénynek és a 93/42/EWG ajánlásnak.
Biológiai lebonthatóság:	A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és tisztítószerrekről szóló törvénynek valamint az 1977.01.30-án módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát szabályozó rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai úton).
Fiziológia:	A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott szénhidrogéneket. Rendeltetészerű használat mellett megfelel a német élelmiszertörvénynek (LMBG).
Tárolás:	-15 °C-on fagyérzékeny. 4 évig eltartható.
Veszélyek és balesetvédelmi ajánlások:	Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete értelmében: veszélyességi fok C: maró hatású foszforsav tartalom: > 25 % Veszélyforrások: R 34 - Égési sérülést okoz. Balesetvédelmi előírások: S 2 Gyermekektől elzárt helyen tárolandó. S 26 Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. S 27 A termékkel szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. S 28 Ha bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel. S37/39 Védőkesztyű, védőszemüveg / arcvédő használata kötelező. S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal hívjon orvost (az orvosnak mutassa meg a csomagoláson látható címkét).