




neodisher® N

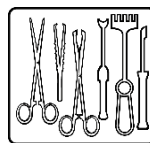

Savas tisztító- és semlegesítőszer gépi mosáshoz Műszerek előkészítése, Laboratóriumi üvegedények és állatketrecek

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

- Lúgos maradványok semlegesítése sebészeti eszközök, érzéstelenítő eszközök, tárolóedények, műtéti cipők, cumisüvegek és egyéb orvostechnikai eszközök gépi tisztításakor.
- Lúgos maradványok semlegesítése laboratóriumi üvegedények gépi tisztításakor
- Laboratóriumi üvegedények gépi savas előtisztítása vagy tisztítása
- Állatketrecek gépi savas tisztítása

Teljesítmény spektrum:

- Eltávolítja az elszíneződéseket, a vízkövet, a vízeletkövet és más savval oldható szennyeződéseket.
- Alkalmas üveg, kerámia, nemesacél, saválló műanyag és gumiból készült tárgyakhoz.
- Nem alkalmas színes fémekhez, krómozott és nikkelezett alkatrészekhez, valamint eloxált alumíniumhoz.

Különleges tulajdonságok:

- Kiváló leöblíthetőség
- Nem tartalmaz felületaktív anyagokat

Alkalmazás és adagolás:

A neodisher N tisztító- és fertőtlenítő berendezésekben semlegesítésre, előtisztításra és tisztításra használható. Az adagolás többek között az alkalmazástól függ.

A neodisher N alkalmazásakor a következő paramétereket kell betartani:

Semlegesítés hőstabil és hőérzékeny műszerek, egyéb orvostechnikai eszközök és laboratóriumi üvegedények gépi tisztításakor	1 - 2 ml/l
Laboratóriumi üvegedények gépi savas előtisztítása vagy tisztítása	2 - 4 ml/l 40 - 60 °C
Állatketrecek gépi savas tisztítása	3 - 4 ml/l 60 - 80 °C

Az adagoláshoz megfelelő adagoló készüléket kell használni.

A vízfoltok elkerülése érdekében az utolsó öblítéshez teljes mértékben ioncserélt víz használata ajánlott.

A neodisher N alkalmazási oldatot maradéktalanul ki kell öblíteni vízzel (lehetőleg teljesen ioncserélt vízzel).

A neodisher N előtisztításhoz vagy tisztításhoz történő használata esetén ügyeljen az öblítendő tárgyak, a tisztító- és fertőtlenítőberendezés, valamint a lefolyóvezetékek savállóságára. Az eternit és az öntöttvas lefolyócsövek nem alkalmasak, és ezek esetében előzetesen semlegesíteni kell a lefolyó oldatot.

Általános használati utasítás:

- Kizárólag ipari felhasználásra.
- Ne keverje más termékekkel.
- A termékcseré előtt az adagoló rendszert, a szívócsöveket is beleértve, vízzel öblítse át.
- Az előkészítésnek az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályoknak és az érvényes előírásoknak megfelelően, megfelelő, validált eljárásokkal kell történnie.



neodisher® N

- Kérjük, vegye figyelembe az orvostechnikai eszközök gyártójának előkészítésre vonatkozó ajánlásait a DIN EN ISO 17664 követelményeinek megfelelően, a laboratóriumi üveggyártók tisztítási ajánlásait, valamint az állatketrecgyártók előkészítésre vonatkozó ajánlásait és a ketrec előkészítéssel foglalkozó munkacsoportnak (AK AKB) az AK KAB brosúra legfrissebb kiadásában megjelent ajánlásait („Käfigaufbereitung in der Tierhaltung richtig gemacht” (A ketrecek megfelelő előkészítése az állattartásban)).
- Tartsa be a tisztító- és fertőtlenítő készülékek gyártójának használati utasításait.

Műszaki adatok:

pH-érték	2,2 - 1,8 (1 - 4 ml/l, ioncserélt vízben meghatározva, 20 °C)
Viszkozitás	< 50 mPa s (koncentrátum, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,5 g/cm ³ (20 °C)
Titrálási tényező	0,16 (a neodisher titrálási utasítás szerint)

Összetevők:

A tisztítószeresek összetevői a mosó- és tisztítószeresekről szóló 648/2004/EK rendelet szerint:
> 30 % foszfátok

CE-jelölés:



A neodisher N megfelel az európai orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályok előírásainak.

A termékkel kapcsolatos súlyos eseményekről értesíteni kell a gyártót és az illetékes hatóságot.

Tárolási utasítások:

Tároláskor -15 és 30°C közötti hőmérsékletet kell biztosítani. Megfelelően tárolva 3 évig eltartható. Felhasználható: lásd a címkén a szimbólum mögött.

Veszélyre figyelmeztető és biztonsági utasítások:

A biztonsági, valamint környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatók. Ezek a www.drweigert.hu weboldalon a „szolgáltatások/letöltések” részben érhetők el.

A csomagolást csak teljesen kiürítve és lezárva ártalmatlanítsa. A töltőanyag-maradványok ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

MB 4201/3-1 2020. márciusi állapot