

neodisher[®] SBN

Flüssiges Spezialklarspülmittel zum Einsatz in Steckbeckenautomaten



Hauptanwendungsbereiche:	Härteabbindung und Klarspülung bei der maschinellen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen in Steckbeckenautomaten mit Dampfdesinfektion.
Eigenschaften:	neodisher SBN ist ein leicht sauer eingestellter Klarspüler mit speziellen Enthärtungskomponenten in schaumarmer Einstellung. Durch das gute Kalkbindevermögen und die Benetzung wird das Spülgut fleckenfrei und ohne Kalkablagerungen klargestäubt. Bei bestimmungsgemäßem Einsatz entstehen keine Kalkansätze im Dampferzeuger oder in den Rohrleitungen. neodisher SBN ist bei allen Wasserhärten einsetzbar.
Anwendung und Dosierung:	0,5 - 1, 5 ml/l je nach Wasserhärte über eingebaute Dosiergeräte. Auf Säurebeständigkeit von Dosiersystemen und Dampferzeugern achten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich der zusätzliche Einsatz von neodisher SBR, einem Spezialreiniger für Steckbeckenautomaten. Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinproduktebetriebsverordnung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden. Nicht mit anderen Produkten mischen. Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
Technische Daten:	Dichte (20 °C): 1,1 g/cm ³ pH-Bereich (gemessen in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,5 - 1,5 ml/l: 3,7 - 3,0 Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPas
Inhaltsstoffe:	Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: 15 - 30 % nichtionische Tenside außerdem Duftstoffe (Linalool), Konservierungsmittel (Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone)
CE- Kennzeichnung:	neodisher SBN erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäß Richtlinie 93/42/EWG.
Lagerhinweise:	Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig.
Gefahren- und Sicherheitshinweise:	Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar. Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4042/2-4
05/15



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60-0
Telefax: (040) 789 60-120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.