




neodisher[®] SBR extra

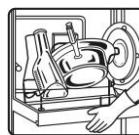

Tisztítószer ágytáztisztító és -fertőtlenítő berendezésekben való használatra



Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

- Ágytálak és kacsák ágytáztisztító és -fertőtlenítő berendezésekben való tisztítása

Hatásspektrum:

- Még az olyan makacs szennyeződések is eltávolítja, mint amilyenek a mészszippankicsapódások és az emberi ürülékekből származó citosztatikum-maradványok

Különleges tulajdonságok:

- Habszegény jelleg
- Bármely vízkeménységnél használható
- Megfelelő ágytáztisztító és -fertőtlenítő berendezésekben való mézsmegkötésre és utánöblítésre is alkalmas

Alkalmazása és adagolása:

A neodisher SBR extra olyan ágytáztisztító és -fertőtlenítő berendezésekben használható, amelyek tisztítószerhez való adagolópumpával vannak ellátva. Az adagolási mennyiség a tisztítási fázisban a vízkeménységtől és a szennyezettség fokától függően 1–3 ml/l.

Általános tudnivalók a használatához:

- Csak ipari használatra.
- Termékváltás előtt az adagolórendszert és annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni.
- A neodisher SBR extra oldatot teljesen le kell öblíteni vízzel.
- Az előkészítést a gyógyászati termékekre vonatkozó jogszabályok és az érvényes előírások szerint, megfelelő, validált eljárással kell végezni.
- Kérjük, vegye figyelembe a gyógyászatitermék-gyártó előkészítési javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány követelményeinek megfelelően.

- Tartsa be a tisztító és fertőtlenítő berendezés gyártójának kezelési útmutatóit.
- Más termékkel nem keverhető.

Technikai adatok:

pH-érték	11,2–11,5 (1–3 ml/l, teljesen ásványmentesített víz esetén, 20 °C)
Viszkozitás	< 50 mPa s (koncentrátum, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,2 g/cm ³ (20 °C)

Hatóanyagok:

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és tisztítószerokról szóló 648/2004/EK rendelet értelmében:

< 5% foszfonátok
15–30% EDTA

CE-jelölés:



A neodisher SBR extra megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó európai jogszabályok előírásainak.

Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság felé kell jelenteni.

Tárolás:

0–30°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Szakszerű tárolás esetén 3 évig használható. Felhasználható: lásd a címkén a szimbólum mögött nyomtatott dátumot.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon találhatóak. Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.



neodisher[®] SBR extra

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

MB 4007/3-2 Állapot: 2021/10

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségtől. Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak.
