




neodisher® Septo Fin

Desinfectante para
el reprocesamiento manual de
instrumentos termoestables y
termolábiles

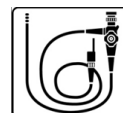

Concentrado líquido

Ámbito de aplicación:

- Desinfección manual de instrumentos termoestables y termolábiles, incluidos endoscopios flexibles, sondas transesofágicas, instrumentos para cirugía mínimamente invasiva y equipos de anestesia

Gama de prestaciones:

- Bactericidas (incluidos, por ejemplo, SARM, H. pylori), micobactericidas (incluidos los patógenos de la tuberculosis), fungicidas, viricidas y esporicidas (C. difficile) Eficacia confirmada por expertos
- Eficacia de desinfección probada y comprobada según las normas europeas, métodos VAH¹ y RKI/DVV²
- Poca formación de espuma, adecuado para su uso en procesos de circulación, como, por ejemplo, en sistemas semiautomatizados
- Compatible con todos los productos químicos de proceso neodisher para el reprocesamiento automatizado en lavadoras-desinfectadoras o lavadora-desinfectadora para endoscopios flexibles
- Adecuado para materiales como acero inoxidable, acero al cromo-níquel, aluminio anodizado, plásticos (incluida silicona), caucho, porcelana, vidrio y metales no ferrosos
- Listado por la VAH¹, listado por la ÖGHMP³ e incluido en la lista de desinfectantes de la IHO⁴
- Aroma agradable gracias a un sutil perfume

Características especiales:

- Sin formaldehído ni glioxal
- Excelente compatibilidad con materiales
- Apto para cualquier valor de dureza del agua

Uso y dosificación:

neodisher Septo Fin puede utilizarse en baños de inmersión, así como en sistemas semiautomatizados. Dependiendo de la eficacia deseada, prepare una solución de acuerdo con

la recomendación de aplicación que se describe a continuación.

Antes de la desinfección, los instrumentos o endoscopios deben limpiarse a fondo con, por ejemplo, los agentes de limpieza neodisher MediClean forte o neodisher endo CLEAN. Posteriormente, enjuague bien los instrumentos o endoscopios, sumérjalos en la solución neodisher Septo Fin y espere durante el tiempo de actuación correspondiente.

Desmonte y abra los instrumentos tanto como sea posible. Moje por completo todas las superficies con la solución desinfectante. Se deben eliminar las burbujas de aire.

Eficacia desinfectante (20 °C, baja carga)	
bactericida, levaduricida (VAH ¹ , EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562)	30 ml/l (3,0 %), 15 min 20 ml/l (2,0 %), 30 min 10 ml/l (1,0 %), 60 min
micobactericida (EN 14348, EN 14563)	50 ml/l (5,0 %), 30 min 40 ml/l (4,0 %), 60 min
fungicida (EN 13624, EN 14562)	50 ml/l (5,0 %), 60 min
esporicida contra C. difficile (EN 17126)	40 ml/l (4,0 %), 24 h
viricida limitado (EN 14476, EN 17111, RKI/DVV ²)	10 ml/l (1,0 %), 15 min
viricida (EN 14476, EN 17111)	40 ml/l (4,0 %), 15 min 30 ml/l (3,0 %), 30 min
viricida (RKI/DVV ²)	30 ml/l (3,0 %), 15 min 15 ml/l (1,5 %), 30 min



neodisher® Septo Fin

Recomendación de aplicación para la desinfección de productos sanitarios semicríticos según la recomendación KRINKO/BfArM (Boletín Federal de Salud de Alemania 2012 - 55:1248) (20 °C)

bactericida (incluidas las micobacterias), fungicida, viricida	50 ml/l (5,0 %), 60 min
---	-------------------------

Una vez transcurrido el tiempo de actuación, enjuague bien los objetos bajo agua corriente de calidad al menos potable (preferiblemente con agua desmineralizada).

La vida útil de la solución de aplicación sin usar es de 28 días. Por el contrario, según las recomendaciones KRINKO⁵ y BfArM⁶, las soluciones de aplicación deben prepararse diariamente y cambiarse de inmediato si aparece contaminación visible.

Indicaciones generales sobre el uso:

- Solo para aplicaciones comerciales.
- En general, se recomienda usar guantes para trabajar manualmente con desinfectantes.
- Para una dosificación controlada, se recomienda usar ayudas de dosificación manuales (por ejemplo, dispositivos de dosificación para desinfectantes, como neomatik mediDOS). Póngase en contacto con nosotros.
- No lo mezcle con otros productos.
- No lo vierta en otros recipientes, botellas, etc.
- El reprocesamiento debe realizarse de acuerdo con la legislación sobre productos sanitarios y la normativa aplicable, siguiendo procedimientos validados adecuados.
- Tenga en cuenta las recomendaciones de reprocesamiento del fabricante del producto sanitario, de acuerdo con los requisitos de la norma DIN EN ISO 17664.
- En general, no se deben utilizar productos que contengan aminas ni antes ni después de la aplicación de desinfectantes aldehídicos, como neodisher Septo Fin, ya que podrían provocar la formación de depósitos.

Evaluaciones periciales:

La eficacia de desinfección ha sido confirmada mediante evaluaciones periciales. Estaremos

encantados de proporcionar las evaluaciones periciales previa petición.

Datos técnicos:

Valor de pH	aprox. 4,0 (10-70 ml/l, determinado en agua totalmente desmineralizada, 20 °C)
Densidad	aprox. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Viscosidad	< 50 mPa·s (concentrado, 20 °C)

Ingredientes:

Ingredientes activos desinfectantes por 100 g: 15 g de glutaral

Marcado CE: 

neodisher® Septo Fin cumple los requisitos de la legislación europea sobre productos sanitarios.

En caso de que se produzca un incidente grave con este producto, se deberá informar al fabricante y a la autoridad pertinente.

Instrucciones de almacenamiento:

Durante el almacenamiento, se debe mantener una temperatura de entre 0 °C y 30 °C.

Se puede almacenar durante 3 años en las condiciones adecuadas. Fecha de caducidad: véase la fecha impresa en la etiqueta tras el símbolo .

Indicaciones de peligro y seguridad:

Encontrará información sobre seguridad y medio ambiente en las fichas de datos de seguridad. Están disponibles en www.drweigert.com, en la sección «Servicio/Descargas».

Deseche los envases solo si están completamente vacíos y cerrados. Eliminación del contenido sobrante: véase la ficha de datos de seguridad.

Ficha técnica 4207/3-4

Última actualización: 09/2019

¹ Verbund für Angewandte Hygiene (Asociación alemana de higiene aplicada)

² Robert-Koch-Institut (Instituto Robert Koch) / Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (Asociación alemana para el control de enfermedades virales)

³ Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (Sociedad austriaca de higiene, microbiología y medicina preventiva)

⁴ Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Asociación industrial alemana para la higiene y la protección de superficies)

⁵ Comisión de higiene hospitalaria y prevención de infecciones del Instituto Robert Koch

⁶ Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Instituto federal de medicamentos y productos sanitarios de Alemania)

La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No exime al usuario de realizar sus propios ensayos y pruebas. No permite derivar ninguna garantía jurídicamente vinculante sobre determinadas propiedades.