




neodisher® Septo PreClean



Środek myjący i dezynfekujący do przygotowywania ręcznego instrumentów termostabilnych i termolabilnych

Płynny koncentrat

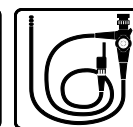

Obszary zastosowania:

- Mycie z dezynfekcją wstęną instrumentów termostabilnych i termolabilnych, narzędzi dentystycznych i endoskopów elastycznych, np. przed maszynową obróbką, dla zapewnienia optymalnej ochrony indywidualnej
- Przechowywanie na mokro narzędzi chirurgicznych i narzędzi dentystycznych przez dłuższy czas, np. w ciągu nocy lub weekendu
- Odpowiedni także do ręcznego mycia i dezynfekcji instrumentów termostabilnych i termolabilnych wraz z elastycznymi endoskopami

Zakres działania:

- Działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze potwierdzono badaniami według metod VAH¹ i norm EN². Ograniczone działanie wirusobójcze potwierdzono badaniami według norm EN² i metod RKI/DVV³
- Przeznaczony do takich materiałów, jak stal szlachetna, aluminium anodowane, metale lekkie (miedź oraz mosiądz), silikon, tworzywa sztuczne
- W wykazie VAH¹, wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO⁴

Szczególne właściwości:

- Bardzo dobre rezultaty mycia bez utwardzania białek
- Doskonała kompatybilność materiałowa
- Nie zawiera aldehydów i czwartorzędowych związków amonu

Użycie i dozowanie:

neodisher Septo PreClean może być stosowany w kąpielach zanurzeniowych i ultradźwiękowych. W zależności od wybranej skuteczności należy sporządzić roztwór według podanych niżej zaleceń dotyczących dawkowania. Włożyć narzędzia lub endoskopy do roztworu i pozostawić na wskazany czas oddziaływania.

Do sporządzenia roztworu roboczego neodisher Septo PreClean zaleca się użycie wody zmiękzonej lub miękkiej o stopniu niższym niż 10°d. Twardość wody nie powinna przekraczać wartości 20°d.

W przypadku przechowywania na mokro można włożyć narzędzia do odpowiedniego roztworu neodisher Septo PreClean na czas do 72 godzin.

Działanie dezynfekujące (20°C, wysokie obciążenie)	
Działanie bakteriobójcze (EN 13727, EN 14561, VAH)	5 ml/l (0,5%), 15 min
Działanie drożdżakobójcze (EN 13624, EN 14562, VAH)	5 ml/l (0,5%), 15 min
Działanie na wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV) (EN 14476, EN 17111)	15 ml/l (1,5%), 15 min
Działanie na wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV) (RKI/DVV)	10 ml/l (1,0%), 15 min

Nieużywany roztwór roboczy zachowuje swoją skuteczność przez 7 dni. Obciążone roztwory robocze muszą być wymieniane codziennie lub natychmiast w przypadku widocznego zanieczyszczenia, zgodnie z zaleceniem KRINKO⁵ i BfArM⁶.

Roztwór użytkowy neodisher Septo PreClean należy spłukać wodą (najlepiej demineralizowaną). Niewielkie pozostałości środka neodisher Septo PreClean, które mogą znajdować się jeszcze na narzędziach i zostać przeniesione do myjni-dezynfektora, nie powodują istotnego dla procesu obciążenia pianą lub spadku ciśnienia pomp cyrkulacyjnych.

Przed dezynfekcją z użyciem neodisher Septo PreClean i po niej nie należy stosować produktów aldehydowych.



neodisher[®] Septo PreClean

Ogólne wskazówki dotyczące zastosowania:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Do bezpiecznego dozowania produktu zaleca się stosowanie akcesoriów pomocniczych, takich jak urządzenie dozujące neomatik mediDOS. Prosimy o kontakt.
- Zasadniczo zaleca się noszenie rękawic podczas prac ręcznych z zastosowaniem środków dezynfekujących.
- Proces obróbki musi odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych oraz obowiązującymi zasadami przy zastosowaniu właściwej zatwierdzonej metody.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta wyrobów medycznych dotyczących obróbki zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 17664.
- Produkt nie jest odpowiedni do końcowej dezynfekcji półkrytycznych wyrobów medycznych.
- Nie mieszać z innymi produktami.

Raporty:

Działanie dezynfekujące zostało potwierdzone odpowiednimi badaniami. Raporty udostępniamy na życzenie.

Dane techniczne:

Wartość pH	8,9–8,7 (5–15 ml/l, określona w wodzie demineralizowanej, 20°C)
Lepkość	< 50 mPa s (koncentrat, 20°C)
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³ (20°C)

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia w sprawie detergentów WE 648/2004:
< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
5–15% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
ponadto: środek dezynfekujący, substancje zapachowe (limonene)

Substancje aktywne w 100 g:
8,0 g laurylpropylendiamina

Oznakowanie CE: 

neodisher Septo PreClean spełnia wytyczne wynikające z europejskich przepisów prawa o wyrobach medycznych.

Jeżeli dojdzie do poważnego zdarzenia z tym produktem, należy niezwłocznie to zgłosić producentowi i właściwym organom.

Wskazówki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C. Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji. Data ważności produktu jest podana na etykiecie za symbolem .

W trakcie magazynowania produktu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach może wystąpić zmiana koloru. Nie ma to wpływu na właściwości użytkowe produktu.

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w kartach charakterystyki. Są one dostępne na stronie www.drweigert.pl w części „Pliki do pobrania”.

Pojemnik należy utylizować tylko zamknięty i po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 4503/3-5
Stan: 07/2020

- 1 Stowarzyszenie Higieny Stosowanej
- 2 Zgodność z normami europejskimi EN13727, EN13624, EN14561, EN14562, EN 14476, EN 17111
- 3 Na podstawie wytycznych badań Instytutu Roberta Kocha (RKI) i Niemieckiego Stowarzyszenie Zwalczania Chorób Wirusowych (DVV)
- 4 Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni
- 5 Komisja ds. Higieny w Szpitalach i Zapobiegania Infekcjom w Instytucie Roberta Kocha
- 6 Państwowy Instytut Leków i Wyrobów Medycznych