




neodisher® SystemClean

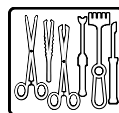

Mild alkalisch reinigings component
voor reiniging van thermostabiele
en thermolabiele instrumenten



Hoog geconcentreerde vloeistof

Belangrijkste toepassingsgebied:

Machinale reiniging van thermostabiele en thermolabiele instrumenten, instrumentarium voor Minimale Invasieve Chirurgie, micro-instrumentarium, anesthesietoebereiden, containers en overige medische gebruiksvorwerpen.

Werking spectrum:

Mild alkalisch reiniging component die samen wordt gedoseerd met de enzymatische reiniging component neodisher® SystemAct in de reiniging stap van de reinigings- en desinfectiemachine.

De verkregen enzymatische alkalische oplossing heeft de volgende eigenschappen:

- Effectieve verwijdering van opgedroogd en gedenateerd bloed.
- Voldoet aan de actuele aanbevelingen van het Robert Koch Instituut (RKI) om het risico te minimaliseren van de overdracht van de nieuwste varianten van de Creutzfeldt-Jakob ziekte (vCJJK).
- Geschikt voor rvs, instrumentenstaal, geanodiseerd aluminium, optieken en de gebruikelijke kunststoffen en materialen van anesthesietoebereiden.
- Uitstekende compatibiliteit met geanodiseerd aluminium wanneer gedoseerd word op basis van individuele wensen.

Eigenschappen:

- De concentratie van de componenten kan individueel worden gekozen, geheel afhankelijk van de toepassing en vervuiling.
- Zeer geconcentreerde vloeistof: maximale efficiëntie.
- Uitstekende materiaalverdraagzaamheid.
- Laag schuimende formule.
- Eersteklas reinigende werking als gevolg van de individueel aanpasbare combinatie van de alkali en enzym componenten.
- Geen neutralisatie stap noodzakelijk.
- Vrijgesteld van classificatie: geen gevaarlijke stof, niet-gevaarlijk product.

- Uitgerust met RFID-transponder voor de automatische identificatie van het product met weigomatic systeem ALPHA component doseersysteem om op een veilige manier product verwisselingen uit te sluiten.

Dosering en gebruik:

De reiniging componenten neodisher® SystemClean en neodisher® SystemAct zijn bedoeld voor gebruik in reinigings- en desinfectiemachines. De dosering is onder meer afhankelijk van de toepassing en de verontreinigingsgraad van de voorwerpen. De volgende parameters worden aanbevolen bij gebruik van neodisher SystemClean en neodisher SystemAct:

Machinale reiniging van thermostabiele en thermolabiele instrumenten	0.5 - 1 ml/l (0.05 - 0.1 %) neodisher SystemClean
	0.5 - 1 ml/l (0.05 - 0.1 %) neodisher SystemAct
	30 - 60 °C, 10 min

Het product kan uitsluitend gedoseerd worden via het weigomatic system ALPHA componenten doseersysteem, dat speciaal is ontwikkeld voor het doseren van sterk geconcentreerde vloeistoffen.

Voor de dosering in de reinigings- en desinfectiemachine moet geschikte doseerapparatuur worden gebruikt.

Zowel bij de reinigingsfase als bij de slotspoeling wordt het gebruik van demiwater aanbevolen. De gebruikelijke neutralisatie stap bij gebruik van alkalische producten kan worden overgeslagen. Bij ooginstrumentarium adviseren wij vóór de eindspoeling nog een extra tussenspoeling met water.

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Vermeng de componenten niet als concentraten.
- Niet vermengen met andere producten.
- Voor gebruik van ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.



neodisher® SystemClean

- De reiniging en desinfectie moet in overeenstemming met de richtlijn voor medische hulpmiddelen worden uitgevoerd in passende gevalideerde processen.
- De gebruiksooplossing moet volledig met water afgespoeld worden (bij voorkeur met demi-water).
- Let ook op de aanwijzingen van de instrumenten fabrikant voor reinigen en desinfecteren volgens de DIN en ISO 17664 richtlijnen.
- Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de reiniging- en desinfectie machine.

Product gegevens:

pH waarde	10.8 - 11.0 (0.5 - 1.0 ml/l, in gedemineraliseerd water, 20 °C)
Soortelijk gewicht	1.17 g/cm ³ (20 °C)
Viscositeit	< 10 mPa s (concentraat, 20 °C)
Titratie factor	0.4

Samenstelling:

Conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:
< 5 % fosfaten, polycarboxylaten

CE-markering: CE

neodisher® SystemClean voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische producten.

Opslag informatie:

Altijd bij een temperatuur tussen -18 en 30 °C.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden.
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de stempel op het etiket achter het zandloper symbool.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

neodisher® SystemClean is niet als gevaarlijke stof gelabeld.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden.

Zie ook het Veiligheids Informatie Blad.
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 4024/2-1
Versie 07-2015

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 • 9405 PT Assen

Tel.: 0592-319393
Fax: 0592-310117

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl