



neoform[®] Classic

Środek myjąco-dezynfekcyjny do powierzchni



Płynny koncentrat

Obszary zastosowania:

- Mycie i dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych, wyposażenia medycznego oraz innych powierzchni w szpitalach, obiektach medycznych, domach opieki, laboratoriach oraz instytucjach publicznych
- Nadaje się do użycia wraz z chusteczkami do nawilżania Dr. Weigert neoform wipex RTF

Zakres działania:

- Bakteriobójczy, drożdżakobójczy, prątkobójczy, działający na wirusy osłonkowe, ograniczone spektrum aktywności potwierdzone niezależnymi certyfikatami
- Aktywność potwierdzona w teście 4-polowym (EN 16615)
- Aktywność dezynfekcyjna została przetestowana i udowodniona standardami Europejskimi oraz metodami VAH¹
- VAH¹-skatalogowany, zamieszczony na IHO² liście środków dezynfekcyjnych
- Używanie wraz z chusteczkami Dr. Weigert neoform wipex RTF spełnia aktualne zalecenia VAH³

Szczególne właściwości:

- Szerokie spektrum aktywności, nawet przy niskich stężeniach, krótki czas kontaktu
- Dobre właściwości myjące
- Nie zawiera aldehydów
- Doskonała kompatybilność materiałowa

Użycie i dozowanie:

neoform Classic jest używany do łącznego mycia i dezynfekcji powierzchni w temperaturze pokojowej poprzez przecieranie. Dla osiągnięcia wymaganej aktywności bójczej rozcieńczyć neoform Classic zgodnie z zawartymi poniżej zalecanymi stężeniami. Przecierać powierzchnie roztworem roboczym. Przestrzegać wymaganych czasów kontaktu.

Instrukcje dotyczące używania produktu z systemem chusteczek neoform wipex RTF można znaleźć w ulotce produktu neoform wipex RTF. Nasączone chusteczki można stosować do 28 dni, gdy opakowanie jest szczelnie zamknięte

Zakres działania (20°C) Warunki brudne (nieumyte wstępnie powierzchnie)	
bakteriobójczy VAH, EN 13727, EN 16615)	5 ml/l (0.5 %), 5 min
drożdżakobójczy (VAH, EN 13624, EN 16615)	5 ml/l (0.5 %), 5 min
prątkobójczy (EN 14348)	15 ml/l (1.5 %), 60 min
działanie na wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV) (EN 14476)	10 ml/l (1.0 %), 15 min 5 ml/l (0.5 %), 30 min
ograniczone spektrum wirusobójcze (norovirus, adenovirus, w tym wszystkie wirusy osłonkowe) (EN 14476)	20 ml/l (2.0 %), 120 min
Rotavirus (EN 14476)	20 ml/l (2.0 %), 90 min

W przypadku stosowania na powierzchniach urządzeń medycznych po upływie wymaganego czasu kontaktu konieczny jest etap płukania lub wycierania wodą zdatną do picia. Odnosi się to w szczególności do powierzchni malowanych proszkowo i ze stali nierdzewnej, ponieważ mogą one powodować zmiany powierzchni materiału

Produkty na bazie aldehydów nie powinny być używane przed i po użyciu neoform Classic;

Ważne wskazówki stosowania:

- Tylko do użytku profesjonalnego!
- Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania zaleca się stosowanie akcesoriów pomocniczych jak urządzenia mieszające, czy elementy dozujące



neoform[®] Classic

- Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych podczas pracy ze środkami dezynfekcyjnymi
- Stosowanie powinno być zgodne ze wszystkimi rozporządzeniami zgodnie z dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych i powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi zatwierdzonymi procesami
- Nie mieszać z innymi produktami
- *Środki dezynfekcyjne stosować bezpiecznie. Należy zawsze zapoznać się z etykietą produktu przed użyciem.*

Raporty i opinie:

Aktywność dezynfekcyjna została przetestowana i potwierdzona certyfikatami.

Raporty z badań dostępne na życzenie.

Dane techniczne:

Wartość pH	10 (koncentrat, 20 °C)
Lepkość	< 10 mPa s
Gęstość	około. 1.0 g/cm ³ (20 °C)

Skład:

Zawartość zgodna z rozporządzeniem (EC) 648/2004 w sprawie detergentów:

Zawartość substancji aktywnej w 100 g:

9 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropano-1,3-diaminy

0.9 g aminy, N-C12-14-(parzyście-numerowanej)-

pochodne alkylotrimetyleny, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

Znak CE:  0297

neoform Classic jest zgodny z europejskimi wytycznymi dotyczącymi wyrobów medycznych

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturach od 0 °C do 30 °C.

Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji. Data ważności podana jest na etykiecie za symbolem .

Podczas przechowywania w fabrycznie zamkniętych jednostkach handlowych mogą wystąpić zmiany koloru produktu. Nie ma to wpływu na właściwości produktu

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.com

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 4470/3-4 PL 1.0/04.2020

¹ Verbund für Angewandte Hygiene [Association of Applied Hygiene, Germany]

² Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz [Industry Association Surface Protection and Hygiene, Germany]

³ Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vortränksystem für die Flächendesinfektion (Hyg Med 2012; 37-11) [Recommendation for checking critical points when using wipes dispenser systems in a pre-soak system for surface disinfection]