



neoform MED rapid



Desinfetante rápido para produtos médicos

Solução pronta a usar



Área de aplicação:

- Desinfecção rápida e direcionada de superfícies de dispositivos médicos como, por exemplo, mesas de operação, em hospitais e consultórios médicos e dentários.

Espectro de desempenho:

- Eficácia bactericida, levuricida, fungicida e tuberculicida confirmada por peritos de acordo com os métodos EN¹, bem como eficácia virucida limitada confirmada por peritos de acordo com os métodos RKI/DVV²
- Além disso, virucida PLUS (eficaz contra norovírus e adenovírus) e eficaz contra rotavírus
- As superfícies a desinfetar devem ser resistentes a desinfetantes alcoólicos.
- Não adequado para a desinfecção de vidro acrílico (plexiglas)
- Registado na lista de desinfetantes IHO³

Propriedades especiais:

- Eficácia abrangente após um curto período de ação
- Secagem rápida e sem resíduos, não é necessário enxaguar
- Sem aldeídos, corantes nem perfumes

Utilização e dosagem:

Aplique neoform MED rapid não diluído sobre as superfícies limpas e secas, molhando-as, e limpe as superfícies a desinfetar. As superfícies devem ser completamente humedecidas com neoform MED rapid.

Dependendo do nível de desinfecção desejado, respeite os tempos de ação indicados abaixo.

	carga reduzida, 20 °C (superfícies pré-limpas)
bactericida (EN 13727, EN 16615)	sem diluir, 1 min.
levurocida (EN 13624, EN 16615)	sem diluir, 1 min.
fungicida (EN 13624)	sem diluir, 20 min.
tuberculicida (EN 14348)	sem diluir, 30 seg.

virucida limitado (incl. HIV, HBV, HCV) (EN 14476, RKI/DVV ²)	sem diluir, 15 seg.
virucida limitado PLUS (adenovírus, norovírus, incluindo todos os vírus envelopados) (EN 14476)	sem diluir, 2 min.
eficaz contra os norovírus (MNV ⁴) (EN 14476)	sem diluir, 2 min.
eficaz contra adenovírus (EN 14476)	sem diluir, 1 min.
eficaz contra rotavírus (EN 14476)	sem diluir, 1 min.

É importante ter em atenção que, devido ao seu teor alcoólico, o neoform MED rapid não deve ser aplicado em quantidades excessivas (aplicar no máximo 50 ml pro m² na região a tratar e no máx. 100 ml pro m² na região total) . Leia atentamente e siga as instruções de segurança e os avisos de perigo!

Indicações gerais relativas à utilização:

- Apenas para aplicações comerciais.
- Para uma dosagem económica e controlada, recomenda-se a utilização de auxiliares de dosagem manuais. Entre em contacto connosco.
- Em geral, recomenda-se o uso de luvas durante trabalhos manuais com desinfetantes.
- O processamento deve ser realizado de acordo com a legislação relativa a dispositivos médicos e regulamentos aplicáveis, utilizando procedimentos validados adequados.
- Siga as recomendações de preparação do fabricante dos produtos médicos e superfícies.
- Não misturar com outros produtos.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburgo

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com



neoform MED rapid

Peritagem:

A eficácia desinfetante foi confirmada por peritos.

Dados técnicos:

Viscosidade	< 10 mPa s (não diluído, 20 °C)
Densidade	aprox. 0,9 g/cm ³ (20°C)
Ponto de inflamação	27 °C de acordo com a norma DIN 22719

Ingredientes:

Ingredientes ativos em 100 g:

35,0 g de propanol-1

25,0 g de etanol

Marcação CE: 

O neodisher MED rapid cumpre os requisitos resultantes da legislação europeia relativa aos dispositivos médicos.

Em caso de incidente grave com este produto, este deverá ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente.

Instruções para armazenamento:

Durante o armazenamento, deve-se manter uma temperatura entre -15 °C e 25 °C. Mantenha o recipiente bem fechado.

Se armazenado corretamente, pode ser utilizado durante 3 anos. Pode ser utilizado até: ver a impressão na etiqueta por trás do símbolo .

Indicações de perigo e de segurança:

As informações de segurança e ambientais podem ser encontradas nas fichas de dados de segurança. Estão disponíveis em www.drweigert.com na secção “Assistência/Downloads”.

Eliminar apenas os recipientes vazios e selados.
Eliminação de resíduos de material de enchimento: ver ficha de dados de segurança.

MB 4070/3-6 Versão: 01/2024

- 1 Métodos de ensaio europeus
- 2 de acordo com as diretrizes de teste do Instituto Robert Koch (RKI) e da Associação Alemã para o Combate às Doenças Virais (DVV)
- 3 Associação Industrial de Higiene e Proteção de Superfícies
- 4 Norovírus murino

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências atuais. Não dispensam o utilizador de efetuar os seus próprios testes e ensaios. Não pode ser daqui derivada uma garantia juridicamente vinculativa de certas propriedades.